

今日も頑張れる 俺のサポーター 1日バリバリ！仕事をこなせる！

女性も
使える！

背面の立体形状 EVA により、
働く人の腰の動きにフィットする
全く新しい腰サポーター！



立体形状の
EVAが
腰回りを
がっちりサポート

前面 1 か所で
装着簡単



立体形状のため腰に沿い
ぴったりフィット！




ゴムベルトの幅を狭くしているので
お腹まわりスッキリ！

表側

通気性のあるメッシュ+EVA

別売、今日もっと頑張れる腰サポータープラス（腰アシスト）に
連結可能なループ付き

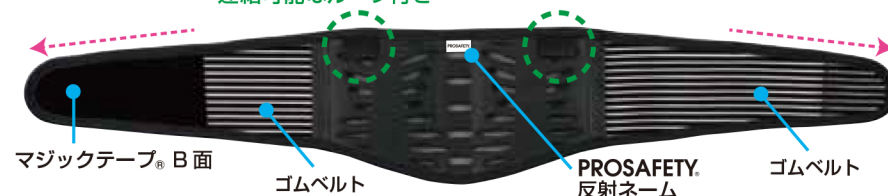


肌側

背骨に沿った凹凸付き EVA
セミハードタイプによる立体形状

ゴムベルトを下向きに
縫製することにより
装着時のフィット感アップ



装着方法

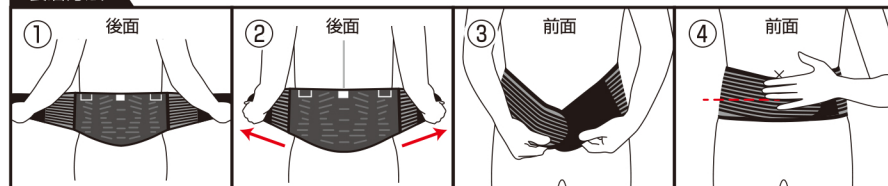

腰に対して PROSAFETY®
反射ネームが表側上にな
るようにして片手ずつゴ
ムベルトを持ちます。

腰全体を覆うように上下位
置を合わせ PROSAFETY®
反射ネームが体中央の背骨
位置と合うように左右位置
を合わせ左右のゴムベルト
を引っ張ります。

左側のマジックテープ®B面
を前に引き、マジックテープ®
A面を重ねて装着します。
締付け具合を調整したい場合
はマジックテープ®のとめる位
置を調整してください。

上下左右の装着位置を整
えます。へそ下から指 3
本位下（丹田）にゴムベル
トの中心が位置するよう
に装着してください。

サイズの選び方

図のようにへそ周りを測っ
て、適応サイズ内の商品
をお選びください。2 つの
サイズに該当する人は、大
きい方をおすすめします。



S	へそ周り 55～75cm
M	へそ周り 75～90cm
L	へそ周り 85～100cm
LL	へそ周り 95～110cm

女性も
使える！

品 名	サイズ	色	品 番	J A N
PROSAFETY® 今日も頑張れる 俺のサポーター	腰用 S	黒	MPRO-14	4902993171612
	腰用 M	黒	MPRO-11	4902993169404
	腰用 L	黒	MPRO-12	4902993169411
	腰用 LL	黒	MPRO-13	4902993169428

生地：ポリエステル / 発泡 EVA ゴム：ナイロン / ポリウレタン マジックテープ®：ナイロン

MADE IN CHINA