

日本製

洗える防護ガウン

L-LL

モデル身長
180cm

M-L

モデル身長
157cm



水や油を弾くはっ水素材の袖付きガウンです。

感染対策や入浴・食事介助にお使いいただけます。

素材：ナイロン 100%
(アクリルコーティング、はっ水加工)

サイズ：M-L / 適応身長 150 ~ 170 cm

L-LL / 適応身長 160 ~ 180 cm

カラー：ミントグリーン / ホワイト




ベルトループで
ひもを固定します。

乾燥機
80℃まで
対応!

Point1

水や油を弾く
はっ水素材!

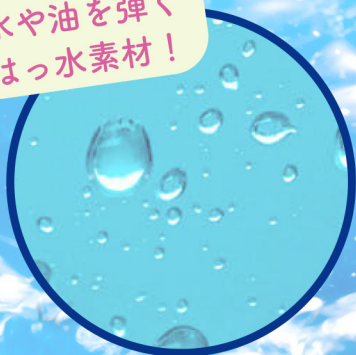

Point2

マジックテープで
着脱カンタン!



Point3

前で結べるので
作業性アップ!



洗える防護ガウンの特徴

ひもが前で結べるので
身体にフィットします。



マジックテープで
着脱が容易です。



両サイドのベルトループに
ひもを通してご使用ください。

サイズ (cm)

〈M-L〉

幅 × 丈 : 87 × 103

ひもの長さ : 243

〈L-LL〉

幅 × 丈 : 102 × 108

ひもの長さ : 259

●洗濯方法 / 洗濯時の注意

- ・洗濯時は後ろのマジックテープを留めてください。
- ・洗濯機の故障の原因となる場合がございますので、必ずネットに入れて洗ってください。
- ・乾燥機は 80℃までご使用可能です。
- ・乾燥機の繰り返しのご使用により、はっ水コーティングが剥がれる可能性がございます。



●取扱い注意

- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・本商品を火気及び加熱したものの近くに置かないでください。
- ・肌に異常が見られた時はすみやかに着用を中止してください。
- ・サイズが合わない場合、無理な着用は控えてください。
- ・破れやほつれのある商品をご使用にならないでください。
- ・過度な力で引っ張ったり、鋭利なもので触れないでください。破れや変形の原因となります。

もしもの時に…

感染の疑いがある場合の対処方法 (一次消毒)

[A] 熱水消毒 (80℃・10分)

[B] A が困難な場合、含有率 70%以上のエタノールを、近距離でまんべんなく吹き付けした上で、ビニール袋で二重に密閉し、外側を 0.05%の次亜塩素酸 Na で清拭または含有率 70%以上のエタノールで清拭した後、洗濯

※次亜塩素酸 Na を使用すると変色する可能性がございます。

(出典：一般社団法人日本病院寝具協会)



株式会社 特殊衣料 (担当:)

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40
TEL : 011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>