


Thermoline

携帯用体温表示ラベル サーマ・ライン FH12

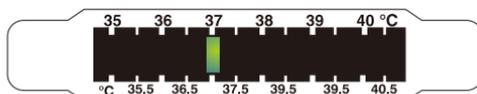

ONDOLAB.

【使用方法】

飲食や入浴、運動をした直後の30分は避け、室内の室温16-27℃(推奨環境18-22℃)の環境で使用してください。
額が綺麗で乾燥していることを確認し、ラベルの両端を持ち、眉毛の真上の中央にしっかりと15秒間押し当てます。

鏡を額にかざし、緑色の表示を確認してください。(現在の体温です。)

【保管及び取り扱いについて】

- *高温多湿、直射日光や紫外線を避けて保管してください。
- *常温管理(推奨環境16-40℃)湿度 15-95%RH
- *使用の度に柔らかい布や水に浸した紙でやさしく拭いてください。
(液体に浸さないこと。)
- *乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- *額以外には使用しないでください。

【使用上の注意】

平熱よりも高い場合は、医療用体温計で測定してください。
感染が疑われるときは、再使用したり、他者と使いまわしをしないでください。

アイビー技研株式会社

東京都豊島区駒込2-3-1(六興ビル)

TEL.03-3917-3121

<http://ondolab.com/>

Made in the UK