

# ユーリンMB・ソフトベルトの使用法


## 装着方法

- ①ベルトの長さをご自身のウエストに合わせて調整して下さい。折り返して止めるだけなので簡単です。プラスチック角カンが気になる方はガーターをスライドさせて隠せます。



- ②ガーターに付いているワニ口クリップでバッグをはさみ、取り付けて下さい。

- ③ワニ口クリップを固定するマジックテープの部分はご自由に切って、調整することができます。

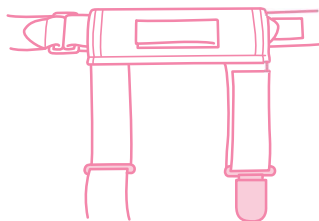


- ④装着が完了したら、体から出ている尿管と接続管をつないで下さい。接続の際は清潔操作して下さい。



- ⑤バッグの下部を太ももベルトで太ももに固定して下さい。太ももベルトは切って、長さを調整することも出来ます。

- ⑥ガーター本体に付いているマジックテープを使用して、チューブの固定が出来ます。

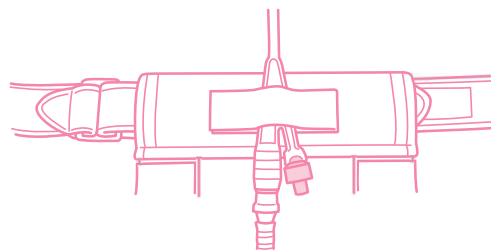

## 使用上の注意

- ユーリンMB・ソフトベルトは、腰ベルトにセットしているガーターにユーリン・ミニ・バッグ夜間用(1000cc)を吊り下げて、太ももに装着する為のベルトです。それ以外の用途でのご使用はしないで下さい。
- ご自身のご都合で、他社のバッグを吊り下げたい場合には、十分ご確認の上、自己責任での使用をお願いします。
- バッグにつきましては、バッグの使用上の注意をご確認下さい。
- 金属製のワニ口クリップを使用していますので、磁気共鳴装置類(MRI、MRA等)使用の際には必ず外して下さい。

### 〈素 材〉

綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄(クリップ部)、シリコン(クリップ部)

### 〈洗濯方法〉



洗濯時は必ず鉄製クリップを外し、マジックテープ部分は接着した状態で洗濯してください。

### 〈適用範囲〉

ウエスト55cm~110cm