

今日から、変わる。
自由に動けて、
ジブンらしく過ごせる毎日へ。

やりたいことも、行きたいところも、

制限されない。

ムーバル
moval で、心も体も自由になれる。

スポーツや仕事、

楽しい旅行を諦めず、

新しいことにも今日から

チャレンジしよう。



どんな動きにもしっかりついてくる

さらっと快適、気分も軽く

水濡れも気にならない

“極薄”フィルムだから実現できた 動ける自由。

従来の強く貼りつく“厚い”テープを見直し、
しっかり固定しながらも、快適に過ごせる

“極薄”フィルムを採用しました。

7ミクロンの極薄が生み出す「やわらかさ」と


「ムレにくさ」で、毎日の生活をもっとアクティブに。



7ミクロン（1000分の7ミリメートル）もの薄さのフィルムは、卵の薄皮と比べても
さらに1/10ほどの薄さ。肌のキメにまでなじんで段差もわからないほど。

肌の凹凸に密着 × 極めて高い伸縮性


薄くてとても柔軟なフィルムだから、肌の
凹凸に沿ってしなやかに貼りつき、面板の
隅まで密着。さらに、体の動きに合わせて
良く伸びて破れにくく、体の動きにしっかり
ついてくる安心感があります。

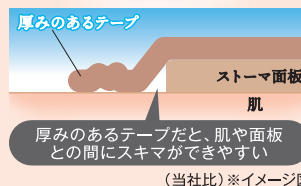

（当社比）※イメージ図

汗をどんどん蒸発 × しっかり防水

高い透湿性のフィルムが汗を素早く蒸発さ
せるから、汗がこもらずムレにくい。さらに外
からの水をしっかり弾いて、面板への水の
染み込みを防ぎます。運動時の汗も、その後
の入浴も安心。

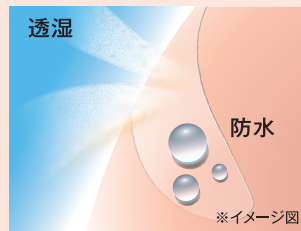

フィット感を追求した“形”で安心の自由。

2枚に分けて貼れる形にすることで、ホールド力をアップさせました。

面板の形や装具の種類を問わず、適した固定ができて安心です。


面板の外周をしっかりカバー

2枚のフィルムの端がしっ
かり重なるので、面板
を端までしっかり覆える。



様々な形の面板にフィット

2枚に分けて貼るから、貼る向きや
角度を自由に調整できる。

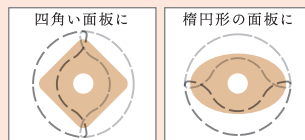

装具のカーブに 合わせて貼りやすい

フィルム内側のカーブが、
装具の形状にぴったり
合って、きれいに
貼れる。




カンタンな “手順”で、 いつでも自由に。

極薄フィルムを使ったことがなく

ても、順番通りに使うだけでカンタンに


貼れます。誰でもきれいに貼れるよう

3層構造 になっていて、いつでもすぐに使える工夫がいっぱいです。

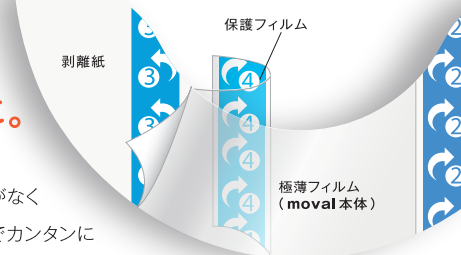


運動前に、忙しい朝に サッと貼れる。


① から ④ の紙と保護フィルムを、番号通りに順番にはがして貼っていくだけで
カンタンに完成します。

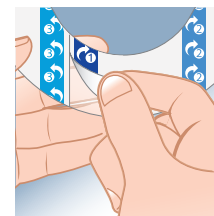

① の紙をはがして
貼りつけます

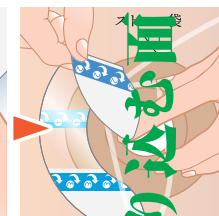



② の紙をはがして
貼りつけます
（③ も同様に）

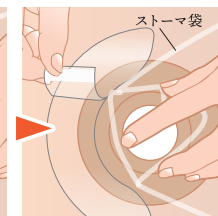


④ から保護フィルムをはがし
ます
（反対側も同様に貼ります）

装具交換時に サッとはがせる。

はがしたいときにサッとはがせるよう、フィルムの両端には、つまみやすい「タブ」付き。
ストーマ袋で隠れて直接見づらい場所でも、タブがサッとつまめて、はがしやすく
なっています。

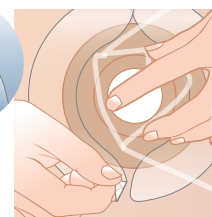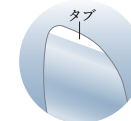

端の白いタブを持って引つ
ばります

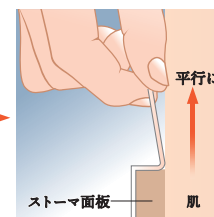

肌にやさしくはがするため、肌と
平行になるよう、ゆっくりはが
します

※movalを貼る前に、面板と周辺の肌の汚れや水分をしっかりと取っておきます。特に
皮膚保護剤が付着していると、貼りつきにくくなることがありますので、必要に応じて
取り除いてください。

アクティブLifeのための ストーマフィルム **moval** ムーバル

どんな動きにも
しっかりついてくる

- 極薄フィルムがぐんぐん伸縮し、体の様々な動きにしなやかにフィット
- ゴワつかず、肌になじんで違和感もほとんどなし
体の動きも邪魔しない

ひねる動きが大切なゴルフや
上下動の大きいランニングに



中へ折り込む面

汗をかいても
さらっと快適で
気分も軽く

- 汗にもムレにくくベタベタの不快感から解放
- 汗をかいてもフィルムが浮きにくくはがれる不安が少ない

よく汗をかくスポーツや
屋外での仕事・農作業に

※イメージ図
(実寸大)

スポーツ後の
シャワーも温泉も
気にせず入れる

- 極薄フィルムがぴったり密着するから水分の通るスキマができず
ムレにくく水も入り込みにくい
- 面板のフチをしっかりカバーして防水
面板が水で溶けるのを抑える

水泳や
しっかり浸かりたい温泉
運動後のシャワーに



ストーマの面板を、しっかり固定するサージカルテープ



ムーバル
moval

【20枚入り 1,500円】

1回あたり 150円
(2枚使用の場合)

moval (ムーバル) 規格表

サイズ	品名コード
幅 3.5cm × 直径 16cm	YB-R35160


※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

※凹凸のあるところや動きが大きい部分など、モレが気になる箇所だけに貼ってもOK。
※**moval** のサイズが小さすぎる・大きすぎる場合は、自分で好きな大きさにカットして
使えるロールタイプのフィルム「エアウォールふ・わ・り」もあります。

製品のご購入

*ストーマ用品お取り扱い店

お取り扱いの有無や在庫状況は、普段ご利用のお取り扱い店へ直接お問い合わせください。

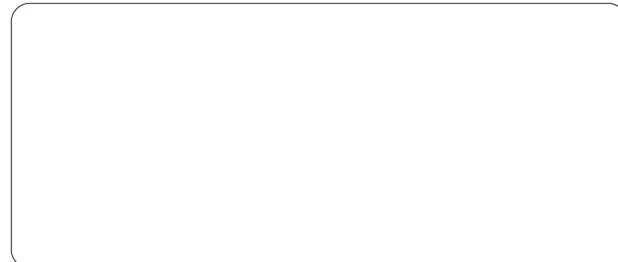

***moval** がストーマ用品の給付対象に当たるかどうかは、お住まいの市区町村で異なりますので、各市区町村の福祉事務所へお問い合わせください。

●skinixの公式webサイト、楽天市場、Amazonなどでもご購入いただけます。

テープが医療にできること、もっと。

skinix

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

TEL: 06-6658-8217

FAX: 06-6658-8101

東京支店：〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL: 03-5634-3843

FAX: 03-5634-3845

札幌・仙台・名古屋・熊本

moval は、イギリスの
ストーマケア用品メーカー
Welland Medical社
との共同開発で生まれました。



【使用上の注意】

●**moval** は未滅菌ですので、創部に直接貼付しないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるときにつく場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水泡等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

【保管方法】


●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。

ZZ040 2004-10-000 第2版

もっと自由に、
もっとジブンらしく。

アクティブLifeのための、ストーマフィルム

ムーバル
moval

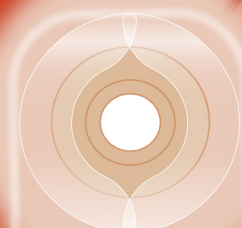

どんな動きにもしっかりついてくる

さらっと快適、気分も軽く

水濡れも気にならない

skinix