


スカート (スプリング式)

HAGOROMO製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
これからも、X線防護用品はHAGOROMOをご指定くださいますよう、
よろしく願い申し上げます。

お取り扱いの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。

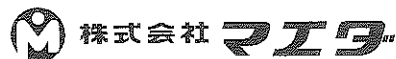

●お問い合わせ先

営業部



TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884

〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9

スプリングの取り付け方法 …… 出荷時にはスカートとスプリングが別々になっています

- ① 図のようにスプリングを留め具に通してください。
スプリングの開いている方が、スカートの後ろ側になります。
- ② ホックをパチンと音がするまで、しっかりと留めてください。

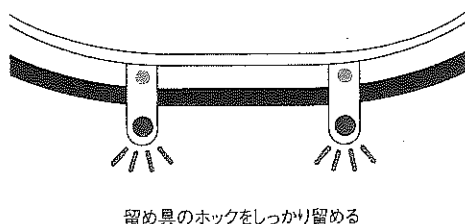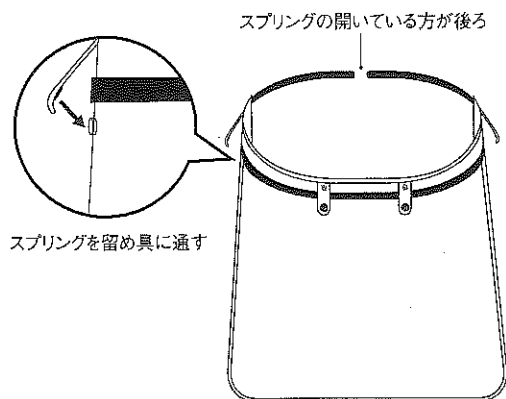

■ スカートの装着方法

スプリングを広げて腰にまわし、手を離すだけで簡単に着用できます。

■ お取り扱い上の注意

汚れた場合には、アルコール、中性洗剤で拭き取ってください。

消毒を要する場合には、消毒用アルコールをお使いください。ガス滅菌、高圧蒸気滅菌はご使用になれません。

■ 保管方法

スプリングをはずして平らに置くか、ハンガーなどに掛けて保管してください。

防護衣は折り畳んだりすると、遮へい能力を損ずる恐れもあります。形が変形するような保管方法は避け、原型を保つような方法で保管してください。