


器11 放射線障害防護用器具
 一般医療機器 放射線防護用手袋 JMDNコード: 38364000

サブガード

**【形状・構造及び原理等】

本品は、鉛化合物を含有したクロロプレンゴム製のパウダ付滅菌済み手袋です。

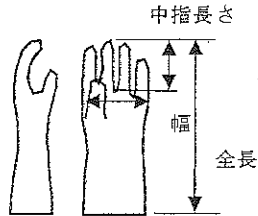

(単位 mm)

サイズ	中指長さ	掌部の幅	最小全長
7	74±5	88±5	280以上
7.5	76±5	94±5	290以上
8	78±5	100±5	
8.5	80±5	106±5	300以上
9	82±5	112±5	

**● 種類及び性能 (遮へい効果)

種類	厚さ mm	鉛当量
SG 03	0.35±0.10	0.03 mmPb 以上
SG 10	0.70±0.10	0.10 mmPb 以上

● 物性

促進老化前	切断時引張強さ	9.8 MPa 以上
	切断時伸び	600 % 以上
促進老化後	切断時引張強さ	6.8 MPa 以上
	切断時伸び	420 % 以上

【使用目的】

術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護(減衰)するために使用する滅菌済み手袋です。

**【使用方法等】

1. 手袋は無菌的に装着し、手袋表面のパウダを十分に除去してから使用してください。
2. 再滅菌して使用する場合は、エチレンオキサイドガスを使用してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- **● 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- **● 手袋に付いているパウダは、肉芽腫や術後癒着の形成リスクを高める恐れがあることが報告されていますので、リスクを考慮して本品の使用を検討してください。

2. 重要な基本的注意

- 熱いものには触れないでください。
- 1 双袋包装を開封したらすぐに使用してください。
- **● 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
- **● 使用後手袋を廃棄する場合は、条例・規則に従い、安全な方法で処分してください。
- 無理な装着や脱着は破損の原因となるので注意してください。
- 手袋に破損等異常が認められる場合は使用しないでください。

3. 相互作用

- **● この包装が開封されるか又は傷つけられるまで無菌です。
- 手袋は、薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので確認の上使用してください。

**【保管方法及び使用期限等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温や湿気を避けて保管してください。
- 使用後は、汚れを落として適切に保管してください。

**2. 使用期限

滅菌後 3 年として使用期限を表示。(自己認証による)

【包装】

1 双入り

**【主要文献及び文献請求先】(添付文書請求先)

三興化学工業株式会社 品質保証課
 TEL (0827)52-3111 FAX (0827)53-7622

**【製造販売業者及び製造業者の名称等】

**製造販売業者

名称: 三興化学工業株式会社
 住所: 広島県大竹市新町 2 丁目 11 番 4 号
 連絡先: TEL (0827)-52-3111 FAX (0827)-53-7622

**製造業者

名称: 三興化学工業株式会社 美和工場