

材質：熱可塑性エラストマー  
(シリコンゲル)


CRYSTAL GEL

Webでさらに詳しく



- 本製品はマスクではありません。
- 本来の使用法以外で使用しないでください。
- 交換の目安は、使用条件によって異なりますが、1日3時間程度使用して2〜3週間を目途に交換してください。
- 顔の大きさや目の形に合わせ、きつく感じたり、きつくないように調整してください。
- 無理に引き張ると破損の原因になります。
- 肌に赤み、腫れ、かぶれ等の異常がある場合、または同様の症状があらわれれば使用を中止してください。
- 経路時間の使用はお控えください。
- 無多量の場所や、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
- 材質の特性上、変色する場合がありますが、品質上特に問題ございません。
- 乳幼児や呼吸器に異常がある方、または自らの意思により本品を着脱することが出来ない方は使用しないでください。
- 火気とのそばでの使用はお控えください。
- 破損の原因にのり、テープ、爪等の鋭利なものをつかずに取り扱いしてください。
- 紙または印刷物の上に置かないでください。紙のしみ・インク転写の原因になります。
- 製品の使用後は袋に入っているチャック袋に入れて保管してください。
- 以下の素材は劣化し切れる場合があります。使用しないでください。
- ①シリコンゲルがはみ出し、目や鼻に刺さる恐れがあります。シリコンゲル等の成分、又は油脂が配合された洗剤など、香水・プロペントリールやその他の成分

①で使用する上の注意

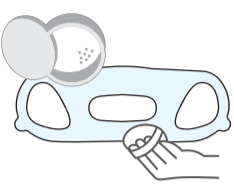

使用し続けると、肌に吸い付くような密着性が高まってきます。その場合、①中性洗剤を使って水またはぬるめのお湯で軽く洗い流します。②タオル等で水分をふき取ってください。③自然乾燥させた後、マスク用のUVケアをマスクやUV等で薄く伸ばして頂きますと当初のさらさらとした質感に戻ります。UVケアをかける前にアルコール消毒も可能です。※その他薬品は使用しないでください。

お手入れ方法

1 図のように製品の上を確認してください。

2 マスクの上端を持ち、マスクの上から顔に合わせ、耳にかける。

3 製品中央の口あなから上下位置をあわせる。

4 耳の持ち手が真上に来るように調整します。

5 はまらないうちに、はさみで調整し、はさみで押えるように装着してください。

使用方法

**製品の伸縮性！**  
耳たぶのように柔らかいゲル製(シリコンゲル)で肌あたりが優しくフィット

**顔の形に合わせてマスクをフィット！**  
ゆるやかな素材が肌にフィット

**肌あたりの良さ！**  
肌あたりの良さ！

**簡単マスクとして緊急時に！**  
ハチやカブトムシなどの口に当て、簡易マスクのフックとして活用頂けます。

マスクとは？

マスクの主な材質は、シリコンゲル製マスクカバナーにシリコンゲルを貼る、シリコンゲル製マスクカバナー

1枚入

製品サイズ H82×W226mm

1枚入

製品サイズ H82×W226mm

# マスクピタ

- MAS PITA -

気になるマスクのスキマを抑える

隙間からの微粒子侵入を抑える！

日本製 特許出願済 保管用袋 1枚入

※本製品はマスクではありません。

4 589720790393

PKG-02501

株式会社タナグ  
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4-24  
https://www.k-tanag.co.jp  
お客様相談室：0120-638-122  
(平日9:00～17:00 土日祝祭日)