


⑥前輪・後輪/2Wayキャスター



- フロントキャスターは、キャスターロックレバーの操作で360度回転式と固定式の2通りの使い方ができます。
- 後脚キャスターは、ロックピンを操作することでプッシュダウンとノンプッシュダウンが選べます。


⑦立ち上がる時は

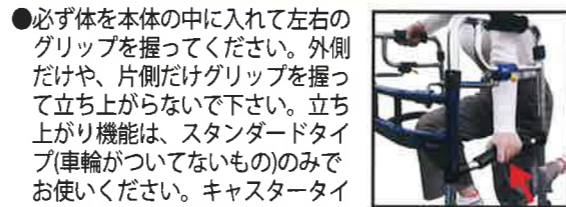

- 必ず体を本体の中に入れて左右のグリップを握ってください。外側だけや、片側だけグリップを握って立ち上がらないで下さい。立ち上がり機能は、スタンダードタイプ(車輪がついていないもの)のみでお使いください。キャスタータイプでは、立ち上がり用に使わないでください。転倒の恐れがあります。

⑧小さくたためます

※折りたたみは幅調節の伸縮ピンを3又は4段目に合わせて行ってください。

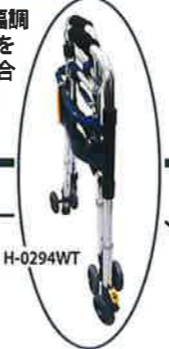

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。



- 雨ざらしにしないでください。金属部が錆びて故障の原因になります。
- 幼児や小さなお子さまの手の届くところに置かないでください。思わぬけがの恐れがあります。
- 火の近く、および夏期の車内など、高温になる場所には保管しないでください。故障や変形の原因になります。
- 荷物を重ねたり圧力が加わる状態で保管しないでください。故障や変形の原因になります。

交換部品(全機種対応) ※HTタイプは①②③の長脚です。



付属部品(別売品)

畳・フローリング等を傷つけない!

畳・フローリング・絨毯等に傷つきにくい保護パーツをご用意いたしました。
(※他社の製品には取付ができません)



製品の保証、修理について

消費者の皆様が保証期間内において、取扱説明書にしたがい正常に使用していたとき、製品の欠陥により万一事故が発生した場合修理または交換させていただきます。(レンタルで貸与された方には適用しません)

- この製品の保証期間はご購入日より一年間です。
- 正常な使用で事故が発生した場合、発生した日から30日以内にお買い上げ店もしくは当社まで届けてください。

《保証期間内でも次の場合は有償修理となります》


- 誤った使用による故障や破損。
- お客様が修理、改造された場合に生じた故障や破損。
- 購入後お客様の不注意による変形や損傷。
- 天災・公害による故障や損傷。
- 消耗品(グリップ・脚キャップ・ネジ等)の交換。
- レンタル・病院・その他不特定多数が使用し生じた故障や損傷。
- ご購入時期、保証書がない場合。
- 当社以外の付属品を装着し生じた故障や損傷。

《修理・その他》

- 保証期限が過ぎていても、有償修理いたします。
- 修理部品の保有期間は、3年です。



スライドフィット SLIDE FIT

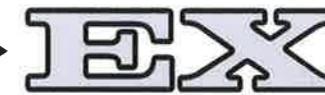

HT-0288・0293ST・0293CT・0294WT
H-0288・0293ST・0293CT・0294WT
M-0288・0293ST・0293CT・0294WT

固定式伸縮歩行器
取扱説明書
(全機種・共通説明書)

この度は、弊社の製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

尚、この取扱説明書は大切に保管してください。



もくじ

- 安全上のご注意・お手入れ方法・点検について…1~2
- 各部のなまえ・組立て方…………… 3~4
- 折りたたみ方・グリップ交換
- 保管のしかた・交換部品・付属部品…………… 4
- 製品の保証、修理について・仕様書

警告 ご使用前に

- この製品は歩行を補助する製品です。両手で体を支えることのできない方はご使用できません。
- ご使用される方の状態により、医師やケアマネージャー等の専門家にご相談ください。
- ご使用される方の体格にあったサイズで、ご使用してください。
- ご使用前に取扱説明書をよく読み、ご理解された後ご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

●製品改良等のため予告なしに製品仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。