

5 本体(イヤープッド除く)のお手入れについて

- 汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。



- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。



6 故障かなと思ったら

修理を依頼する前に下記の内容をご確認ください。

故障状況	原因および解決方法
音が出ない	●電源が入っていない ⇒ 電源スイッチをONにしてください。
	●電池が消耗している ⇒ 充電してください。
	●音量が最小になっている ⇒ 音量を調整してください。
充電されない	●本体が充電台に正しくセットされていない ⇒ 充電台の差込口に奥まで差し込んでください。
	●電源が入っている ⇒ 電源スイッチをOFFにしてください。

7 仕様

電源	充電台：DC5V 本体：ニッケル水素充電電池 1.2V 40mAh
連続使用時間	約15時間 ※満充電時
ボリューム	音量調整3段階
入力端子	microUSB端子
本体外形寸法(約)	W9×H43×D39(mm)
本体質量	約6g(イヤープッド除く)
付属品	microUSBケーブル(約60cm)、USB電源アダプター×1個、充電台×1台、イヤープッド(S・M・L)×各1個、保護パッド×2個、収納ケース×1個、掃除棒×1個、掃除ブラシ×1個

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


ELPA

AS-M001

充電式 耳掛集音器

EARLIS

Charge

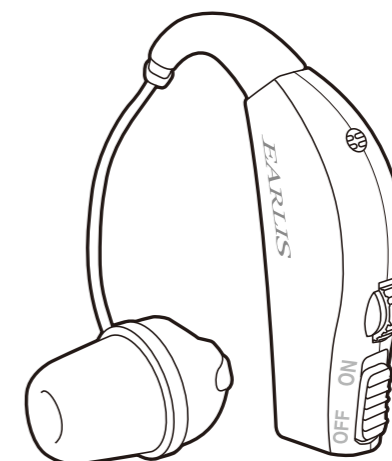

取扱説明書

保証書付

本品は医療機器ではありません

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

1 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

	警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
	注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告	
	禁止 ●本体や充電台内部に水や異物を入れない。【火災・感電・故障の原因】 ●幼児やペットなどに誤って触らせない。【ケガの原因】 ●USBケーブルを器具本体に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●USBケーブルの上に物を載せたり、ステッplerを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●USBケーブルが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用すると火災の原因となります。
	必ず守る ●USB電源アダプターを使用する場合は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
	電源プラグを抜く ●異常を感じたときは、速やかにコンセントからUSB電源アダプターを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですので、販売店もしくは当社にご相談ください。
	水ぬれ禁止 ●本体や充電台に水をかけたり濡らしたりしない。【火災・感電・故障の原因】 ●USB電源アダプターの抜き差しは、濡れた手でやらないでください。【火災・感電・故障の原因】
	分解禁止 ●分解・改造はしないでください。また指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】

1 安全上のご注意 (つづき)

注意

- 禁止**
 - 音量を上げすぎない
本品は医療機器ではありません。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える恐れがあります。
 - 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
 - 本体に強い衝撃を与えないでください。
 - 本体をベンジンやシンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因になります。
- 必ず守る**
 - 肌に直接接触する部分に異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。
 - 充電電池の交換はできません

2 廃棄時のお願い


- 本品にはニッケル水素充電電池を使用しています。ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素充電電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

充電電池の取扱い・分解について


- 危険**
 - 本品専用の充電電池です。本品以外に使用しないでください。
 - 取り出した充電電池は充電しないでください。
 - 火の中に捨てたり加熱したりしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
 - 分解・修理・改造をしないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
 - 液漏れしたとき、液に触れないでください。目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
 - 直射日光のあたるところや暖房器具の側など高温になる場所で放置しないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
 - +、- 端子に金属などを接触させないでください。また、金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。【液漏れ・発熱・破裂・発火の原因】
- 警告**
 - 取り外したネジなどは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師に相談してください。

ニッケル水素充電電池の取り出し方 ※廃棄する時以外は、絶対に分解しないでください。


①プラスドライバーで本品背面のネジ(図の○部分)を外します。
※取り外したネジなどは、乳幼児の手の届く所に置かないでください。

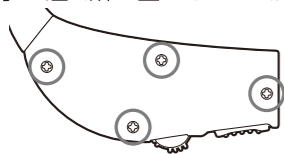



②本体を開けて充電電池を取り出し、充電電池に接続されている2本のリード線を各々1本ずつニッパーなどで切断し取り外します。

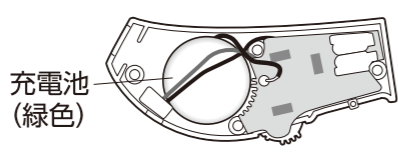

③取り外した充電電池は短絡防止のため、切断した2本のリード線先端を各々セロハンテープなどで覆います。

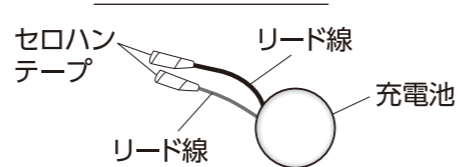

3 各部の名称と付属品

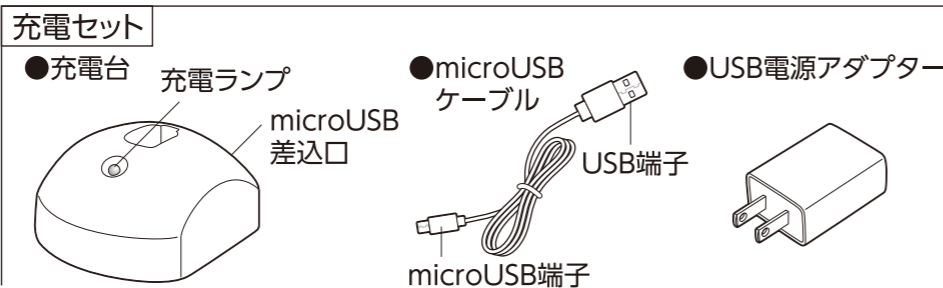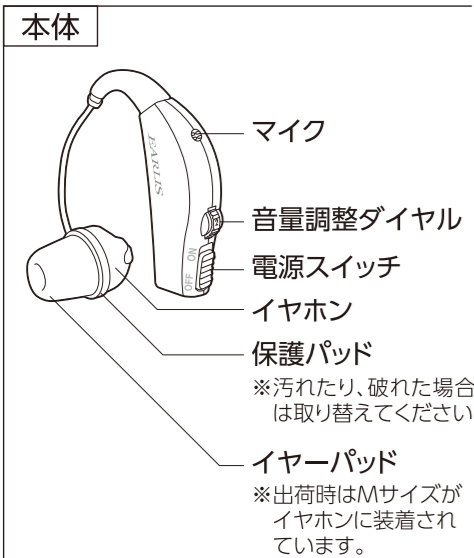


4 ご使用方法

充電する

電源をOFF状態にし、本体を充電台にセットします。付属のmicroUSBケーブルのmicroUSB端子を充電台のmicroUSB差込口に差込み、もう一方のUSB端子を付属のUSB電源アダプターやパソコン等のUSB機器に接続します。

※電源スイッチがONの時は充電できません。また充電ランプも点滅しません。

充電中は充電ランプが緑色で点滅
充電完了時は充電ランプが緑色で点灯します。

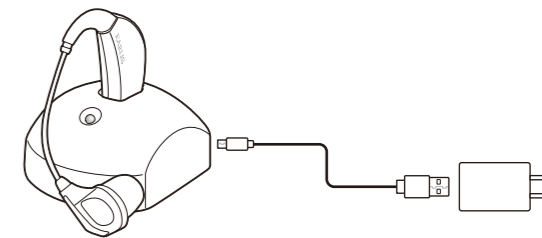


※約3時間で満充電となります。(USB電源アダプター使用時) 充電条件によって充電時間は変わります。

ご使用方法

1 イヤーパッドの調整


本品にはあらかじめ(M)サイズのイヤーパッドが装着されています。サイズが合わない場合は(S)または(L)サイズのイヤーパッドに交換してください。

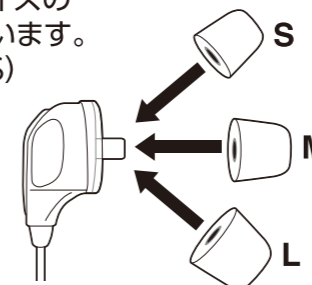

※イヤーパッドをはずす際は、イヤーパッド部分を引っ張ってください。イヤーパッドを装着する際は奥まで押し込んでください。

2 電源を入れる


電源スイッチをONにします。

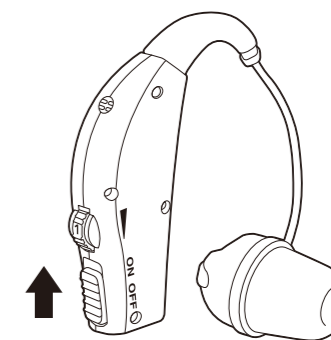

※装着前に音量を1にしてください。

3 耳に装着する

本品は左右どちらの耳にも対応しています。かける耳の側にイヤホンに向けてしっかり耳に入れてください。

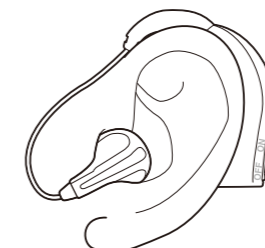

装着例: 左耳

※イヤーパッドのサイズが耳穴のサイズに合っていないと、しっかり耳に入らないとピーピー音(ハウリング)の原因になりますので、サイズの合ったイヤーパッドを選んでください。

4 音量を調整する


音量調整ダイヤルを回して音量を上げます。

※ご使用時、周囲に音源がない静かな環境で「サーツ」と言ったノイズが聞こえる場合があります。



5 電源を切る

電源スイッチをOFFにします。

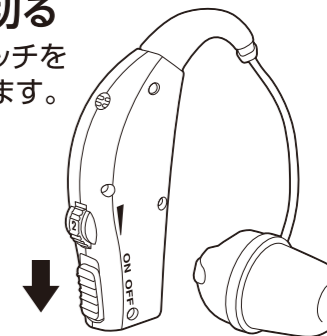

ご使用後

イヤーパッドやイヤホンについた耳あか・ほこりを付属の掃除棒・掃除ブラシで掃除してください。

