

類別: 機械器具 21 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 一般的名称: 単回使用心電用電極 JMDN コード 35035000

ちばら心電図電極


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 1回使い捨ての Disposable 品である。再使用はしない。
 [使用済品は十分な粘着性がなく測定不良の原因となる。]
- ・ しわの上、骨ばった部分、乳頭、傷・炎症部分には貼らない。
- ・ 使用方法を厳守する。
 [誤った使用法は、電極付近の皮膚の火傷を引き起こす可能性がある。]
- ・ 磁気共鳴画像診断装置 (MRI) では使用不可。
 [局部的に発熱し、火傷を生じる可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

【形状】

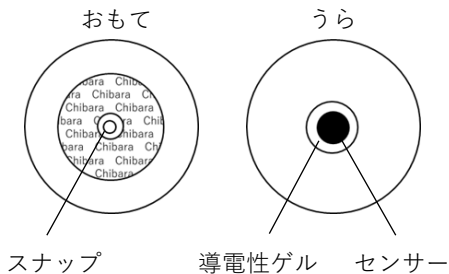

* モデルにより形状に違いがある。

【原理】

対表面に設置し、体表面の心電信号を心電波形処理装置に伝達する導体である。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計 (ECG) である。

【組成】

銀・塩化銀

【マーク】

本品には以下のようなマークが使用されている。マークが示す意味は下表の通りである。

マーク	意味	マーク	意味
	再使用不可		温度制限
	ラテックスを含まない		湿度制限
	注意、添付文書参考		未滅菌
	包装破損商品使用不可		

【使用目的、効能又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置 (心臓の電気活動をグラフで表示する) に伝達する導体をいう。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計 (ECG) である。

【品目仕様等】

未滅菌品
 AC インピーダンス 3kΩ 以下
 DC オフセット電圧 100mV 以下

【操作方法又は使用方法等】

1. 電極を装着する皮膚を清潔にする。
2. 電極にリード線をつなぐ。
3. 電極ゲル面のシールをはがす。
4. 電極ゲル面を皮膚に接着させる。
 ゲル面が皮膚にしっかりと接着しているか確認する。

【使用上の注意】

- ・ アレルギー体質、皮膚過敏症のある患者には注意して使用する。
- ・ 電極の粘着部分は清潔にし、ゴミが付着しないように、また濡れないように注意する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

高温になる場所や、直射日光はさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管する。

【保管期間】

包装に記載

【包装】

25 個/1 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所等】

製造販売業者 株式会社ちばら
 〒352-0011 埼玉県新座市野火止 8 丁目 8 番 19 号
 電話番号 048-299-9060

製造業者 Shenzhen Med-link Electronics Tech Co.,Ltd
 製造国名 中国

