


自宅でプロの傷あと*ケアを再現!

アトレスケアは伸ばして貼るだけ!
自分でいつでも手軽に傷あと*ケアを実現できます。

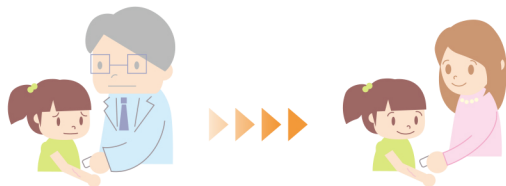


自分で積極的に傷あと*ケアする時代へ

テープを伸ばし、傷あとに当てて貼るだけ。自宅でプロの処置を再現できるように、テープの構造や手順にこだわりました。貼り替えも自分でできるので、長期間の傷あとケアもストレスなく、快適に続けられます。

特長1 傷あと*だけに『寄せる力』を加える


伸ばしたテープの縮む力を利用して、広がろうとする傷あと*にピンポイントに寄せる力を加えます。

中央だけが均一に縮むから、『寄せる力』が傷あと*だけに!

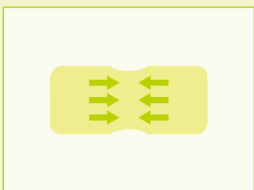

テープを左右にひっぱると、切り込み部分だけが凸凹状に均一に伸びます。そのまま傷あと*に貼ることで、傷あと*部分だけ、ピンポイントにテープが縮みます。


傷あと*と周辺部は、皮膚トラブルが起きにくい!

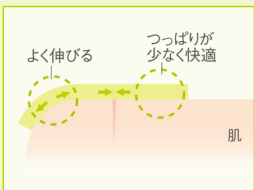

テープを貼っている傷あと*以外の部分や肌の凹凸・曲面部分にはやわらかくフィットし、つっぱりません。テープはとても肌になじみやすいので、皮膚トラブルが起きにくいです。

よくあるご質問

- Q** アトレスケアはどんなところに使うのですか?
A 縫合した傷の抜糸後すぐの傷あと*にご使用いただけます。その際、滲出液や血液が出ていれば、ご使用をお控えください。
- Q** どのくらいで交換したらいいですか?
A 2~3日に1回を目安に交換してください。はがれてきたら、貼りかえ時です。
- Q** 傷あと*がテープよりも大きい場合はどうしたら良いですか?
A 右図のようにテープは隙間を空けずに、少しだけ重なるようにして貼り、傷あと*の長さに合わせて枚数を使用してください。
- Q** テープを貼ったまま、お風呂に入ってもはがれませんか?
A アトレスケアは防水性があります。そのため貼ったままでの入浴やシャワー浴が可能です。
- Q** アトレスケアはどうやってはがせば良いですか?
A テープのふちを優しくこすり、めくる部分を作ります。傷あと*に刺激を与えないよう、やさしくゆつくりはがしてください。

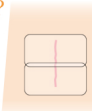

アトレスケア規格表

規格	サイズ	品名コード	入数
No.S10	25mm×50mm	YB-Q2550S1	10枚
No.S30	25mm×50mm	YB-Q2550S	30枚
No.M10	50mm×50mm	YB-Q5050S1	10枚
No.M30	50mm×50mm	YB-Q5050S	30枚

用途: 抜糸後の傷あと*の被覆保護

製品のご購入

楽天直販 アトレスケア 検索

テープが医療にできること、もっと。



www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社: 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

TEL: 06-6658-8217

FAX: 06-6658-8101

東京支店: 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL: 03-5634-3843

FAX: 03-5634-3845

札幌・仙台・名古屋・熊本

【使用上の注意】●アトレスケアは抜糸後の傷あと*に使用する未滅菌のテープです。直接創部に貼らないでください。●安全にお使い頂くため、アトレスケアの使用中は、必ず医師の指示に従ってください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水泡等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭き取り、清潔にしてください。水気があるとつきにくい場合があります。●油分の多い部位に貼るとはがれやすいため、顔や頭部に貼る場合は注意して使用してください。●テープ部のはがれ・浮き等がないよう貼付してください。また、観察時にそれらが発見された場合には、貼りかえてください。●関節等に使用する場合は、皮膚を伸ばした状態で使用してください。(医師から具体的な指示がある場合はその指示に従ってください)●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●アトレスケアは伸縮性のある商品ですが、引っ張りすぎるとテープが破れたり、ちぎれたりする場合がありますので注意して使用してください。●傷あと*の長さにあわせて枚数を使用してください。【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。【テープ交換の目安】2~3日に一回を目安に交換してください。はがれてきたら貼りかえ時です。【★注釈】傷あと*とは滲出液や血液などがなく、創面がふさがっている状態のことを指します。

ZZ016 19.11-10.000 第6版

skinix®

気になる傷あと、どうしてしていますか?
抜糸後からはじめる、
“本格” 傷あと*ケア。

傷あと*ケア専用テープ

アトレスケア

Sサイズ



Mサイズ



www.skinix.jp