

アトレスケア 貼り方ガイド

両手で貼る場合


skinix®

貼り方の手順


※傷跡に刺激を与えないように注意しながら使用してください。




裏の白い紙(大きい方)を途中まではがします。

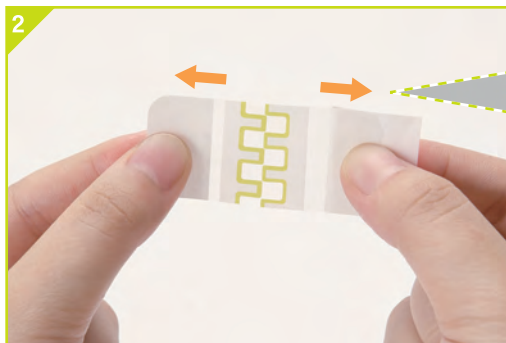

テープを表に返し、両手で左右に引っ張ります。

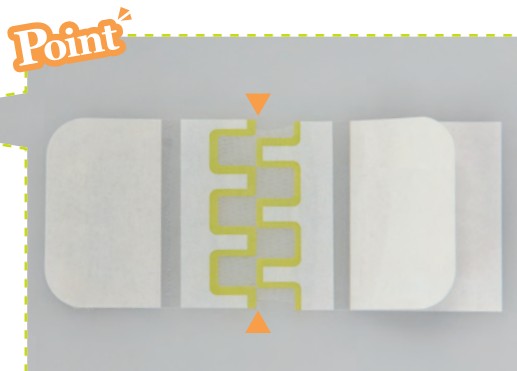


Point
左右の凸の切り口がきれいに揃うまで徐々に引っ張ります。

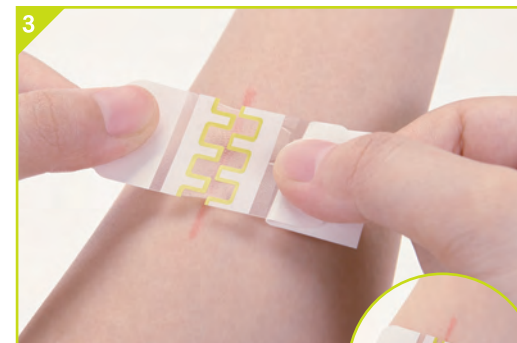


テープ中央に傷跡を合わせ、引っ張ったまましっかり貼ります。

貼って手を離すと、テープが縮みます。

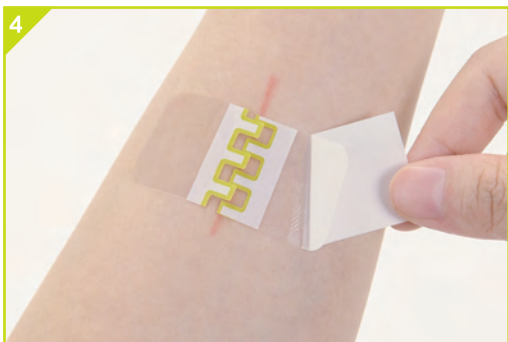

白い紙を全てはがし、上から押さえ、テープを端までしっかり貼ります。

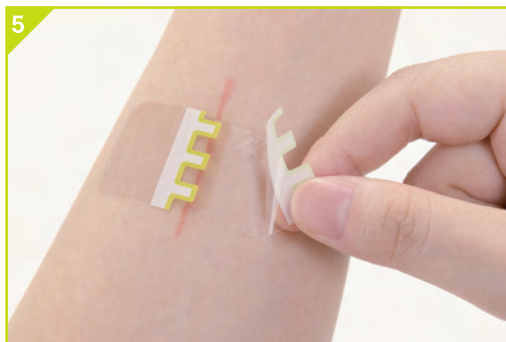

表のフィルムをはがします。



テープを肌になじませて、完成です。


はがし方



傷跡に刺激を与えないよう、やさしくゆっくりはがしてください。

■傷跡の長さに合わせた枚数を使用してください。

テープは隙間を空けず、少しだけ重なるようにして貼ってください。

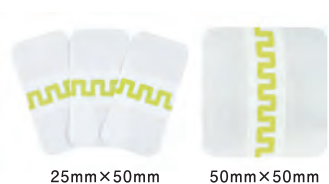

25mm×50mm

50mm×50mm



【傷跡 注釈★】傷跡とは浸出液や血液などがなく創面がふさがっている状態のことを指します。


アトレスケア 貼り方ガイド




貼り方の手順 ※傷跡に刺激を与えないように注意しながら使用してください。



裏の白い紙(小さい方)をはがします。

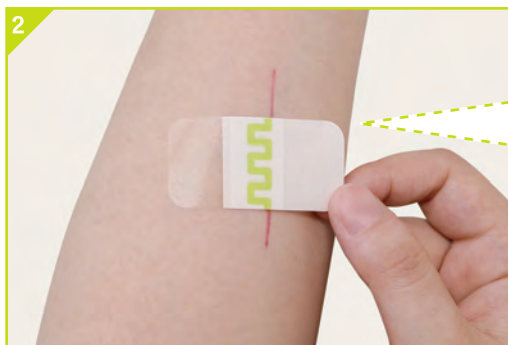

テープを傷跡に合わせ、①ではがした部分を貼ります。

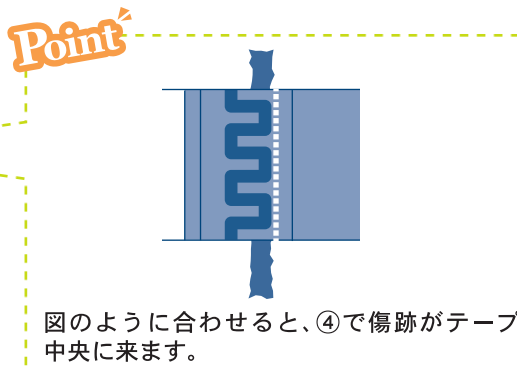


Point 図のように合わせると、④で傷跡がテープ中央に来ます。




裏の白い紙(大きい方)を途中まではがします。




②で貼ったところを押さえ、他の指で反対側の端をつまんで引っ張ったまま、しっかり貼ります。

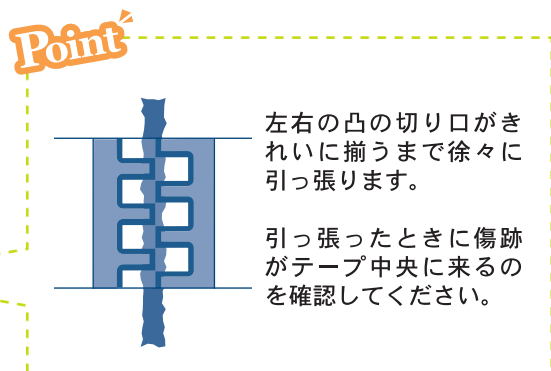

Point 左右の凸の切り口がきれいに揃うまで徐々に引っ張ります。
引っ張ったときに傷跡がテープ中央に来るのを確認してください。

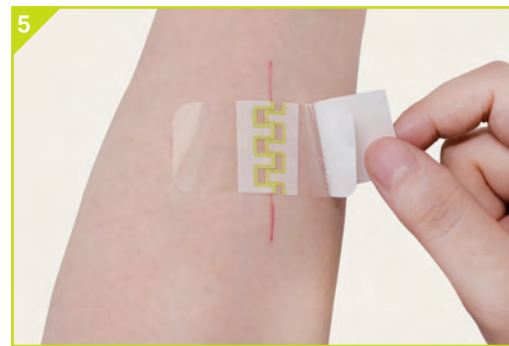

残りの白い紙を全てはがし、上から押さえ、テープを端までしっかり貼ります。

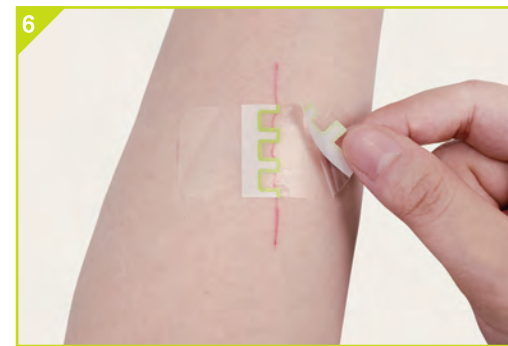

表のフィルムをはがし、テープを肌へなじませます。

テープが医療にできること、もっと。



www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ
大阪本社: 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101
東京支店: 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845
札幌・仙台・名古屋・熊本

