

製品名	卓上消毒器 JY-500M		
製造番号			
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	ご購入日より1年間		
お客様様	ご住所	〒 - TEL : - -	
	ご氏名		
販売店名			

2018.10.15(改訂)

#### 《無料修理規定》

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ハ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 7.この保証書は本体に対してのみ保証をお約束するものであり、使用上発生した事故等に対する責任は負いかねます。

#### ●定格・仕様

- (1)商品名：卓上消毒器 JY-500M
- (2)サイズ：高さ242×幅310×奥行き230mm(取手まで243)
- (3)定格電圧：100V(50Hz/60Hz)
- (4)殺菌管：8W殺菌管
- (5)消費電力：8W
- (6)金網棚×2段
- (6)重量：4.4Kg
- (7)材質：フレーム/スチール前枠、取手/樹脂成形、扉/ガラス
- (8)原産国:中国

2020.7

輸入販売元



有限会社 西村製作所

〒283-0823  
千葉県東金市山田242-1  
TEL : 0475-55-1370 FAX:0475-52-3391







# 卓上消毒器 JY-500M

## 取扱説明書・保証書



このたびは、卓上消毒器 JY-500Mをお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

※ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者やお客様への危険を未然に防止するためものです。  
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために	
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、ご使用者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。 その表示と意味は、次のようになっています。 ●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。 ●お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管して下さい。 ●全て安全に関わる内容ですから、必ずお守り下さい。	
	<b>危険</b> 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
	<b>警告</b> 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	 △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
	 ○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	 ●記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。 図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

- 電源スイッチを入れても殺菌灯が点灯しない。
- 電源スイッチを切っても殺菌灯が点灯したままになる。
- 扉を開けた時に殺菌灯が点灯したままになる。
- 扉を閉めた時に消毒灯が再点灯しない。
- 焦げ臭い臭いを感じる。
- その他普段のご使用で異常を感じた場合  
上記のような異常が発生した場合は直ちにご使用を停止して保証書を添えて販売店又は製造元に修理をご依頼下さい。\*絶対に自分で分解修理などはおこなわないで下さい。

保証及びアフターサービスについて

●アフターサービス

- ①ご使用中に異常が生じたときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店へ連絡してください。
- ②製品は、1年間無償保証いたしますので、保証期間内の修理の際は、必ず保証書をサービス員にご提示ください。但し、保証期間内であっても使用方法の過ちによる故障及び消耗品に関しては、有料とさせていただきますのでご了承ください。
- ③お買い上げ後、1年間を経過した故障については、有料とさせていただきます。
- ④サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、異常がある場合はご連絡ください。

ご使用にあたりましては、この取扱説明書をよくご覧の上、ご使用ください。  
 誤った使用方法によって起こる故障及び損傷は、当社では一切責任を負いかねます  
 のでご了承ください。

※尚、仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。

●保証

- ①保証書は必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容等をよくお読みいただき、大切に保管してください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間中は無料修理いたします。保証書にお買い上げ日、販売店等所定事項の記入がないと無効になりますので、もし記入が無い場合は、直ぐに販売店にお申し出ください。
- ②保証期間中に修理をお受けになる場合は、保証書を添えて販売店までお申し出ください  
 なお、保証期間内でも落下による故障など有料となる場合があります。  
 詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- ④日本国外での使用による故障及び損傷又は、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷は、保証及びアフターサービスの対象外とさせていただきますのでご了承ください。


アフターサービスのご用命はご購入販売店様へ

(4)電源スイッチ

- ①本体側面のメインスイッチを入れてください。
- ②メインスイッチがONになりますと本体正面のLEDランプが点灯しタイマー部分が点滅します。
- ③本体正面のSTARTスイッチを押しますと初期設定の15分の表示がされ殺菌灯が点灯し殺菌を開始します。
- ④ご使用に成らない時は必ずメインスイッチを切ってください。

(5)タイマーセットの方法

- ①STARTスイッチを3秒間押し続けるとTIME部のLEDランプが点滅します。
  - ②再度STARTスイッチを押すとTIME部の時間表示が変わりタイマー設定を変更してお好みの時間で殺菌が出来ます。
- ※タイマー時間の設定：(最小)5分→10→15→20→25→(最大)30分
- ③お好みの時間がTIMEに表示されたらそのままにして5秒後に点滅から点灯に変わりタイマーカウントが開始され殺菌を開始します。
  - ④タイマーカウントが終了すると殺菌灯が消灯して殺菌が完了します。
  - ⑤殺菌完了後は必ずメインスイッチを切ってください。

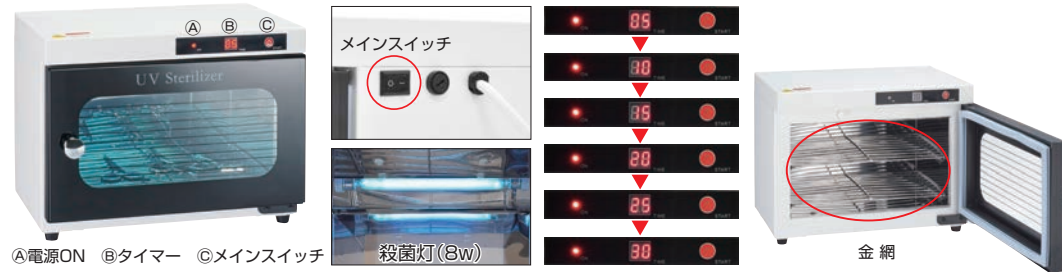

【消毒手順】

- 扉を開き消毒したい器具をセットして扉を閉めてからメインスイッチを入れタイマーをセットスタートさせると殺菌灯が点灯して殺菌を開始します。
- 殺菌を完了すると殺菌灯は消灯してタイマー表示が点滅し殺菌が完了します。
- ※殺菌する器具の殺菌時間は法令等で定められております通りに実行してください。  
([http://www.seiei.or.jp/book/shodoku\\_01.pdf](http://www.seiei.or.jp/book/shodoku_01.pdf))
- 殺菌が完了した場合やご使用にならない時は必ずメインスイッチを切ってください。

【使用上のご注意】

- 扉の開閉は丁寧におこなってください。  
乱暴な開閉は扉の破損や故障の原因になりますのでお止めください。  
又、扉に無理な荷重をかけますと転倒や破損の恐れがありますのでお止めください。
- 本体内部、金網棚、殺菌灯は常に清潔な状態を保ってください。  
※本体及び庫内が汚れた場合は、柔らかな布で水拭きしてください。  
汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。  
尚、シンナーなどの溶剤は消毒器本体を痛めるばかりか故障の原因になりますのでお止めください。

【警告】

- ▲本製品は殺菌のために紫外線殺菌灯を使用しています。紫外線は人体に影響を与えます。殺菌灯点灯時には殺菌灯を直接見ることは失明の恐れがあり大変危険ですので絶対にお止めください。やむを得ず消毒中に殺菌灯を見る場合は保護眼鏡等をご使用の上作業をおこなってください。又、誤って紫外線を見てしまい体に不具合を感じられましたら医師の診断をお受けください。

	光が出ている時は、絶対に目に光を当てない。 目を痛める恐れがあります。
--	--

●使用前、使用中の安全上のご注意

危険	
	AC100V以外の電源では使用しない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	濡れた手で機器やコードの取り扱いをしない。 感電の恐れがあります。
	機器を操作する時は、必ず周囲の安全を確認してから行う。 ケガ・破損の恐れがあります。
	光が出ている時は、目を痛める恐れがあります。 絶対に目に光を当てない。

警告	
	機器を勝手に修理・分解・改造しない。 ケガ・破損・火災の恐れがあります。
	機械に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。 火災・やけどの恐れがあります。
	機械や電源コードに亀裂などの損傷が生じている時は、使用しない。 火災・感電・事故・ケガの恐れがあります。
	アース線を接続する。 感電・故障の恐れがあります。
	本来の目的や用途以外には使用しない。 事故・故障の恐れがあります。
	機器の上に水などの入った容器を置かない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	機器に水を掛けたり、水につけたりしない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の恐れがあります。
	技術者以外の人は操作しない。年少者の操作させない。 事故・故障の恐れがあります。
	たこ足配線をしない。 加熱・火災の恐れがあります。
	電源プラグとコンセントを定期点検する。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。
	取扱説明書は、大切に保管する。

注意	
	電源コードの脱着はプラグ部分を持って確実に行なう。 火災・感電・ショートの恐れがあります。
	電源コードやアース線を傷つけたり加工や無理にねじ曲げたり重い物をのせない。 火災・感電の恐れがあります。
	機器を移動する時、お手入れる時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の恐れがあります。
	次のような場所では機器の使用、保管をしない。 ・浴槽などの湿気の多い場所 ・ホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・水分、油分などのかかる場所 ・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・屋外・年少者の手の届く場所 ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば) 火災・感電・事故・故障の恐れがあります。
	地震や雷の時は、直ちに使用を中止する。 誤作動による火災・ケガやけとの恐れがあります。

## 各部の名称




## 付属品



金網棚（上段用足無し）×1枚  
金網棚（下段用足有り）×1枚


## ご使用方法

(1) 本体付属のアース線を取り付けて下さい。

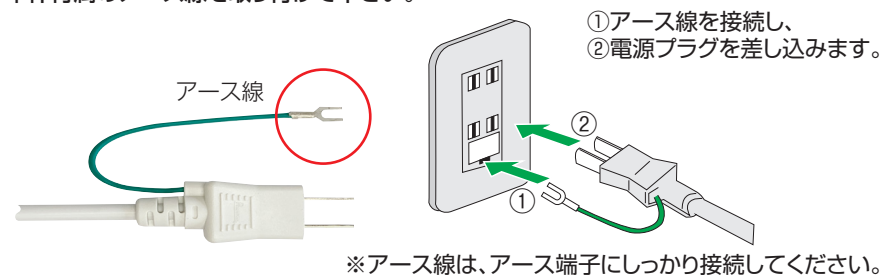

アース線を接続する。  
感電・故障の恐れがあります。

(2) 本体付属の金網棚を庫内に設置して下さい。

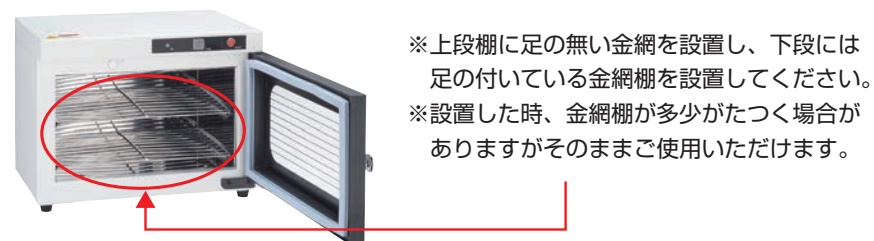

金網棚がしっかり固定されていることを確認して下さい。  
中に入れた器具（ハサミなど）が落ちる恐れがあります。

(3) 本体電源コードをコンセントに確実に差し込んで下さい。



※電源コードはコンセントに確実に差し込み緩みがないか確認して下さい。  
※アース線は、アース端子にしっかり接続してください。



AC100V以外の電源では使用しない。  
火災・感電・故障の恐れがあります。



電源コードの脱着はプラグ部分を持って確実にこなう。  
火災・感電・ショート of の恐れがあります。



長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・感電の恐れがあります。



電源プラグとコンセントを定期点検する。  
火災・感電・故障の恐れがあります。