

保証書

製品名	卓上消毒器 K-389		
製造番号			
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	ご購入日より1年間		
お客様様	ご住所	〒 - -	TEL: - -
	ご氏名		
販売店名			

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ハ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本体に対してのみ保証をお約束するものであり、使用上発生した事故等に対する責任は負いかねます。

●定格・仕様

- 商品名 : 卓上消毒器 K-389 (2灯式)
- サイズ : 高さ403×幅413×奥行254mm
- 定格電圧 : 100V (50Hz又は60Hz)
- 殺菌管 : 10W殺菌管×2本
- 消費電力 : 22W
- 重量 : 7.6Kg
- 材質 : フレーム … スチール 前枠、取手… 樹脂成形 扉 … ガラス
- 原産国 : 中国

●輸入販売元

有限会社西村製作所

〒283-0823

千葉県東金市山田242-1

TEL : 0475-55-1370 FAX : 0475-52-3391

消毒器 K-389 (2灯式)

取扱説明書・保証書



このたびは、消毒器K-389をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

※ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者やお客様への危険を未然に防止するためです。
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために		図記号の例	
この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、ご使用者やお客様への危険を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。	その表示と意味は、次のようになっています。		●記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)
●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。	●お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることのできる所に、必ず保管して下さい。		△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な注意の通告に使用)
●全て安全に関わる内容ですから、必ずお守り下さい。	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。		○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。	誤った取扱いをすると、人が傷を負う可能性、或いは物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。		●保証書は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

- 電源スイッチを入れても殺菌灯が点灯しない。
- 電源スイッチを切っても殺菌灯が点灯したままになる。
- 扉を開けた時に殺菌灯が点灯したままになる。
- 扉を閉めた時に消毒灯が再点灯しない。
- 焦げ臭い臭いを感じる。

○その他普段のご使用で異常を感じた場合

上記のような異常が発生した場合は直ちに使用を停止して保証書を添えて販売店又は製造元に修理をご依頼下さい。*絶対に自分で分解修理などはおこなわないで下さい。

保証及びパソコンについて

- パソコン
- ①ご使用中に異常が生じたときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店へ連絡してください。
- ②製品は、1年間無償保証いたしますので、保証期間内の修理の際は、必ず保証書をパソコン員にご提示ください。但し、保証期間内であっても使用方法の過ちによる故障及び消耗品に関しては、有料とさせていただきますのでご了承ください。
- ③お買い上げ後1年間を経過した故障については、有料とさせていただきます。
- ④パソコンをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、異常がある場合はご連絡ください。

ご使用にあたりましては、この取扱説明書をよくご覧の上、ご使用ください。
 誤った使用方法によって起こる故障及び損傷は、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

※尚、仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。

●保証

- ①保証書は必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容等をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間中は無料修理いたします。保証書にお買い上げ日、販売店等所定事項の記入がないと無効になりますので、もし記入が無い場合は、直ぐに販売店にお申し出ください。
- ②保証期間中に修理をお受けになる場合は、保証書を添えて販売店までお申し出ください。なお、保証期間内でも落下による故障など有料となる場合があります。
- ③保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- ④日本国外での使用による故障及び損傷又は、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷は、保証及びパソコンの対象外とさせていただきますのでご了承ください。

各部の名称




- タイマー連動電源スイッチ
- 裏面：電源コード
- 点灯、消灯確認窓
- 取手
- ガラス扉



- 扉開閉電源ON, OFFスイッチ
- 上10W殺菌灯、
上下殺菌灯用グローランプ
- 棚2段一体金網棚
- 下10W殺菌灯
- 扉内面反射板

ご使用方法

①本体付属のアース線を取り付けて下さい。(底面にアース取り付けマーク有り)

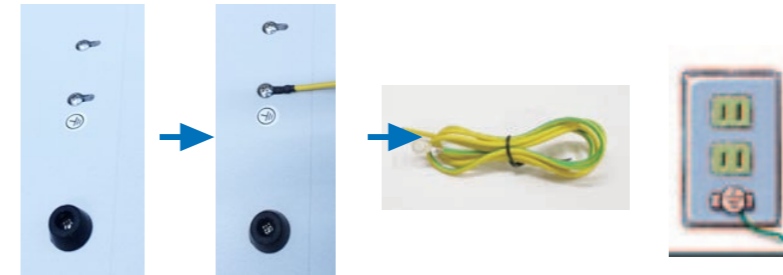

アース線をアース端子に接続して下さい。

本体底面のアースマークのあるネジを外し付属のアース線を差し込み再度ネジを固定して下さい。

	アース線を接続する。 感電・故障の恐れがあります。
--	--------------------------------------

②本体付属の金網は開封しますと針金で固定されています。

固定針金を外して扉連動棚受けの穴に金網の足を四ヶ所はめ込み固定して下さい。



金網は扉連動棚の穴にしっかりとハマっていることを確認して下さい。
*棚受けに設置した時、金網棚が多少がたつく場合がありますが
金網棚が落ちることはありませんのでそのままご使用可能です。

	棚板がしっかり固定されていることを確認して下さい。 中に入れた器具(ハサミなど)が落ちる恐れがあります。
--	---

③本体電源コードをコンセントに確実に差し込んで下さい。



電源コードはコンセントに確実に差し込み
緩みがないか確認して下さい。

付属品



棚2段一体金網棚 × 1個



アース線 × 1本

	AC100V以外の電源では使用しない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	電源コードの脱着はプラグ部分を持って確実にこなう。 火災・感電・ショート の恐れがあります。
	長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電 の恐れがあります。
	電源プラグとコンセントを定期点検する。 火災・感電・故障 の恐れがあります。


ご使用方法

④とびらを開けて消毒をしたい器具を金網棚にセットして下さい。



上下2段の金フミに消毒をしたい
道具をセットし扉を閉める。

⑤タイマー連動電源スイッチ (POWER) を回して電源を入れて下さい。

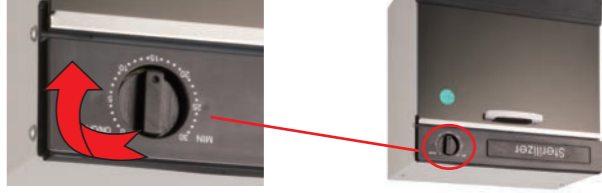

タイマーを右に回すと
電源がONになりランプが点灯します。
*タイマーは30分計です。
タイマー終了と共にベルが鳴り
電源がOFFになります。

[消毒手順]

○扉を開きます (手前に引く) と2段棚板敷金フミが連動して手前に引きでます。

扉の開閉には開閉補助にバネを使用していますので開け閉めは
ゆっくり丁寧に作業して下さい。

注意

○消毒したい器具をセットして扉を閉めたらタイマー連動ON、OFFスイッチを右に回します。

タイマーが動き出すとランプが点灯します。タイマーは30分計です。

*消毒する器具の消毒時間は法令等で定められております通りに実行して下さい。

http://www.seiei.or.jp/book/shodoku_01.pdf

○タイマーが切れますとベルでお知らせをします。また、同時に電源OFFになり消毒完了です。

[使用上の注意]

○扉の開閉は丁寧にしておこなって下さい。

乱暴な開閉は扉の破損や故障の原因になりますのでお止め下さい。

又、扉に無理な荷重をかけますと転倒や破損の恐れがありますのでお止め下さい。

○本体内部、金網棚、殺菌灯は常に清潔な状態を保って下さい。

*本体及び庫内が汚れた場合は、柔らかな布で水拭きして下さい。

汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用下さい。

尚、シンナーなどの溶剤は消毒器本体を痛めるばかりか故障の原因になりますのでお止め下さい。

警告

本製品は消毒のために紫外線殺菌灯を使用しています。紫外線は人体に影響を与えます。

殺菌灯点灯時には殺菌灯を直接見るとは失明の恐れがあり大変危険ですので絶対にお止め下さい。

やむを得ず点灯中に殺菌灯を見る場合は保護眼鏡等をご使用の上作業をおこなって下さい。

又、誤って紫外線を見てしまい体に不具合を感じられましたら医師の診断をお受け下さい。

光が出ている時は、絶対に目に光を当てない。

目を痛める恐れがあります。



安全上のご注意

●使用前、使用中の安全上のご注意

⊘	AC100V以外の電源では使用しない。 火災・感電・感電の恐れがあります。
⊘	濡れた手で機器やコードの取り扱いをしない。 感電の恐れがあります。
⊘	機器を勝手に修理・分解・改造しない。 ケガ・破損・火災の恐れがあります。
⊘	機械に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。 火災・やけどの恐れがあります。
⊘	機械や電源コードに亀裂などの損傷が生じている時は、使用しない。 火災・感電・ケガの恐れがあります。
⊘	アース線を接続する。 感電・故障の恐れがあります。
⊘	本来の目的や用途以外には使用しない。 事故・故障の恐れがあります。
⊘	機器の上に水など入った容器を置かない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	機器に水を掛けたり、水につけたりしない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の恐れがあります。
⊘	技術者以外の人は操作しない。年少者の操作させない。 事故・故障の恐れがあります。
⊘	たこ足配線をしていない。 加熱・火災の恐れがあります。
⊘	電源プラグとコンセントを定期点検する。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。 取扱説明書は、大切に保管する。

危険

⊘	AC100V以外の電源では使用しない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	濡れた手で機器やコードの取り扱いをしない。 感電の恐れがあります。
⊘	機器を勝手に修理・分解・改造しない。 ケガ・破損・火災の恐れがあります。
⊘	機械に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。 火災・やけどの恐れがあります。
⊘	機械や電源コードに亀裂などの損傷が生じている時は、使用しない。 火災・感電・ケガの恐れがあります。
⊘	アース線を接続する。 感電・故障の恐れがあります。
⊘	本来の目的や用途以外には使用しない。 事故・故障の恐れがあります。
⊘	機器の上に水など入った容器を置かない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	機器に水を掛けたり、水につけたりしない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の恐れがあります。
⊘	技術者以外の人は操作しない。年少者の操作させない。 事故・故障の恐れがあります。
⊘	たこ足配線をしていない。 加熱・火災の恐れがあります。
⊘	電源プラグとコンセントを定期点検する。 火災・感電・故障の恐れがあります。
⊘	ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。 取扱説明書は、大切に保管する。

注意

⊘	電源コードの脱着はプラグ部分を持って確実に行なう。 火災・感電・ショートの恐れがあります。
⊘	電源コードやアース線を傷つけたり加工や無理にねじ曲げたり重い物をのせない。 火災・感電の恐れがあります。
⊘	機器を移動する時、お手入れする時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の恐れがあります。
⊘	次のような場所では機器の使用、保管をしない。 ・浴槽などの温気の多い場所 ・ホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・水分、油分などのかかる場所 ・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・屋外 ・年少者の手の届く場所 ・温度変化の激しい場所 (エアコン、暖房器具のそば) 火災・感電・事故・故障の恐れがあります。
⊘	地震や雪の時は、直ちに使用を中止する。 誤作動による火災・ケガ・やけどの恐れがあります。