



ライトウェイト聴診器

フレアフォネットライトⅡ

No.125Ⅱ KENZMEDICO

「あ、軽い！
わっ、音が大きい！！」

軽量化を実現した
ハイスペック聴診器

KENZMEDICO



ケンツメディコ聴診器は日本製です。

多機能聴診器フleaーフォネット ライトウェイトバージョン

成人用と小児用の兼用型

①成人用のダイヤフラム面(サスペンデッド型)と②小児用のダイヤフラム面(サスペンデッド型)が標準仕様で備わっています。



①成人用面


②小児用面



聴診可能な面を見分けることができます。シャフトにくぼみがあると、その反対の面が使用可能です。

①成人用面は2WAY仕様

2種類のダイヤフラムが取付交換可能です。

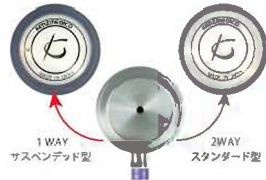

1WAY

サスペンデッド型

2WAY

スタンダード型

サスペンデッド型ダイヤフラム

チェストピースをあてるか加減によって低音(低音)の聴診にも高音(高音)の聴診にも切り替え可能です。※一体型のダイヤフラムを兼用

スタンダード型ダイヤフラム

高音(高音)の聴診に特化した構造(※ローカットハイパス構造)は、呼吸器領域の聴診に優位性を発揮します。

※ローカットハイパス構造 従来のダイヤフラムが低音(低音)を抑えることで、高音(高音)の微小な異常音をクリアに聴診できる。

サスペンデッド型ダイヤフラムの音域の切り替え



軽くあてると低音(低音)聴診



強くあてると高音(高音)聴診

②小児用面はベル面に交換可能



取外し

サスペンデッド型

ダイヤフラムSS小児用

取付け

スタンダードな


ダブル聴診器になります。

カバーリング


快適な装着感・音響特性にも配慮

可動式の耳管

耳管の角度調節が可能です。外耳道の角度に合わせることで、音の減衰を防ぎます。

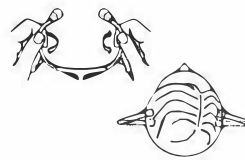

改良された耳管・チューブ

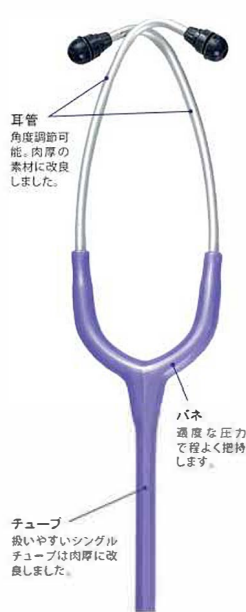

耳管

角度調節可能。肉厚の素材に改良しました。

バネ

適度な圧力で音よく保持します。

チューブ

扱いやすいシングルチューブは肉厚に改良しました。

選べるイヤピース

付属の2種×2サイズの中から、自分に合うイヤピースをご使用いただけます。

聴診器を装着したとき、イヤピースは耳の中では固定されます。これにより耳の中で余計な摩擦がおこらず、耳への負担が軽減することになります。



回転式ソフトイヤピース(小)



回転式ソフトイヤピース(大)

より柔らかいシーリングチップは、耳孔の形に馴染みやすく、遮音性が向上します。
※こちらは回転はしません。



シーリングチップ(小)



シーリングチップ(大)

チューブカラーに合わせたカラーのシーリングチップ(大)が付属します。

カラーバリエーション



販売名

フleaーフォネット ライト No.125 II

●全長

約720mm

●重量

約100g

●サスペンデッド型ダイヤフラムM成人用径

約Φ48mm

●サスペンデッド型ダイヤフラムSS小児用径

約Φ36mm

●製造販売届出番号

11B2X00021125201

●標準付属パーツ

リング、スタンダード型ダイヤフラム、カバーリング、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングチップ(大)1セット、シーリングチップ(小)1セット

●希望小売価格(税別)

¥13,000

●希望小売価格(税別)

¥13,000

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

別売品/補充品	品名	品番
ダイヤフラム	サスペンデッド型ダイヤフラム ブラックM 成人用	1137D011
	サスペンデッド型ダイヤフラム グレーM 成人用	1137D012
	サスペンデッド型ダイヤフラム ブラックSS 小児用	1137D028
	サスペンデッド型ダイヤフラム グレーSS 小児用	1137D029
	スタンダード型ダイヤフラム ブラックM 成人用	1188D041
リング	抗菌リング ブラック	1110F801
	抗菌リング ダークグレー	1110F802
	抗菌リング 黒	1110F803
ベルカバー	カバーリング181 ブラック	1181F801
	カバーリング181 ダークグレー	1181F802
イヤピース	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511
	ソフトイヤピースセット ダークグレー(大小)	1138F513

※その他のパーツについてはwebよりご確認ください。

■仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。■サイズには多少の増減がございます。■本体の保証は1年となっております。

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL (0495) 71-1001 FAX (0495) 72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>



ホームページ

2010JSR2.1/KS165