



製品紹介動画

# 使い捨て 長袖プラスチックガウン



## ガウンの着脱方法

### 装着手順（胴体）



① ミシン目を背面にして 広げる



② 頭からかぶる



③ 開口部から頭を通す



④ 必要なだけミシン目がはがれる

### 装着手順（袖口）



① 袖口（上部のみ開口）



② 袖口の開口部から手を通す



③ 必要なだけ袖口が広がる

### 取り外し手順



① 肩部を引っ張り背面のミシン目を下までやぶる



② 表面を内側にして取り外す



③ 丸めてそのまま廃棄

#### 取り扱い上の注意

- ⚠️《警告》●この袋は、幼児や子供にとって窒息など危険が伴うものです  
幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⚠️《注意》●突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますので、  
注意してください。
- 可燃物ですので火のそばに置かないでください。
- 材質：低密度ポリエチレン

寸法	袖丈	胴幅	胴丈前/後
S	400mm	800mm	1100/900mm
M	450mm	850mm	1100/900mm
L	500mm	900mm	1100/900mm

株式会社 **ミヤゲン**

〒914-0035 福井県敦賀市山泉7号15-3  
☎ 0770-21-0038 (代) FAX 0770-22-5180

**日本製**



4 981533 510029