

EP-501

管理医療機器 特定保守管理医療機器

EP-501での測定が診療報酬査定の条件の一つになりうる診療報酬区分の例

D208 心電図検査
携帯型発作時心電図
記憶伝達装置使用
心電図検査

150点

※診療報酬として認められるか否かは、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金の審査に依ります。



MEHERGEN GROUP



Parama-Tech



- R-Rトレンド表示
- 500件のデータ保存
- WiFi通信機能
- 簡易コメント機能
- MFERのデータ出力 (USB接続時)
- 30秒おきに最長5分までの任意の記録時間を選択可




WiFi通信機能により、インターネット上のクラウドサーバーに心電図を送信でき、ブラウザから心電図を閲覧することができます。この機能により、検査期間中は患者さんに来院していただくことなく、症状のスクリーニングが可能となります。また連携した循環器専門病院への相談もオンラインでおこなえるため、やり取りの負担を軽減し、スムーズな運用が可能です。

その他の特徴

- 高解像度カラー液晶搭載
- 電池交換不要な充電式
- 豊富な測定誘導(7種類) ※外部誘導コードでの測定時のみ対応

測定方法

◀ 胸にあててはかる



▼ 手のひらではかる



▲ 左足首ではかる
※波形が小さく、手のひらで測定できない方




▶ 専用の外部誘導コードをつけてはかる
EP-501は、外部誘導コードの接続が可能です。本体電極での測定に比べ、体動による筋電ノイズの影響が少なく、よりクリアな波形を見ることができます。
※外部誘導コードは別売品です。



閲覧方法

測定し保存したデータは、EP-501の液晶画面やPC画面上で確認できます。

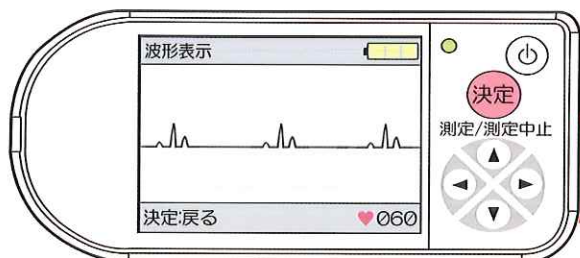

2.8インチのカラー液晶で測定及び記録した心電図を表示

USB接続




主な機能
保存・閲覧・印刷

EP-501を専用ケーブルでPCに接続することによって、記録データを専用ビューアに取り込むことができます。

医療に安心と効率をプラス

患者さんが測定した心電図の記録データをWiFi通信で専用のクラウドサーバーへ転送することにより、同じデータをかかりつけの医師や家族が閲覧することができます。院外の診療においても患者さんが医師や家族に見守られている安心感と、迅速なデータの共有による効率の良い医療を得ることができます。

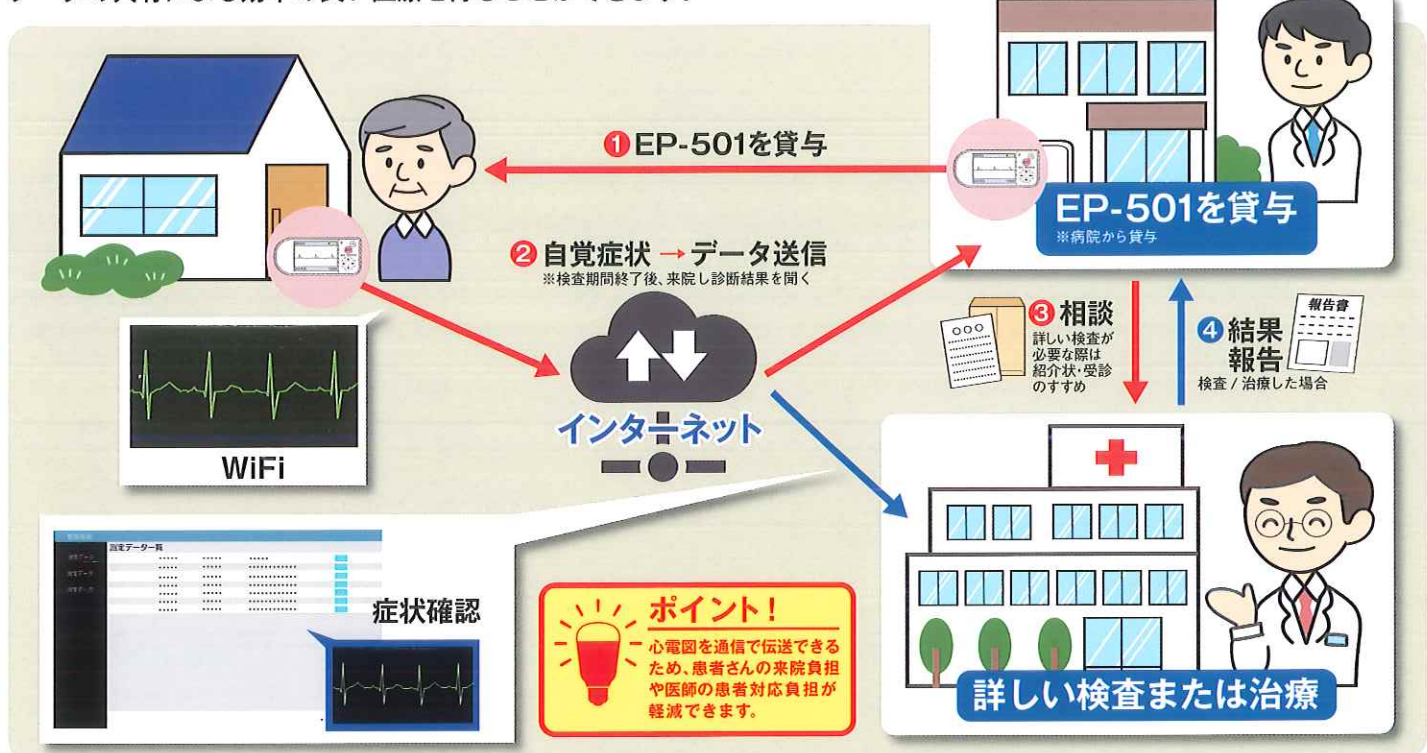

【仕様】

一般的名称	発作時心臓活動記録装置
電源	リチウムイオンポリマー充電電池
分解能	12bit
サンプリングタイム	4msec
誘導方式	双極誘導
表示	心電波形をグラフィック表示
メモリー	専用メディア
波形出力方式	USB出力、WiFi通信

電撃保護	クラス II (ACアダプター使用時) 内部電源機器 (バッテリー使用時)
使用環境温度/湿度	10~36℃/85%以下
保存環境温度/湿度	-5~50℃/85%以下
寸法	(W)120 × (H)58 × (D)15mm
重量	90g ± 10g
医療機器認証番号	229AGBZX00041000

【付属品】	専用ケーブル 専用メディア 取扱説明書 添付文書
【別売品】	外部誘導コード ディスク電極 専用ACアダプター



メハーゲングループ

製造販売元

株式会社 パラマ・テック
<http://www.parama-tech.com/>



ISO 13485
認証取得

本社(工場)

〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目7番5号
TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814

※製品(付属品)および別売品の仕様・デザインなどは改良のため、予告なく変更することがあります。

⚠️安全に関するご注意

・ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。・測定結果は診断ではありません。
・測定の結果は自己判断せずにお医者様に相談しましょう。・本製品の色調は印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命は

販売元

株式会社 エムアイディ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556

関東営業所	TEL(047)383-5525
東京営業所	TEL(03)5625-3566
名古屋営業所	TEL(052)735-7571
京都営業所	TEL(075)502-5231
阪神営業所	TEL(06)6427-1337
大阪営業所	TEL(06)6339-2371
神戸営業所	TEL(078)306-0611
姫路営業所	TEL(079)284-9548
和歌山営業所	TEL(073)441-5771
岡山営業所	TEL(086)805-8744
沖縄営業所	TEL(098)859-2549

株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023

福岡営業所	TEL(092)436-3022
北九州営業所	TEL(093)964-1522
久留米営業所	TEL(0942)45-8870
佐賀営業所	TEL(0952)36-9614
大分営業所	TEL(097)573-9030
長崎営業所	TEL(095)847-7184
熊本営業所	TEL(096)312-5660
宮崎営業所	TEL(0985)63-3312
鹿児島営業所	TEL(099)230-0990
佐世保出張所	TEL(0956)42-1031