

環境清拭用シート

医療施設用 **セイフキープ**

ペーパータイプ

ワイド

フタ付きピロー

病院施設用



● 塩化ベンザルコニウム
(第4級アンモニウム塩) 配合

開け閉めが簡単なプラスチックフタを採用！
広範囲をサッと洗浄。除菌*1・ウイルス除去*2も！

*1 すべての菌を除菌するわけではありません。*2 すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

1 優れた除菌*1・
ウイルス除去*2
効果を発揮する

2 洗浄成分 (AG*3、AAO*4)
の働きと特殊なシート柄で、
皮脂汚れから体液・血液汚れ
まで、しっかり落とせる

*3 アルキルグリコシド、*4 アルキルアミンオキシド配合

3 素材にやさしい
洗浄成分配合で、
基材損傷性が低い

4 大判厚手で丈夫な
シートと、アルコールを
含まない含浸液なので、
広範囲の清拭ができる

(シートサイズ：215mm×200mm)

ふき取り性に優れたストライプ柄シートで、
気になる汚れをしっかりと落とすことができます！


試験法概略

0.1g血液汚れ(羊血液：プロタミン=1000:15)をSUS板に15mm×50mmの大きさに塗布して乾燥後、50mm×50mm角にカットして4つ折りにした清拭シートで400gの荷重をかけながら同じ方向に10回清拭を行った。

■一般的な柄



■特殊なストライプ柄

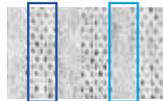

メッシュで汚れをかき取る
プレーン部で汚れを吸着

折り返して使える大判厚手で丈夫なシートで
圧をかけて拭きやすく、1枚で広範囲を
拭くことができます！

1面あたりの清拭可能面積がセイフキープ(ボトルタイプ)の約1.7倍！

※実使用時の折り方を想定し、セイフキープワイドフタ付きピロー⇒4つ折り(約107.5cm²/1面)とセイフキープ(ボトルタイプ)⇒2つ折り(140cm²/1面)した状態で、1面あたりの清拭可能面積を比較


試験法概略

27mm×27mmのSUSのバットを1枚のシートで清拭し、バットに移行した液量を測定した。シートは折り返さずに同様の操作を繰り返し、液移行量が0.05gとなるまでに拭けたバットの枚数からシート1面あたりの清拭可能面積を求めた。



※4つ折り使用イメージ

1面あたりの清拭可能面積

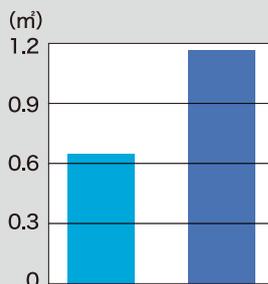

セイフキープ (ボトルタイプ) ※2つ折り
セイフキープワイド フタ付きピロー ※4つ折り

使用後の評価

■ よい ■ ややよい



病院 N=32、クリニックN=9、介護施設N=11、調剤薬局N=10、2週間 2020年8月(花王調べ)

- シートの厚みがちょうどよく、一枚でベッド柵を拭くことができた
- 厚さと大きさがあるシートで、安心感をもって使用できた
- 汚れもしっかり落ち、シートが乾燥することもなかった
- 気になる汚れがしっかりと落ちて、気持ちスッキリした
- フタが自然に開けやすかった

目付・梱内容

品名	目付	梱内容	サイズ(mm)／重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
セイフキープワイド フタ付きピロー [シートサイズ：215mm×200mm]	80枚入	18袋	袋 65×250×110 430g	4 901301391841
			梱 234×408×341 8.5kg	

※商品写真以外の画像は、他の印刷物やWEBサイト等での無断使用を禁じます。

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。

※セイフキープは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

それ以上を生み出す、清潔提案を。


花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3

☎ 03(5630)9283

ブランドサイトはこちら
<https://pro.kao.com/jp/medical-hygiene/product/kankyou-seisou/>

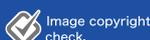

2020年12月