


PPフェイスシールド使用説明書


【シールドとヘアバンドの組立方法】

1

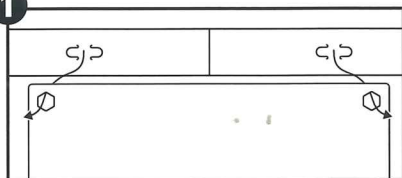


シールドの上部左右に付いている六角の穴にヘアバンドの差し込みを引っ掛けます。

Point!

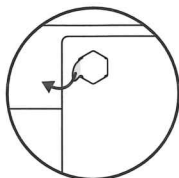


最初に左側の差し込みを入れます。

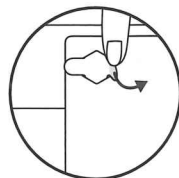

右側の差し込みを少し持ち上げるようにして穴に引っ掛けます。


2

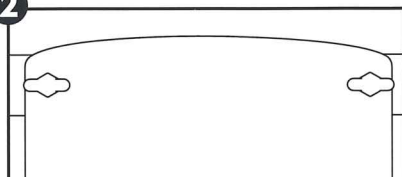

もう片方も同じように組立て、完成です。図のようになります。

【ヘアバンドのサイズ調節】


1

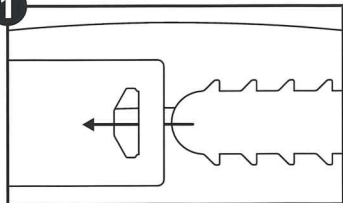

左側の差し込み穴に、右側のパーツを入れます。

※穴に入れたあとに右側のパーツを軽く引っ張ると入りやすくなります。

2

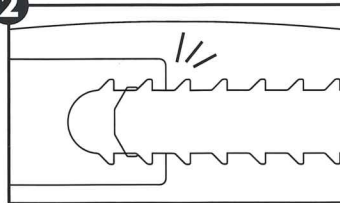

頭のサイズに合わせてお好みのサイズに調節してください。

⚠ 注意事項

- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・角などで手を切らないようにご注意ください。
- ・簡易的な組立式の為、強く引っ張ったりしますと結合部分が破損する場合がありますのでご注意ください。

●素材:高透明PP0.3mm ●50セット入り

日本製