

# 製品仕様

 NIOSH (米国) N95 合格品 認定番号: TC-84A-9246	品番	カップ型 (排気弁付) 717690
	品名	YQD8008V N95 MASK
	製品重量	約 17.5g
	入数	270 枚 (15 枚入 × 18 箱) / ケース
	箱サイズ (重量)	約縦 (奥行き) 137mm × 横 (幅) 250mm × 高さ 165mm (約 340g)
	ケースサイズ (重量)	約縦 (奥行き) 440mm × 横 (幅) 515mm × 高さ 520mm (約 7.52kg)

 NIOSH (米国) N95 合格品 認定番号: TC-84A-9245	品番	カップ型 (排気弁なし) 717691
	品名	YQD8008 N95 MASK
	製品重量	約 13.5g
	入数	270 枚 (15 枚入 × 18 箱) / ケース
	箱サイズ (重量)	約縦 (奥行き) 137mm × 横 (幅) 250mm × 高さ 165mm (約 281g)
	ケースサイズ (重量)	約縦 (奥行き) 440mm × 横 (幅) 515mm × 高さ 520mm (約 6.15kg)

 NIOSH (米国) N95 合格品 認定番号: TC-84A-9276	品番	折り畳み式 717692
	品名	YQD95 N95 折り畳み式
	製品重量	約 5.9g
	入数	600 枚 (25 枚入 × 24 箱) / ケース * 1 枚個包装
	箱サイズ (重量)	約縦 (奥行き) 175mm × 横 (幅) 190mm × 高さ 130mm (約 266g)
	ケースサイズ (重量)	約縦 (奥行き) 550mm × 横 (幅) 400mm × 高さ 550mm (約 7.2kg)

## 着用方法



① 指先でノーズピースをつまんで、マスクを手のひらで包むように持ってください。その時に、紐は手の下側に垂らしてください。



② ノーズクリップを上にしてマスクを顔に当ててください。



③ 上側の紐を頭頂部に、下側の紐を耳の下に来ようセットしてください。その際、紐がねじれないようにしてください。



④ 両手でノーズクリップが鼻にフィットして空気が漏れないように調整してください。片手だけでマスクを調整するとマスクの機能を十分に生かす事ができません。マスクの着用時ごとに、両手で調整してください。両手をマスクの上に当てて息を吐きフィットしているか確認してください。その際、マスクがずれないように気をつけてください。

### (注意)

鼻のあたりから空気が漏れている場合は、再度上記注意点に従って調整してください。マスクの側面から空気が漏れている場合は、紐を頭に沿って後方に回してください。正常にマスクが着用できない場合は、汚染区域に立ち入らず、監督者に相談してください。

## 本製品の正規品認定確認方法

日本国内でも認定を受けていない工場の製造品が、パッケージや仕様書を偽ったり、類似品又は同等品として「N95」と称して販売されております。当社では皆様に安心していただけるよう、「NIOSH」「FDA」のWEBサイトにてご確認いただけるようにしております。

### ・ CDC(NIOSH) サイト

[https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp\\_part/N95list1sect3.html](https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3.html)



- ① QRコードを読み込みます。
- ② TOP ページから下にスクロールすると弊社協力製造工場「Shanghai yunqing Industrial Co.,Ltd と認定登録品番号」が表示されます。

Shanghai Yunqing Industrial Co., Ltd. ☎ 400-178-1700	YQD8008
Shanghai Yunqing Industrial Co., Ltd. ☎ 400-178-1700	YQD8008V
Shanghai Yunqing Industrial Co., Ltd. ☎ 400-178-1700	YQD95

84A-9245	No	YQD8008 [PDF - 212 KB] ☎
84A-9246	Yes	YQD8008V [PDF - 244 KB] ☎
84A-9276	No	YQD95 [PDF - 342 KB] ☎



パッケージは予告なく変更になる場合がございます。

### ・ FDA サイト

[https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp\\_part/N95list1sect3.html](https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3.html)



- ① QRコードを読み込みます。TOP ページに飛びます。協力製造工場名「Shanghai yunqing」と入力し検索。
- ② 「Shanghai yunqing Industrial Co.,Ltd と認定登録品番号」が表示されます。

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION		
Establishment Registration & Device Listing		
1 result found for Establishment Registration or Business Trade Name : shanghai yunqing		
Establishment Name	Registration Number	
SHANGHAI YUNQING INDUSTRIAL CO., LTD	3017030381	
Respirator, Surgical - YQD8008, YQD8008V, YQD95		



パッケージは予告なく変更になる場合がございます。

【輸入発売元】

販売店

**S.W.S 株式会社 湘南ワイパーサプライ**

【本社】〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286番地1  
TEL:045-803-6155 FAX:045-804-6795

【山梨支店】〒400-0043 山梨県甲府市国母4丁目15-15  
TEL:055-288-1778 FAX:055-288-1769  
<http://www.shonan-w-s.co.jp>

# N95 MASK

NIOSH/FDA 認証

その N95 マスクは如何ほど？  
真の実力はここにある。

NIOSH(アメリカ連邦機関国立労働安全衛生研究所 国際安全衛生センター)  
FDA(アメリカ保健福祉省アメリカ食品医薬品局)  
N95 マスクを安心してお使いいただけるよう、両組織より正規認証を受けております。またこの認証はアメリカや日本の医療機関などでは採用基準の一つでもあります。

S.W.S SAFETY PRODUCTS

## SERIES

品名：YQD8008V N95 MASK  
品番：717690



カップ型 (排気弁付)  
NIOSH (米国) N95 合格品  
認定番号：TC-84A-9246

品名：YQD8008 N95 MASK  
品番：717691



カップ型 (排気弁なし)  
NIOSH (米国) N95 合格品  
認定番号：TC-84A-9245

品名：YQD95 N95 折り畳み式  
品番：717692



折り畳み式  
NIOSH (米国) N95 合格品  
認定番号：TC-84A-9276

## POINT①

### 伸縮性平ゴム




伸縮性に優れたオーバーヘッドタイプによるマスクと顔の密着性がアップ

### ノーズクリップ

鼻の形に合わせて調整できしっかり密着。クリップが外側にあることで、長時間の着用でも快適

### ノーズパッド

防曇機能タイプのスポンジを内側に採用することで、防護ゴーグルなどが曇りづらく、また長時間の着用でも快適

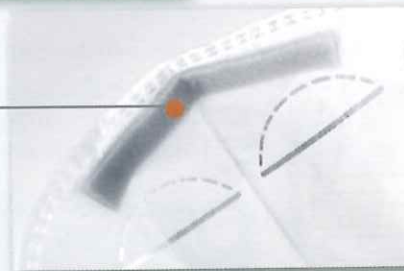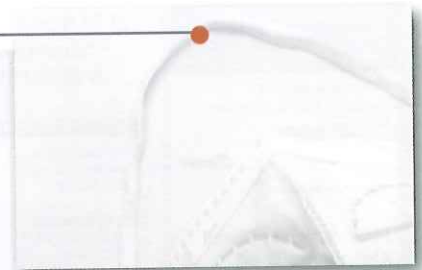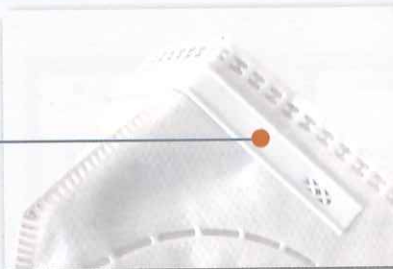

\*画像はYQD95 N95 折り畳み式になります。

## POINT②(カップ型のみ)



リボン形状

立体及び強度維持を目的にリボン形状による凹凸を採用することで、ノーワイヤーを実現



バンド調整機能

2ヘッドバンド内で調整が可能

## POINT③(折り畳みのみ)



立体構造 & 非縫製式