



多機能情報端末清潔隔離デバイス


i-MedicoatTM

アイ-メディコートTM


～製品概要～

※YouTubeサイト内「i-Medicoat」検索で動画をご覧頂けます。

使用方法（二人一組で挿入してください）

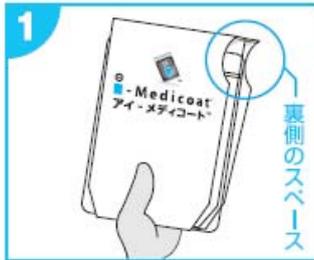


1 外紙と中袋の底を合わせ、手のひらに載せしっかりと持ちます。

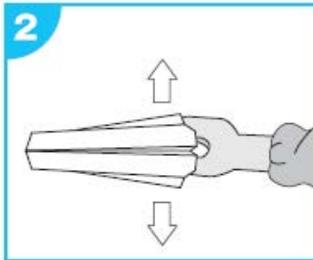


2 もう一方の手で、外紙の裏側のスペースへ手を差し込み、挿入口を軽く広げます。




3 挿入口からタブレット端末を真っ直ぐに挿入します。

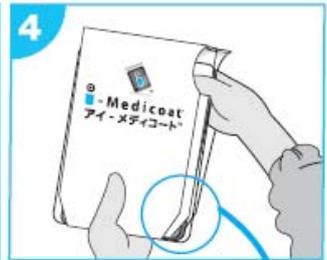

4 タブレット端末がしっかりと中袋の底まで挿入されていることを確認してください。

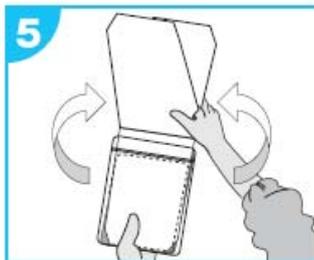

5 外紙を上方に跳ね上げます。

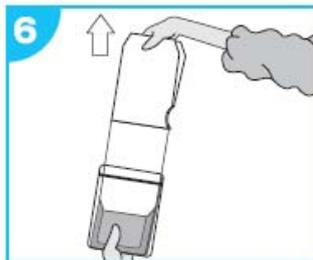


6 外紙2枚を一緒に持ち、ゆっくり真上に引き抜きます。



7 中袋のチャックを両手でしっかりと閉め、中袋を密閉してください。

拡大図

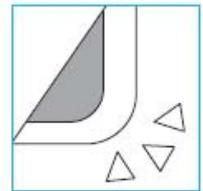

用途

タブレット端末の滅菌収納

特徴

- 光反射防止 ●防水 ●滅菌 ●防塵 ●防曇

品質表示

- 寸法／320mm×220mm（外紙含む）
280mm×220mm（中袋単体）
- 材質／外紙…紙 中袋…PET、PE
- 品番／T-001-280-220



使用上の注意

- 本製品はタブレット端末の滅菌収納袋です。他の用途にはご使用にならないでください。
- 本製品はタブレット端末本体を完全に保護するものではありません。液晶画面および機器本体の破損や損傷等には一切責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本製品は単回使用です。一度使用された物は滅菌状態ではなくなります。
- 中に封入するタブレット端末は保護カバー等を外し、端末単体で挿入してください。
※保護カバー等による破損の可能性があります。
- タブレット端末を中袋の口に対し、必ず垂直に挿入してください。
※タブレット端末を斜めに挿入すると、外紙の縁に当たり、外紙が破れる可能性があります。
- タブレット端末の落下を防止するために、中袋の下部をしっかりと持ちながら挿入してください。
- 中袋のチャックはしっかりと閉めてください。
※防水、滅菌、防塵、防曇性能が発揮できません。
※挿入口からタブレット端末が飛び出す可能性があります。

2011.11

対応機種

3.5インチから9.7インチまでのタブレット端末
（対応例）iPad2/iPad/iPhoneシリーズ/GARAPAGOS A01SH/SONY Tablet Sシリーズなど

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・商品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
※改良などのため、商品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

中島工業株式会社 MADE IN JAPAN

〒610-0101 京都府城陽市平川広田7 8 - 1

TEL 0774-54-1771 FAX 0774-53-0922

E-mail info@nakajima-ic.co.jp URL http://www.nakajima-ic.co.jp