
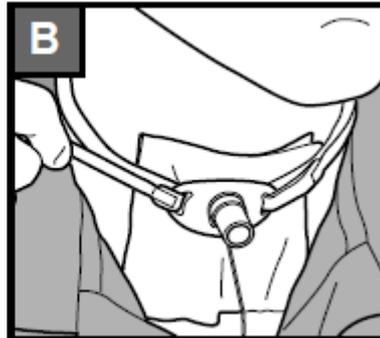





クリニートラキガード 取扱説明書

製品使用前に取り扱い方法・警告事項を良くお読み下さい


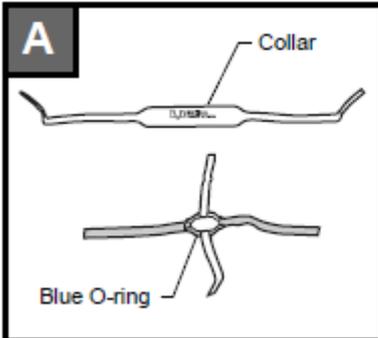


B) 気管切開チューブの両端にネックホルダーを通し、折り返してからマジックテープをしっかりと固定して下さい。

(注意) 装着後は常に固定が確実か再確認して下さい。

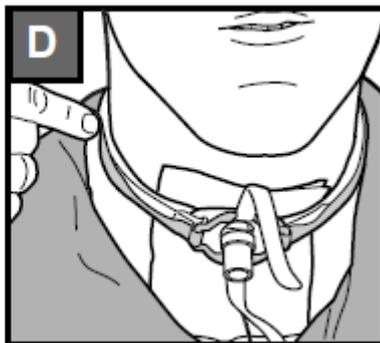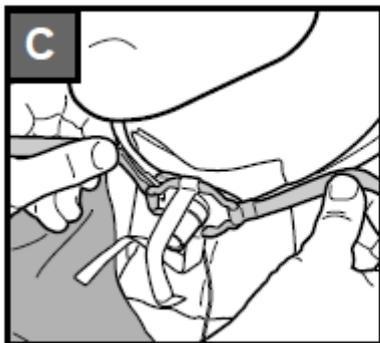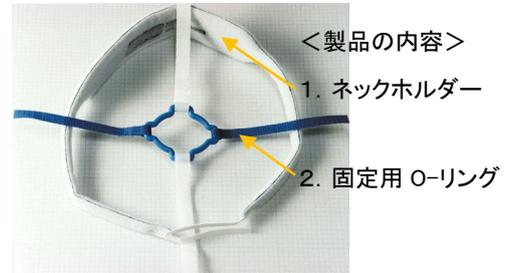

C, D) 気管切開チューブのコネクターの上に O-リングを置き、ブルーのマジックテープをネックホルダーの両サイド上にしっかりと固定して下さい。

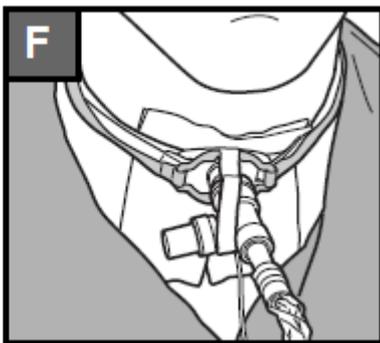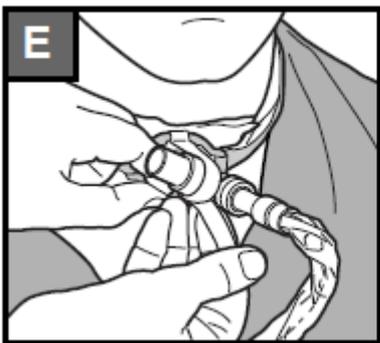

E, F) 気管切開チューブと回路が外れないように固定用 O-リングの白のマジックテープでしっかりと固定して下さい。

【保管方法】

室温で保管し高温・多湿な環境を避ける。

警告事項

- ◆ この製品は一人患者用です(再使用禁止)
- ◆ この製品は医療機器の接続補助を目的としたもので、接続の確実性を保証するものではありません。
- ◆ この製品は固定補助を目的としたものであり生命維持を目的とした製品ではありません。
- ◆ 使用前に併用する医療機器との接続、性能等に問題ないか確認してください。
- ◆ 使用前に製品の破損がないか必ず確認してください。
- ◆ 使用前に製品の期待される性能(マジックテープの接着具合等)を確認してください。
- ◆ 固定が不十分と思われる場合には使用を中止してください。
- ◆ 異常が早期に発見できるよう常に巡回・監視してください。
- ◆ 交換のタイミングは使用環境・状況により差があります。安全にご使用いただくために使用上のプロトコル(院内の使用手順・基準)を作成して下さい。