


⚠️ ご使用上の注意


- 飛沫感染予防以外の目的では使用しないでください。
- 空気中の微細な飛沫、粉塵などの吸込み防止にはマスクを使用してください。
- 本製品は非滅菌品です。
- シールド及びフレームのエッジで手を切らないよう注意して取り扱いください。
- 強い力を加えたり、落下させるとシールド及びフレームが割れる恐れがあります。
- 割れた製品、切れ目の入った製品は使用しないでください。
- 極端に高温、低温になる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 高温多湿環境下に長期間保管すると品質劣化の可能性がございます。長期間保管した製品で、使用前または使用中に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 皮膚に異常がある方はご使用をお控えください。
- 本製品のご使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした時や気分が悪くなった時は使用を中止し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 装着後、一度外されたシールドは再利用せず、廃掃法及び地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
- 汚れた場合は新しいシールドに交換してご使用ください。
- コート剤の特性上、塗布面が白く見えることがあります。また、光の角度によって、反射する光に色が付いて見えることがあります。
- シールドは単回使用を想定しているため、水、アルコール、酸性の液体等で拭く、もしくは噴霧することは避けてください。
またシールド及びフレームを加熱しないでください。
※コート剤が脱落、もしくは変性することで皮膚、眼、気管に影響する可能性があります。
- フレームは繰り返し使用を想定しています。洗浄が必要な場合は中性洗剤、アルコールをご使用ください。
- 成形加工の特性上、フレームが黄味がかかったり、気泡が含まれることがあります。
- 付属のフレーム以外のフレームをご使用の場合、取り付け、可動に不具合が生じる場合があります。
- 改良等のため、製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

パーツ名称

フレーム

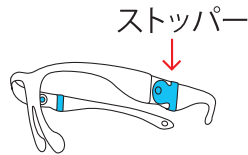

シールド

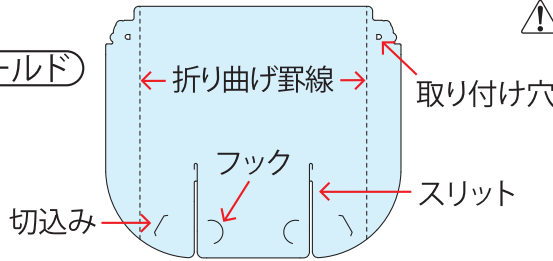

⚠️ 本製品は非滅菌品です

<材質>

フレーム


ポリカーボネート(PC)
熱可塑性エラストマー(TPR)

シールド


ポリエチレンテレフタレート(PET)

組立方法


①フレームの
ストッパーを外す

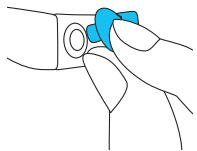

②シールドの
取り付け穴を開ける

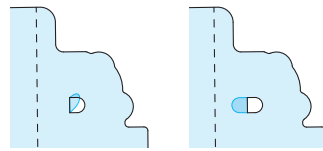


③シールドとフレームの
穴位置を合わせる

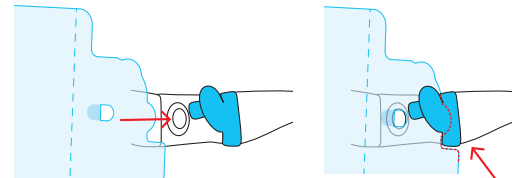


赤の点線部分を図のように
セットすると穴位置が合います

④ストッパーを差し込み
しっかりと押さえる

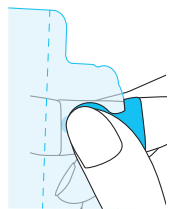


⑤あご部分を組立てる

スリットの両側を重ね合わせ
フックを切込みに差し込む

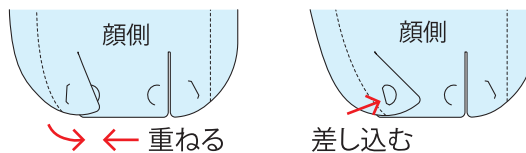


両側のフックを差し込み
立体的に組立てる

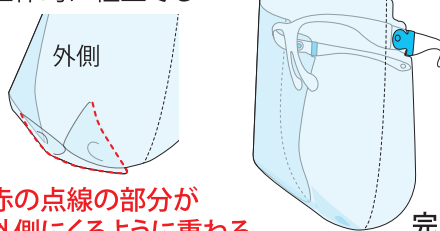

赤の点線の部分が
外側にくるように重ねる


完成

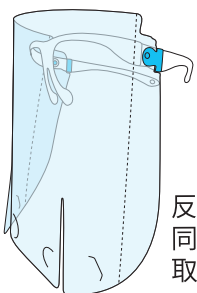

反対側も
同様に
取り付ける

* 必要に応じてご使用ください

シールドを開閉する

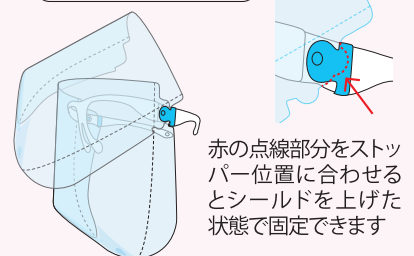

赤の点線部分をストッ
パー位置に合わせる
とシールドを上げた
状態で固定できます

野線を折り曲げる

両側の折り曲げ野線を
適当な角度で折り曲げて
顔にフィットさせる

