

飛沫を防ごう!



飛沫対策品

使い切り

フェイスシールド

組立式

曇り防止加工*PET
使用だから
内側が曇りにくい!

*曇り止め剤 安全性評価実施済み
(皮膚刺激性・眼刺激性・感作性試験)

日本製

- 材質:防曇PET
- 1枚34g
- 1ケース100枚入り

使い切りのため
衛生的!

輪ゴム*で装着
サイズ調節が可能!

*輪ゴムは別途ご準備ください


顎下部分まで
カバーする形状*
飛沫を防ぐ!

*特許及び意匠出願中



薄型梱包のため
省スペース保管が可能!

100枚
入り

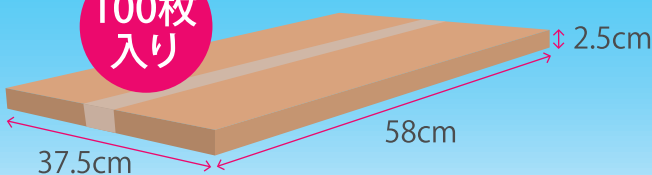

ポイント!!

立体的に組立てて
顎下までカバー!



高感度カメラ*による可視化映像

①本人による
飛沫飛散状況



②対人による
呼気の流れ



組立方法を
動画で確認!!




*レーザー光線によって微細な粒子を可視化できる
カメラのことです。

ご使用上の注意




- 飛沫感染予防以外の目的では使用しないでください。
 - 空気中の微細な飛沫、粉塵などの吸込み防止にはマスクを使用してください。
 - 本製品は非滅菌品です。
 - シートのエッジで手を切らないよう注意して取り扱いください。
 - 勢いよく枠を剥ぎ取るとシートが割れる恐れがあります。
 - 割れた製品、切れ目の入った製品は使用しないでください。
 - 極端に高温、低温になるところや、直射日光のあたる場所には置かないでください。
 - 皮膚に異常がある方はご使用をお控えください。
 - 本製品のご使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした時や気分が悪くなった時は使用を中止し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - 装着後、一度外されたフェイスシールドは再利用せず、自治体の区分にしたがって廃棄してください。
 - 汚れた場合は新しいフェイスシールドに交換してご使用ください。
 - 表裏を間違ってお使用されると、曇り止め剤塗布面が頭部に直接接触することになります。取扱い説明書にて表裏を十分に確認の上、ご使用ください。
 - 曇り止め剤の特性上、塗布面が白く見えることがあります。
 - 本製品に水、アルコール、酸性の液体等で拭く、もしくは噴霧することは避けてください。また本製品を加熱しないでください。
- ※曇り止め剤に使用している薬剤が脱落、もしくは変性することで皮膚、眼、気管に影響する可能性があります。
- 高温多湿環境下に長期間保管すると品質劣化の可能性がございます。
 - 長期間保管した製品で、使用前または使用中に異常を感じた場合は使用を中止してください。

梱包仕様

ダンボールサイズ	縦37.5cm × 横58cm × 高さ2.5cm
梱包重量	4kg / 1梱包
製品入数	100枚 (1シート2枚付き・シート枚数: 50枚)

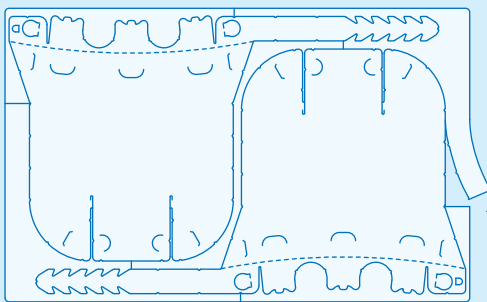

外枠が付いた状態でお届け
1シートに2枚付き

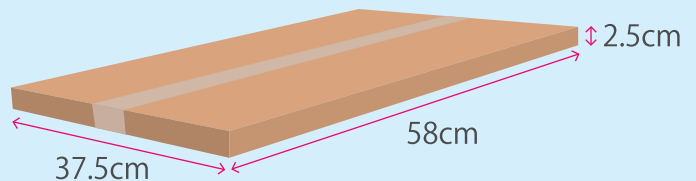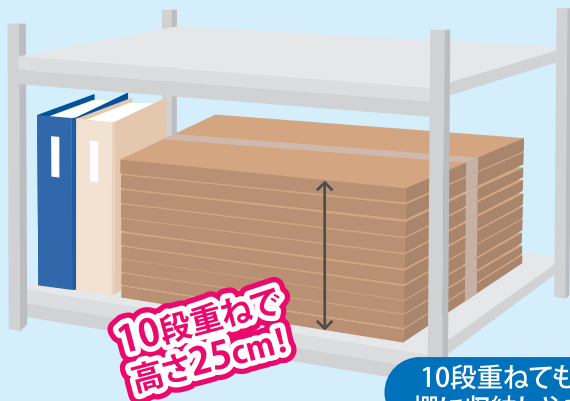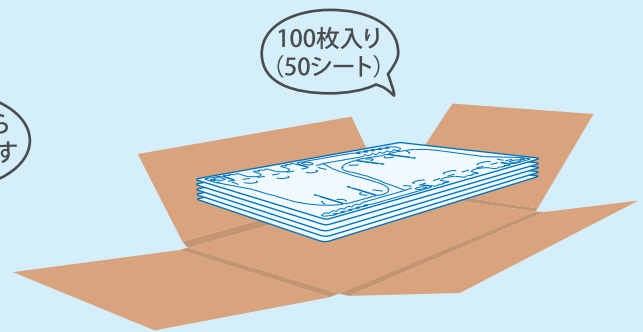

高さ2.5cm!
コンパクトな梱包