

口腔内細菌カウンタ[NP-BCM01-A] ご使用方法

測定する

機器本体の「電源」ボタンを押す




テンキー(市販品)を接続すると、ID・性別・年齢を入力できます。

2 機器本体の 「開く」ボタンを押し、 ふたを開ける



3 センサーチップを 挿入する

- ① センサーチップをセンサーチップ ボトルから取り出す
- ② センサーチップの方向を確認し、機器本体の センサーチップ挿入口へ挿入

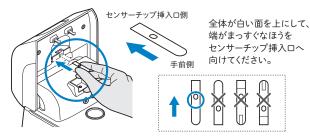


③「ピーツ」と音が鳴ることを確認 ※「ピピピッ」と鳴った場合は正しく挿入されていません。液晶画面を確認して対処してください。

4 ディスポーザブルカップをセットする



測定結果を確認する


フェイスマーク表示部(レベル1~7)と液晶画面表示部(測定数値) に測定結果が表示される

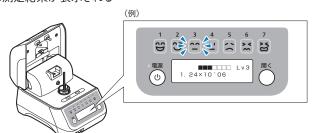

5 口腔内の検体を採取する(採取例)




② 滅菌綿棒を定圧検体採取器具に取り付ける

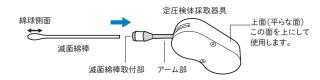

③ 舌上から検体を採取する



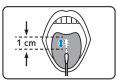

- ① 舌上の中央部に綿球の側面をおおむね平行になるように押し当てる
- ② 舌上の中央部に滅菌綿棒をつけた状態で、約1 cmの長さを3往復擦過する

6 滅菌綿棒をディスポーザブルカップに セットする

定圧検体採取器具から取り外した 滅菌綿棒を、綿球を下に向けて ディスポーザブルカップ中央の 筒内に挿入



7 測定を行う

①「カチットと音がするまで、 ふたを手で閉める (自動的に測定モードになります)



② 測定が終了すると 「ピーツ」と音が鳴り自動で ふたが開く



測定を終了する

① センサーチップと滅菌綿棒が入ったディスポーザブル カップをゆっくり取り出して廃棄する

※使用済み測定消耗品は再利用できません。 各地方自治体や施設の廃棄区分に従って処理してください。

②「電源」ボタンを3秒以上押して電源を切る



Goodbye!