


対象モデル
口腔内細菌カウンタ
NP-BCM01-A

Panasonic®


取扱説明書

口腔内細菌カウンタ専用 AC アダプター

品番 N-DP03

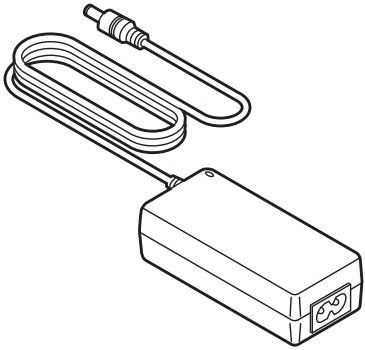

AC アダプター

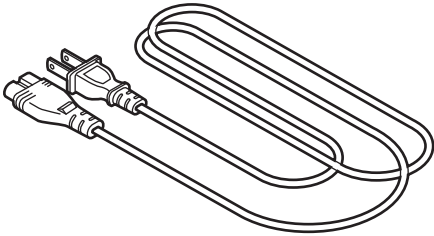

電源コード

N-DP03 は、AC アダプターと電源コードのセット品です。

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この製品は、一般医療機器「口腔内細菌カウンタ NP-BCM01-A※」の別売品です。本書、本体の取扱説明書の各項目についてしっかりご確認のうえ、お使いください。
- **ご使用前に「① 安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

※製造販売届出番号：13B1X10381001003

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2021

P9901-17H20
F0121-2042

① 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

- コンセントや配線器具の定格を超える使用や、交流 100 V 以外での使用はしない
 - たこ足配線等の使用で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 口腔内細菌カウンタ以外に使用しない
 - 発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的に取り除く
 - 電源プラグにほこり等が付着した状態で使用すると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
 - 電源プラグを抜き、乾いた布でふいて取り除いてください。
- 電源コード / AC アダプターを破損するようなことはしない（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っばる、重い物を載せる、束ねる 等）
 - 傷んだ電源コード / AC アダプターを使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
 - 電源コード / AC アダプターの修理は、販売店へご相談ください。
 - 電源コード / AC アダプターを改造しないでください。
- 電源コード / AC アダプターは狭い場所で使用しない
 - 熱がこもり発煙、発火の原因になります。
- 電源プラグや電源コードは、根元まで確実に差し込む
 - 電源プラグの差し込みが不完全な状態で使用すると、感電や発熱による火災の原因になります。
 - 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- めれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
 - 感電の原因になります。

- 熱源の近くで使用しない
 - 火災などの原因になります。
- 雷が鳴り出したら、電源コード / AC アダプターの金属部に触れない
 - 落雷すると、感電の原因になります。
- 電源コード / AC アダプターに水をかけたり、ぬらしたりしない
 - 感電や発熱による火災の原因になります。
 - 水が入った際は、使用せず販売店へご相談ください。
- 次のような場所で使用したり、放置しない
 - 火元の近く
 - 温度が高くなる場所（特に真夏の車内やトランク等）
 - 油煙や湯気の当たる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 重い物の下
 - 足元等、誤って踏んでしまうような場所
 - 振動の激しい場所
 - やけど・火災・感電の原因になります。
- 電源コードのコード部を持って抜かない
 - 電源コード破損の原因になり、感電や発熱による火災のおそれがありますので、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く
 - 長期間、電源プラグをコンセントに差し込んだままにすると、発煙による火災のおそれがあります。
- 煙が出ている、異常に熱い、異臭がする、異音がする等の異常を感じた際は、使用するのはやめて電源プラグを抜く
 - 火災・感電の原因になります。ただちに販売店へご相談ください。

注意

- お手入れするときは電源プラグを抜く
 - 感電につながるおそれがあります。

② ご使用の前に

ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使用すると、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は 1 m 以上離してください。

接続した状態にしておくと、最大約 0.3 W の電力を消費しています。使用中、AC アダプターの内部で発振音がある場合がありますが、異常ではありません。

Panasonic

持込修理

口腔内細菌カウンタ専用 ACアダプター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い求め先にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	N-DP03		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※販売店	住所・販売店名 _____ 電話 () —		


パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 TEL 077(563)5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線

3 接続のしかた

AC アダプターを口腔内細菌カウンタ背面の DC 入力端子に差し込み、電源コードを AC アダプターとコンセントに差し込みます。

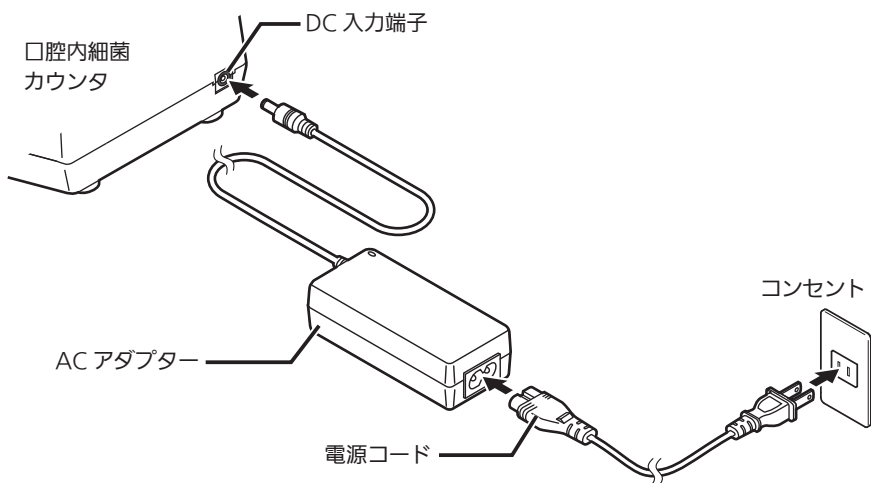

4 保管場所

保管場所にはお気をつけください。故障や劣化の原因になることがあります。

	周囲温度	相対湿度	気圧
使用条件	10℃～35℃	20％～80％（非結露）	800 hPa～1060 hPa
保管、輸送条件	－20℃～60℃	10％～85％（非結露）	700 hPa～1060 hPa

- 直射日光に長時間さらさないでください。

5 仕様

電源電圧	交流 100 V
電源周波数	50-60 Hz
入力電流	1 A
出力電圧	直流 12 V
出力電流	3 A
電撃に対する保護	クラス II 機器（AC アダプター）
寸法	幅：50 mm × 高さ：33 mm × 奥行き：99 mm（コードを除く）
質量	約 0.3 kg（AC アダプターおよび電源コード一式）
DC コード	長さ：1.5 m
電源コード	長さ：1.8 m

AC アダプターを電源に接続した状態にしておくと、最大約 0.3 W の電力を消費しています。本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

6 製品表示記号

AC アダプター並びに包装材に表示された記号とその意味について説明しています。

 欧州連合安全性能基準の適合マーク	 テュフラインランド認証マーク
 欧州連合電気・電子機器廃棄の指令適合マーク	 日本電子機械工業会 極性統一プラグ極性記号
 米国連邦通信委員会 放送通信事業の適合マーク	 クラス II 機器のマーク
 UL カナダ・アメリカ向け 認証マーク	

7 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、販売店へご相談ください。

● 製品名	口腔内細菌カウンタ専用 AC アダプター
● 品番	N-DP03
● 故障の状況	できるだけ具体的に

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご依頼ください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

- お問い合わせは、お買い求め先へご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

- 廃棄方法について

産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の資格を有する処理業者に依頼してください。

キリトリ線



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）この商品は持込修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 設置のご住所を変更された場合の修理ご依頼先等は、お買い求め先にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（ト）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.