

Slidiy

スライディ



介護保険福祉用具貸与品：特殊寝台付属品

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 車いすで移乗が必要な人

1. どこでも簡単に使えるよう スモール&ライトを実現

独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。

2. 持ち運びがしやすい収納袋を標準装備

どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、【家中】や【外出先】など、どこでも使用できます。

回転動作 としなり で移乗

車いす

ベッド

ボードを小さくするために回転動作で移乗するのに最適な形状にしました！

やわらかく、しなりがあり反発力によってスムーズに移乗ができます！

家中 や 外出先 での使用例

ベッド ~ 車いす

車いす ~ ソファ

車いす ~ テーブル席

車いす ~ 便座

取り付け例

どんな車いすにも取り付け・取り外し可能なスライディ収納袋を標準装備！

<介助での移乗のポイント> 車いす ~ ベッド

約30度

車いすを30度ぐらいを目安にベッド脇に付ける

スライディをお尻の下に差し込む

腰に手を添え、回転するようにスッと押し出す

スライディを引き抜き移乗完了

詳しい移乗方法は動画でチェック！

品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(g)	素材
		長さ	幅	厚さ		
MSLD	00054-000449	65	18	0.5	0.35	PP (裏面滑り止めシート付き)

※ 使用者最大体重：100kg

開発・製造・販売元

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health

From the Inside Out
内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために。

ISO9001 認証取得
ISO13485 認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得