

★ スターオブライフ 認証商品

酸素缶



携帯用濃縮酸素 **carriable + immediate effect**

集中力に

緊急時 & 避難時に

疲れた体に

手軽に高濃度酸素を!!

【用途】

1. スポーツや登山に



運動時の呼吸や心拍の安定に
酸素は役立ちます

2. 集中力・記憶力に



酸素は血流を促し、
脳をリフレッシュさせます

3. 疲れた体に



酸素は血流を促し、
老廃物の排除やコリをほくします

4. 運転中に



眠くなりやすい車内で
酸素は役立ちます

5. 避難・救急時に



避難所での窮屈な姿勢時や
火災時の煙などからの避難に役立ちます

6. 二日酔いに



酸素はアルコール成分を分解します

業界最長! 消費期限5年 大容量5Lタイプ



スターオブライフとは、1973年に
アメリカで生まれた世界が認める
救急救命のシンボルマークです



救急車にも
スターオブライフの
マークが!

【原寸大】

● MADE IN JAPAN



携帯用濃縮酸素

酸素缶

carriable + immediate effect

 OXYGEN CAN
concentrated



酸素缶のパワーの秘密


酸素缶には高濃度酸素が充填されています。

高濃度酸素とは、空気中の酸素濃度 21% よりも高い割合で濃縮された酸素の事です。

自然界には存在しない濃度の高い酸素で、

医療で使われている酸素マスクは、約 90% の高濃度酸素が使われています。


酸素缶も同様の約 90% の高濃度酸素のため効果が期待できます。

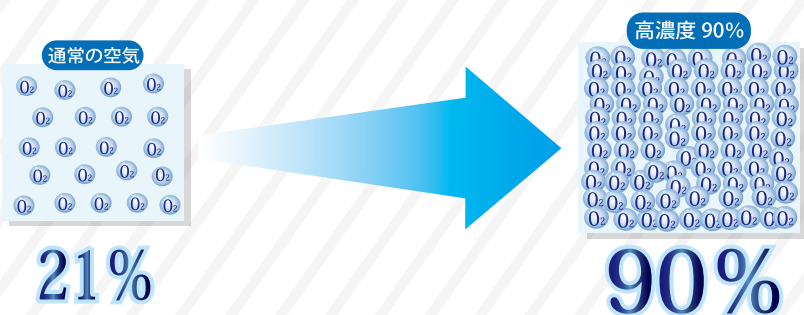

いざという時に
誰でも簡単に！

【使用方法】

1.

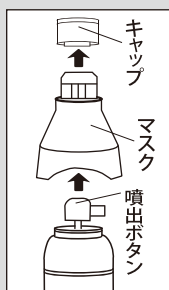


本体からキャップとマスクを取り外します。

2.



A の6つの穴が下に向くように、マスクを噴出ボタンの吹出口に差し込みます。

3.

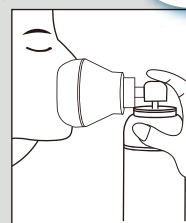

マスクを口元にあて、噴出ボタンを押しながら、酸素を吸入してください。

商品名	携帯用濃縮酸素 酸素缶	使用回数	0 ~ 60 回 (2 秒 / 回使用の場合)
サイズ	直径 65mm × 高さ 245mm	納品荷姿 サイズ (1 箱 12 本入り)	横 232mm × 高さ 264mm × 奥行 307mm
重量	140g	納品荷姿 重量 (1 箱 12 本入り)	2.212kg
酸素濃度	95%		
充填量	5 リットル		

製造・販売元

ビーゴ メディカル

VIGO MEDICAL 株式会社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-11-10 第2SSビル2F

T:03-6661-7030 / F:03-6661-7032



販売代理店