

FUJIIRYŌKI

アルカリイオン整水器 S2
FWH-10000

健康を考える私は、
トレビの水を選ぶ。

TREVI+^{H₂}

トレビ水素プラス

FWH-10000





水を選べば
毎日の暮らしが
健やかになる



フジ医療器は考えます。 食の安全と健康的な生活のために

フジ医療器は1954年に創業し、美と健康の総合メーカーとして品質にこだわり続けています。その半数近い年月を、アルカリイオン整水器の販売というカタチで、食の安全と健康的な生活を守る「水」を提供してまいりました。「健康」という観点から食生活の改善が見直されています。飲む水として唯一、医療機器として認証されているアルカリイオン整水器で毎日の暮らしにトレビをプラスしませんか。



水を賢く選んで

健康なカラダと、 安心の暮らしを。

アルカリイオン水とは、水の電気分解によって発生する水素を豊富に含んだアルカリ性の電解水です。

あなたのご家庭にも健康のベースとなる飲む水、料理に使う水、暮らしを清潔に保つ水、毎日の暮らしをワンランク快適にする11種類の水をお届けします。



アルカリイオン水の使用目的、または効果

胃腸症状の改善に働きかけます。

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



※本カタログでは生成される水の名称として、「アルカリイオン水」・「酸性水」を使用しています。これらはJIS T 2004(家庭用電解水生成器)で用いられる「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」に相当します。

健康と安心は水を使い分けることから



浄水 ミルク・薬を飲む水 アルカリイオン水 お料理に最適な水 酸性水 肌にやさしい水 衛生水 洗浄除菌できる水



わかりやすい 液晶パネル

生成している水がアルカリ性か酸性かを示すpH値、溶存水素量、ORP(酸化還元電位)、総流量、カートリッジの使用可能残量を確認できます。

カートリッジ 交換ランプ

交換時期になると音と点滅・点灯表示でお知らせします。

リセット

2秒押し

①交換

トレビは衛生水も 生成できます。

家中の消臭・洗浄除菌に

食塩を添加し生成した衛生水(強酸性水)は洗浄除菌に有効とされています。
※付属の衛生水カートリッジと食塩が必要です。

選べる11種類の水とpH値目安

ボタンを押すだけの簡単操作で水素たっぷり、暮らしに最適な11種類の水を選ぶことができます。

飲用水				機能水		
飲み始め	飲み慣れ	日常飲用	衛生水	酸性水	強アルカリ	
浄水	アルカリ1	アルカリ2	アルカリ3	衛生水	酸性水	強アルカリ
薬・サプリ	初めて飲む方	米研ぎ・炊飯	お茶・お料理	洗浄除菌	洗顔	アク抜き・野菜洗い

水素たっぷり！ しっかり電解



電解しにくい水質でも
しっかり電解

pHを自動で一定に
保つ賢い機能

水素プラスボタン

pH自動コントロール機能

水素濃度約4倍[※]

※流量2.5L/分（定格流量）でpH9.5合成水
使用時（JIS T 2004に基づく合成水）通常
モードと水素プラスモード比較。水質によ
り異なります。

流量にかかわらずpHを
自動で一定に調整する機
能を搭載。

※アルカリ1.2.3の場合。

使いやすさに こだわった機能



野菜洗いや生活の中でも
パワフルに使える！

手間要らず！
定期的に電極メンテナンス！

最大吐水量
毎分約 5.5L

自動クリーニング機能


シンクまわりに置きやすい！

デリバリーパイプ65cm



業界トップクラスの節水能力と低コストで環境にも家計にもやさしい

もったいない排水（酸性水）は、ほんの少し
わずかな排水でたっぷりのアルカリイオン水を生成できます。
生成水・排水の流量比率は業界トップクラスの19:1

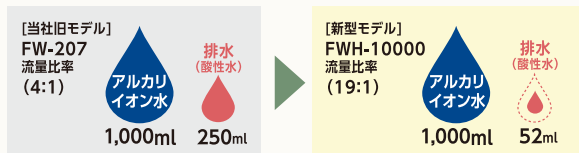


さらに、捨て水ゼロモードで節水

水道のコックを締めて30分以内は捨て水することなく
ご使用できます。

1Lあたり、わずか約10円

水道水から作るのでペットボトルやウォーターサーバーの
水と比較しても断然お得です。

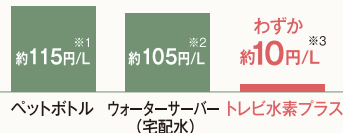

※1 ペットボトル：2Lペットボトルを購入
した場合 ※2 ウォーターサーバー：毎日
のレンタル料とボトル（12L入）を月4本使
用した場合（電気代を除く） ※3 トレビス水素
プラス：1日20Lの使用、本体を5年間使
用した場合（本体代金、水道代、電気代、
カートリッジ代含む）

オートパワーオフ機能で省エネ

使用30分後に自動でパワーオフモード（待機モード）になり
電気のムダ使いを防ぎます。

フジ医療器だからこそできる進化した「高効率ダブル電解槽」

優れた浄水能力と10枚の電極で高水素濃度の電解水を生成

フジ医療器がトレビスシリーズを1989年に発売してから30年。
FWH-10000は従来の電解槽（5枚電極）に加えて、
新型水素電解槽（5枚電極）を搭載し、さらにパワーアップ。
溶存水素濃度1300ppb^{※3}のアルカリイオン水の生成を実現しました。


優れた浄水能力 JIS指定17物質^{※1}+3物質^{※2}を除去

ORP値はトレビスシリーズ過去最高の還元力

ORP（酸化還元電位）とは、
物を酸化および還元させる
電気的エネルギーの指標。

プラスの値が高いほど
酸化する力が強く
マイナスの値が低いほど
還元する力が強い

pHが上がるとORP値は下がる傾向にあります。
地域・水質・水圧・水温によって変化します。

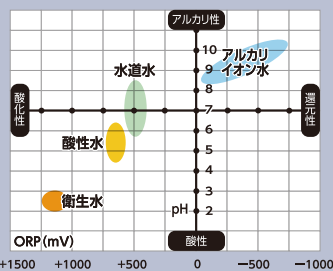

水素濃度を上げる


新型水素電解槽
[5枚電極電解槽]

20物質を除去
浄水カートリッジ

アルカリ性に電解

従来電解槽
[5枚電極電解槽]

溶存水素濃度
最大1300ppb^{※3}

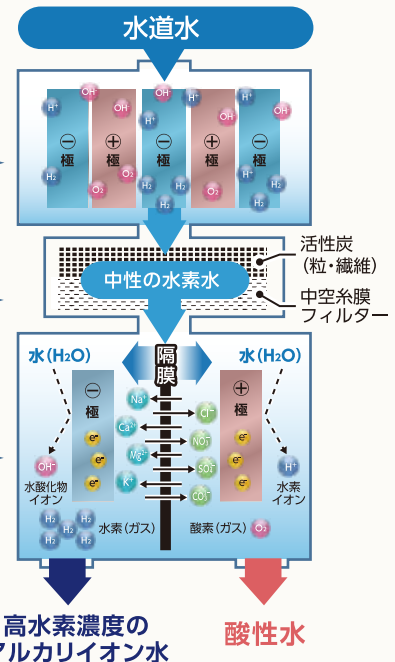

※1 [JIS規格指定17物質] ①遊離残留塩素 ②濁り ③総トリハロメタン ④クロロホルム ⑤プロモジクロロメタン ⑥ジプロモクロロメタン ⑦プロモホルム ⑧テトラクロロエチレン ⑨トリクロロエチレン ⑩CAT（農薬） ⑪2-MIB（カビ臭） ⑫溶解性鉛 ⑬ジェオミン ⑭陰イオン界面活性剤 ⑮フェノール類 ⑯ベンゼン ⑰シス、トランス1,2ジクロロエチレン ※2 [浄水器協会自主規格3物質] ①鉄（粒子状鉄） ②アルミニウム（中性） ③四塩化炭素 ※3 溶存水素濃度 東亜ディーケーケー製DH-35Aによる測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。

TREVI+^{H₂} FWH-10000 アルカリイオン整水器S2

[管理医療機器] 医療機器認証番号 231AKBX00005000

トレビ水素プラス

仕様

- 本体寸法/幅 25.5×奥行 14.2×高さ 32.4cm
- 質量/約 4.1kg (満水時 約 5.1kg)
- 定格/AC100V (50/60Hz)
- 消費電力/約 220W (待機時: 約 0.5W)
- 電源コード/2.5m
- 給水接続/レバー切替
- 給水方式/吐水蛇口分岐栓
- 本体通水可能水圧(動水圧)/約 70~500kPa
- 使用可能水道管圧力(静水圧)/約 70~750kPa
- 電解

<電解能力切替>

アルカリイオン水 3段階+強アルカリイオン水1段階、
酸性水 1段階、衛生水 1段階
<処理水量>
[アルカリ 1.2.3 動水圧100kPa の場合]
吐水量(約)/アルカリイオン水: 2.38L/分
排水量(約)/酸性水: 0.12L/分
[アルカリ 1.2.3 動水圧 350kPa の場合]
吐水量(約)/アルカリイオン水: 5.5L/分
排水量(約)/酸性水: 0.29L/分

●浄水カートリッジ(FW-20CM)

<ろ過材料>
中空糸膜、粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
<ろ過能力>
遊離残留塩素 約 8,000L^{*1}
濁り 約 8,000L^{*2}
総トリハロメタン 約 8,000L^{*1}
など、JIS 規格指定 17 物質 + 浄水器協会
自主規格 3 物質を除去

- *1: 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験で除去率 80% の値
- *2: 家庭用浄水器試験方法 (JIS S3201) に準拠した試験でろ過水量 50% の値

<カートリッジの寿命>

- 使用可能通水量: 8,000L
- 使用可能日数: 730 日

メーカー希望小売価格:

標準工事費:

[追加部品が必要な場合は別途費用がかかります。]

[専用カートリッジ]

専用浄水カートリッジ
FW-20CM

[別売品・消耗品]

●pH測定液
●衛生生成用食塩
●衛生水スプーン

[同梱付属品]



- 分岐栓
- 衛生水カートリッジ
- 分岐栓取付け用付属品
- pH測定液セット
- カートリッジ交換シール
- ホース固定バンド
- 食塩計量用衛生水スプーン付
- 衛生水生成用食塩
- デリバリーパイプ



FWH-10000
JAN:4951704417396

キッチン環境に合わせて取り付けできます

付属の分岐栓を取り付けた場合



別売品 シングル分岐栓



シャワー式などで付属の分岐栓が取り付けできない場合

3段階のレバーで切替可能



切替レバーを使えば、用途に応じて
「アルカリイオン水・浄水」「水道水のシャワー」
「水道水の原水」の3段階に切替することが
できます。

※熱水(50℃以上)が流れると自動的に分岐栓の熱水吐水口から吐水され、本体への流入を防ぎます。

株式会社フジ医療器は、アルカリイオン整水器協会へ加盟しています。

アルカリイオン水の最新情報をご覧ください。



アルカリイオン整水器
協議会ホームページ
<http://www.3aaa.gr.jp/>

- アルカリイオン整水器協会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
- アルカリイオン水の効能・効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行なっています。



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■アルカリイオン整水器のご注意 ●腎疾患(腎不全、カリウム排せつ障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体が弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1~2杯)、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。



使用上の注意 ●水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジ寿命に差があります。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2021年5月現在のものです。

21.05.2M.GA.A1.E [注文No.1564]