

認定：NIOSH 42 CFR Part 84

適合：FDA GMP regulations 21 CFR Parts 210, 211 and 820



FILTER TECHNOLOGY

## SEGRE N31000 N99マスク

### 特長

- ✓ PTFEメンブレンフィルタ **Nitto**  
\* Nitto製TEMISH®を使用  
Innovation for Customers
- ✓ 静電プレフィルタ
- ✓ 調節式ストラップ
- ✓ アルミニウム製ノーズクリップ  
\* 磁場の影響を受けない非磁性体金属を使用



認証番号：TC-84A-9111

### 製品仕様

微粒子ろ過効率 > 99.0%

NIOSH：42 CFR Part 84

細菌ろ過効率 (BFE) > 99.9%

血液不浸透性 レベル3

@ 160mmHg (21.3kPa)

ASTM：F2100-19


小箱入り数：15枚 (個別包装)

\* TEMISH®とは、  
1cm<sup>2</sup>あたり数億個という微細孔をもち、防水性・防塵性と高い通気性を同時に発揮します。  
耐熱性・耐薬品性・非発塵性などPTFE樹脂の持つ優れた特性を備えております。


# 正しい装着方法 GVS SEGRE N31000

## 初めに


マスクが顔にフィットしていない場合、ストラップを縛って長さを調節します。

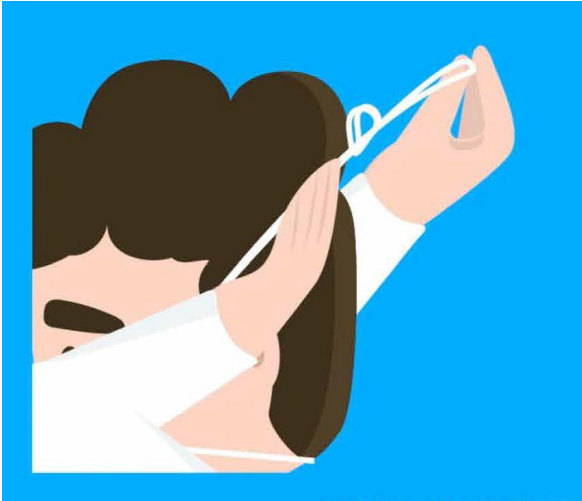

若干の長さ調節が必要な場合、クリップにストラップを巻き付けます。

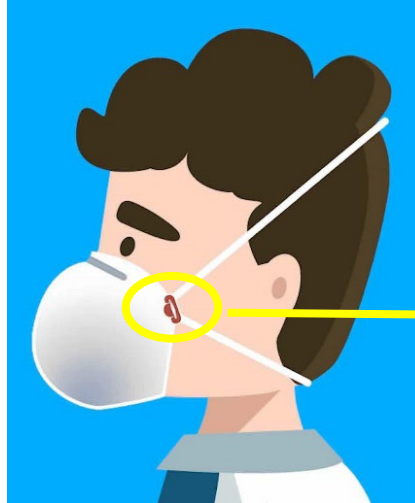

巻き付け回数は人により異なります。


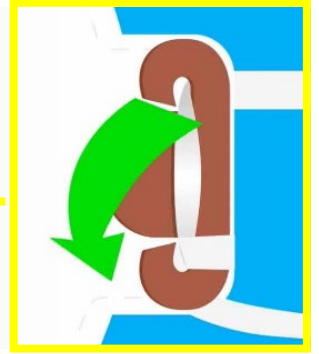


参考巻き付け回数


男性：3～5巻き ・ 女性：4～6巻き

## 次に

上部ストラップがマスクの下側(あご周辺部)を保持します。下部ストラップがマスクの上側(鼻周辺部)を保持します。締め付け感を感じる状態が適切です。

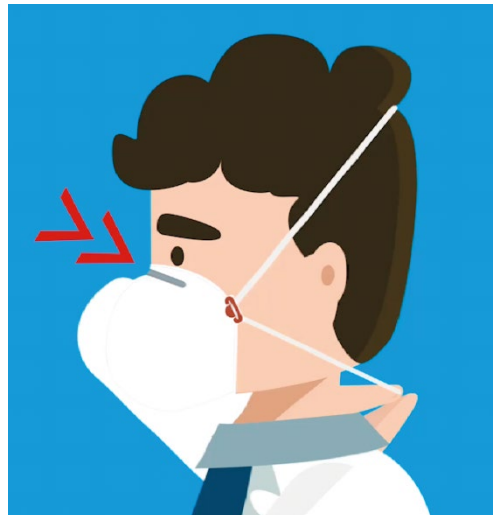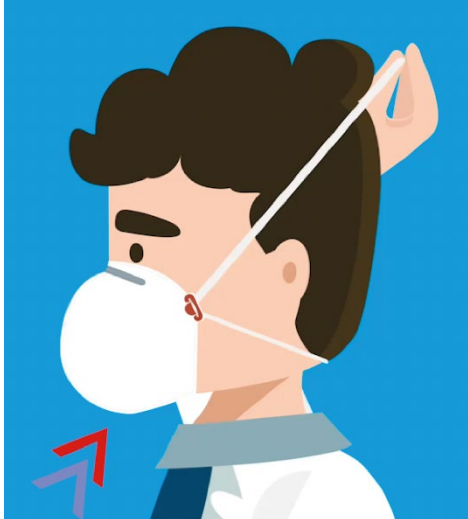

上部ストラップはつむじ部、下部ストラップは襟足部で固定します。

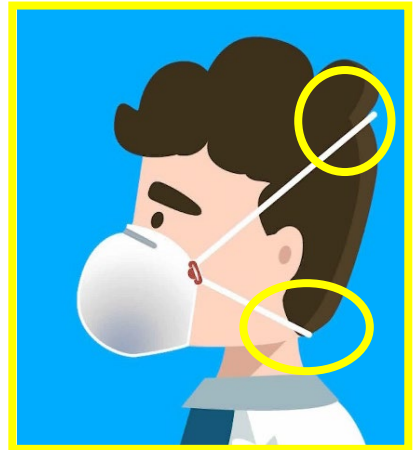

## ノーズクリップの調整

## 最後に

息を吐いて鼻梁周辺から息漏れが無い事を確認して下さい。



鼻梁に沿うよう  
ノーズクリップを曲げます。

