

# 欲しかった こんなカタチの採尿具



## URO CATCH ウロキャッチII

### ■目盛付きスーパースピッツを装着

- 1~10ccの目盛付きで内容量の目安が得られます。
- 透明性、耐衝撃性、耐凍結性(-80℃フリーザーOK)に優れています。硬いで且つ粘りが有り、極めて割れにくい特徴を持っています。
- 専用のポリ栓で密栓でき、且つ施栓の時、パチンと確認音が出る為確実な施栓と検体の長期保存が可能です。
- スピッツ先端に工夫があります。
- ウロキャッチII仕様(総重量20g)

| 部品名  | 使用樹脂 | 色  | サイズ (概寸・直径×長さ) (mm) |
|------|------|----|---------------------|
| 採尿器  | PP系  | 無色 | 17.1~24.9×119.1     |
| カバー  | PE系  | 黄色 | 19.8~22.6×106       |
| スピッツ | PS系  | 透明 | 6.3~18.2×105.4      |

### ウロキャッチIIの使い方


#### 手順1 (採取前)



黄色のカバーを左に回転させぬきとる  
(二重になっているので外側のカバーを外す)

左に回転

#### 手順2 (簡単採尿・清潔)

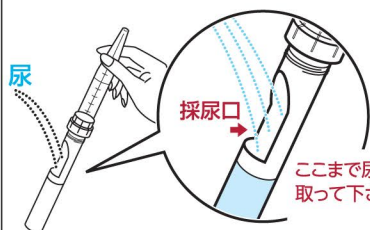

スピッツ部(透明・三角部分)を持ち、放尿中の尿に採尿口をかざし、尿をとる。

ここまで尿を取って下さい。

#### 手順3 (採取後)



尿を採取後、カバーを元に戻し、右に回転させ、しっかり締める。

右に回転

#### 手順4 (提出)



ラベルをカバーに貼る


同封のラベルと袋に必要事項を記入し、ラベルをカバーに貼り採尿具を元の袋に入れ、チャックをしっかりと締め提出する。

#### ■使用上のご注意

- 本採尿具は上記説明による採尿用途以外にはご使用にならないで下さい。
- 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断して下さい。


### 簡単採取

広い採尿口を確保、尿をかけるだけで採尿できます。

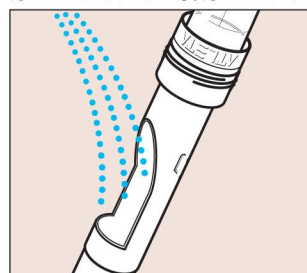

### 清潔


手に尿がかかりません。

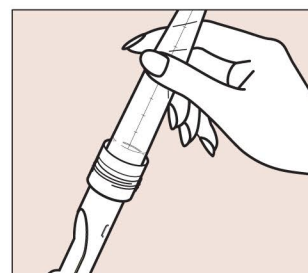

### 尿の自動移動

黄色のカバーでフタをしてねじって固定


上下ひっくり返すだけで尿はスピッツに自動的に移動

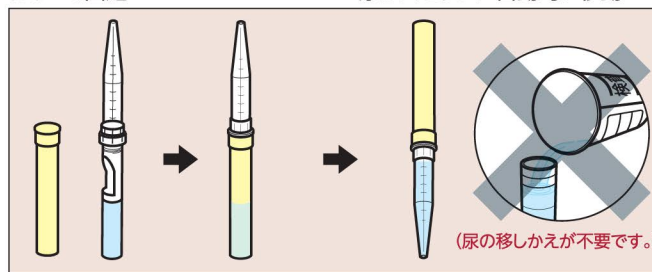

(尿の移しかえが不要です。)

### 取りはずし簡単

スピッツ取りはずしもスムーズです。

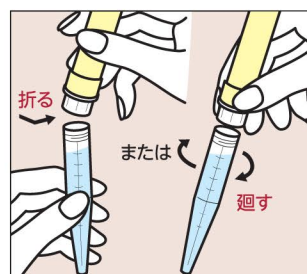


### 省スペース

検体の保管スペースが削減されます。



### 試験紙検査

尿試験紙での検査ができます。

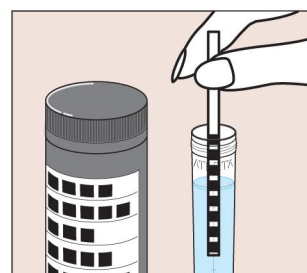


### 密封性

専用蓋がありますので臭いの拡散、異物の混入を防げます。




### 遠心分離(尿沈渣)

遠心分離器にかけられ尿沈渣用検体が得られます。

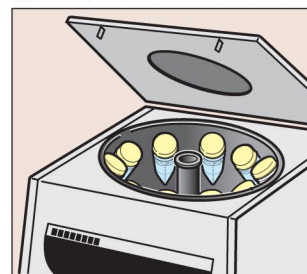

### 自動検査

各種自動検査機に対応可能です。

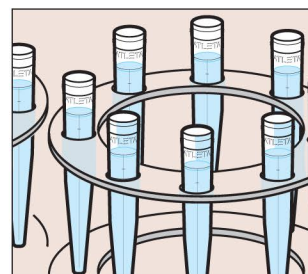

 株式会社アトレータ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-5 フレンテ新大阪  
TEL: 06-6151-5207 FAX: 06-6151-5208  
E-mail: info@atleta.biz

URL: <http://www.atleta.biz>