



RAK UDES®

ジャバラ背あて車椅子用クッション【業務用】

取扱説明書

ジャバラ背あて車椅子用クッション【業務用】取扱説明書

- ・この度は、ラクデス商品をお買い求めいただき、ありがとうございます。御座います。
- ・ご使用になる前に、この「取扱い説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

〔製品概要〕

RAKUCES (ラクデス) 【 ポジショニングシリーズ 】

背中との隙間を埋めて、安楽な座位づくりができます。

- 設計 車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様で個々の体型にフィットし易い基本設計になっています。
- 中材 安定感、清潔を考慮し、ポリエステルを使用
- 洗濯 丸洗いができます。※低温乾燥



〔仕様〕

品名 ジャバラ背あて車椅子用クッション【業務用】

サイズ	5×40×58 cm
生地	ポリエステル 65%、綿 35%
中材	ポリエステル 100%

※ カバーは、市販 43×63 cmの枕カバーを使用することができます。

静岡市『新商品等開発事業』採択商品
テクノエイド登録商品 TAIS コード 01249 - 000019

〔用途〕

本品は、車椅子用の姿勢保持器具です。

〔安全にお使いいただくために〕

<危険>

- ・本品に火気を近づけたり、寝タバコは絶対にしないでください。

<警告>

- ・本品は姿勢保持具ですから、姿勢保持以外の用途でご使用にならないで下さい。

<注意>


- ・「クッション」を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう恐れがあります。中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。
- ・高温の乾燥機は、避けてください。
- ・使用・洗濯により、表皮生地が縮み触感が変わる恐れがあります。

〔使用方法〕

- 必要に応じて収納ポケットにタグを収納することができます。



<使用例>

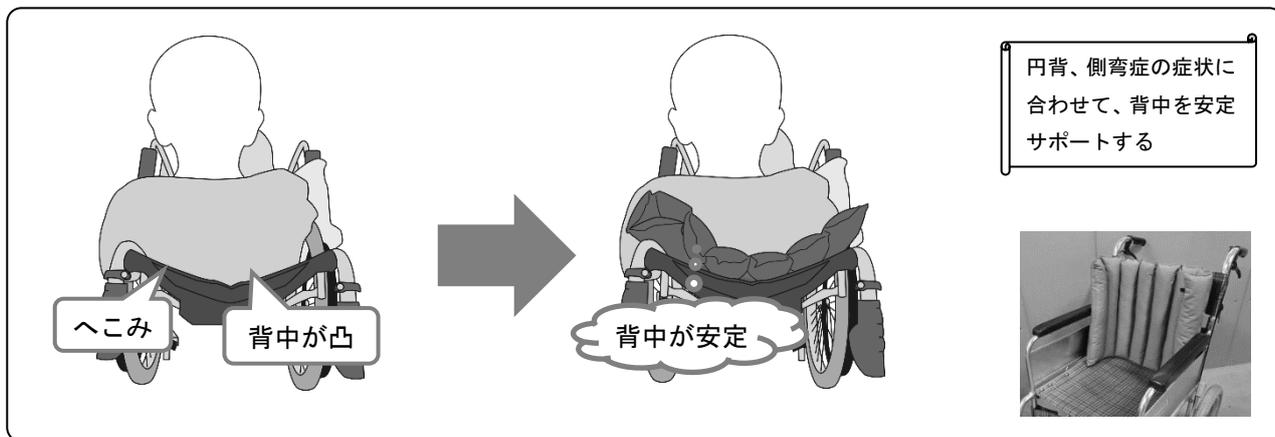

〔洗い方〕

- ・ 丸洗いです。
- ・ 本品は、40℃までの温水で洗濯が可能です。
- ・ 乾燥機は、80℃以下の低温乾燥をお願いいたします。
- ・ 洗濯後は、十分に乾燥しているか確認してからご使用ください。



ネット使用

〔耐用年数〕

- ・ 使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売元〕

株式会社丸井商事／ラクデス

ホームページ <http://www.rakudes.com/>

本社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18 TEL054-366-1612 FAX054-366-1738

日本製