


規格変更に伴う、栄養カテーテル・延長用チューブ、および変換コネクタの接続例


既存規格の栄養カテーテル・延長用チューブをご使用いただく場合

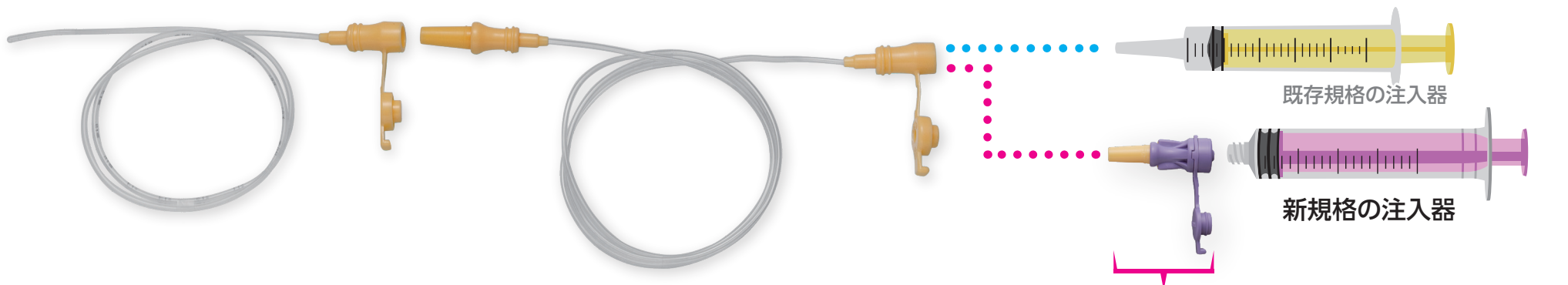

※既存規格のカテーテル・チューブと新規規格の注入器を接続する際は、**変換コネクタ (新-旧タイプ)** が必要になります。

変換コネクタ (新-旧タイプ) [製品コード: 43609]

新規規格の栄養カテーテル・延長用チューブをご使用いただく場合

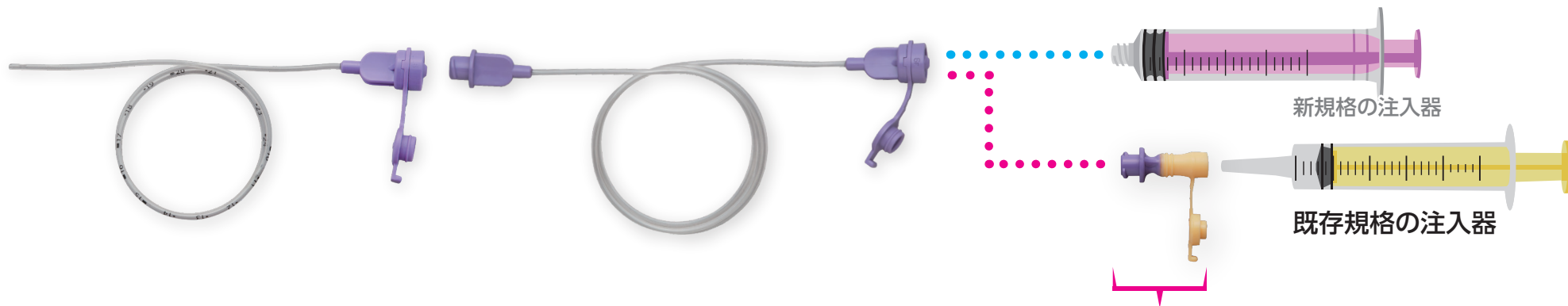

※新規規格のカテーテル・チューブと既存規格の注入器を接続する際は、**変換コネクタ (旧-新タイプ)** が必要になります。

変換コネクタ (旧-新タイプ) [製品コード: 43608]



アトムメディカル株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-15 <https://www.atomed.co.jp>

お問い合わせ総合窓口【カスタマーサポート】

0800-111-6050
03-6388-9887

受付時間 平日9:00~17:00