

# ビーズシリーズ (汎用版)



梱包材【プラ】



外箱【ダンボール】

ループ付き

この度は弊社のビーズシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この商品を末永く安全にご使用いただくために、説明書をよくお読みいただき、使用してください。

## 商品の特徴

本品はフィット感を高めるために伸縮性の良い生地を使用しております。

※使用しているうちに徐々に伸縮性が低下し、ビーズがへたってきます。

※汗や湿気が内部にたまったり、皮脂、化粧品、ハンドクリームなどが付着したまま使用をしないでください。

※非常に激しい摩擦が加わった場合、生地が変色する恐れがありますのでお避けください。極度の力を加えないで下さい。

## 警告

・包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は、穴を開けて破棄してください。

・カバー破損などで中のビーズがこぼれた場合、速やかに使用を中止し、ほかのポリ袋に入れるなど、ビーズが飛散して吸い込んだり飲み込んだりしないような処置をしてください。

・火気を近づけないでください。溶けたり燃え出したりする場合があります。

## 注意

- ・クッションを使用中の喫煙は、おやめください。火種の落下等によりクッションに火が燃え移ると、火災や火傷の原因になります。
- ・過度の荷重や力を加えると、破損の原因になります。特に認知症の方など、判断力・理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、十分に注意してください。
- ・カバーが破損してビーズを飲み込んでしまっても、消化されずに排泄されます。多量に飲み込んでしまった場合は、医師の指示に従ってください。またビーズが目に入った場合、清浄な流水で洗眼してください。異常を感じた場合は、眼科医の指示に従ってください。その他、吸い込んだり耳に入ったりした場合は専門医の指示に従ってください。

## カバーリングタイプの場合

**必ずカバーを掛けてから使用してください。**

カバーを掛けない状態で使用しないようお願い申し上げます。中身だけでは使用できかねます。



※カバーにループがついている場合、本体の角の紐をカバーのループに通して、結んでください。

### 【素材】

充填剤：発泡ポリスチレンビーズ

中袋・カバー：ポリウレタン、ポリエステル

【製造国】日本（中袋及びカバー：ベトナム製及び中国製）

## セルタン株式会社

〒243-0807 神奈川県厚木市金田1655  
046-222-2611(営業時間：平日 AM9:00～PM5:00)