

車いす腕らくベルト

姿勢を保持しながら腕も置ける車椅子用ベルト

防汚

難燃

耐薬品

／ 車椅子ベルト × クッション ／



(着用例)

車いす腕らくベルト
no.4018

車椅子に身体を固定するベルトと、姿勢を保持するクッションをひとつにまとめました。

こんな方におすすめ

- 姿勢保持、座位保持が難しい方
- ベルトの食い込みが気になる方
- 車椅子使用时、腕を置くクッションが欲しい方

腹部をやさしくホールド



厚み 10cm のクッションで、ベルトが腹部に食い込む不快感を和らげます。座位保持やずり落ち防止といった車椅子ベルトの役割に加え、腕を置けるクッションとしても機能します。

腕を置いて楽な姿勢を保持




クッション部分を斜めにして腕を支えることで、片マヒのある方も楽な姿勢が保つことができます。ベルトの長さは着用する方に合わせて調節できます。

耐薬品生地ですいつも清潔に



汚れた際には布等でカバーの拭き取りが可能です。また、耐薬品の生地を使用しているため、次亜塩素酸ナトリウム水溶液での拭き上げ消毒ができ、清潔に保てます。

● 製品情報

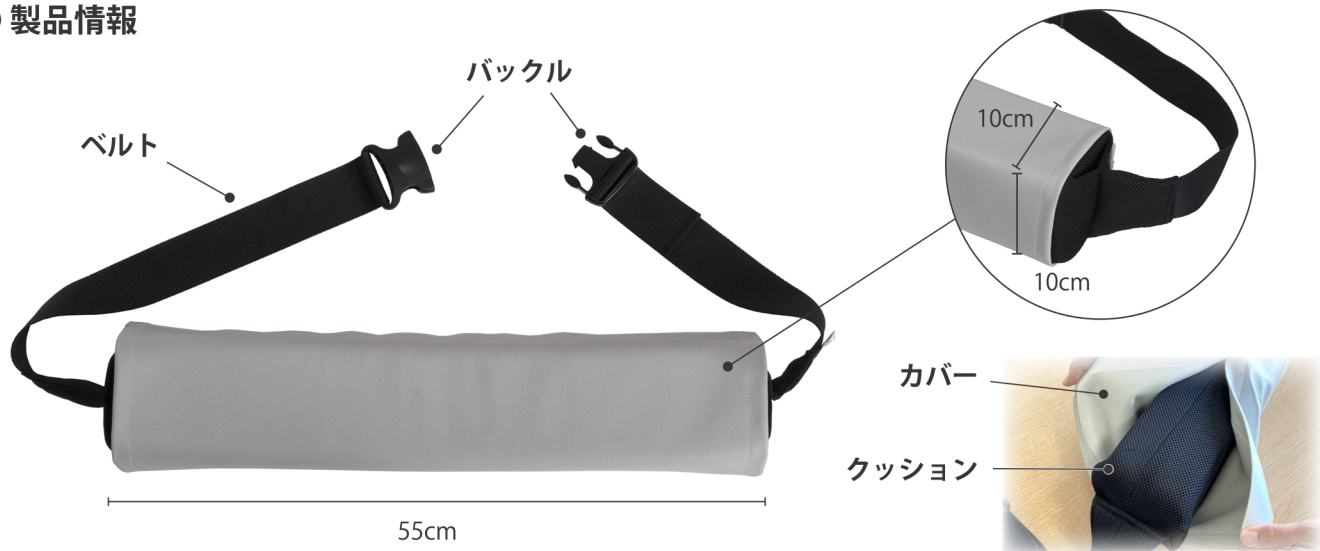

《後ろ》



車いす腕らくベルト
no.4018

JAN コード：4521573014950

《素材》

表 地：ポリ塩化ビニル 100%
中 材：ナイロン 74%、ポリエステル 26%
ベルト：ポリエステル 100%
バックル：ポリアセタール

《サイズ》

クッション：10cm×10cm×55cm
ベルト：幅 5cm×長さ 55cm
適応サイズ：(ウエスト)70-90cm



● お手入れ方法

- ・汚れた際は水または中性洗剤で拭き、水分が残らないよう十分に乾燥させてください。
- ・クッションカバーは次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いた消毒が可能です。(対応濃度：1.5%まで)
- ・クッションカバーは耐アルコール性ですが、硬化を永続的に防ぐ生地ではありません。
- ・本製品を洗うことはできません。

● 取扱い注意事項

- ・普通型の車椅子以外(リクライニング車椅子など)には使用しないでください。
- ・看護者、介護者の目の届く範囲でご使用ください。
- ・火気及び加熱したものの近くに置かないでください。
- ・サイズが合わない場合、無理な着用は控えてください。
- ・痛みを感じる等、身体に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・破損が見られる商品は使用しないでください。
- ・過度な力で引っ張ったり、鋭利なもので触れないでください。破損や変形の原因になります。

販売店

製造元・お問合せ先



株式
会社

特殊衣料

TOKUSHUIRYO

〒063-0834

北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

TEL：011-663-0761 FAX：011-663-0955

MAIL：info@tomoni.co.jp