

## 横アーチサポーター

●つま先・中足部の衝撃をやわらげ、立ち仕事などによるつま先・中足部・足指などのトラブルを軽減!!



### 横アーチサポーターの使い方

- ソックスの下に使用してください。
- 右用、左用がありますので、確認のうえ装着してください。(図1参照)
- 中足骨頭の後方にパッドをあわせ、装着してください。(図2参照)
- 外反母趾では母指と第二指の間にパッドをあわせてください。
- 痛みのある部分には絶対使用しないでください。
- \*使用中に痛みがでた時は、使用を中止し医師に相談してください。



### 洗たくの際のご注意

- ぬるま湯(30℃)で手洗いしてください。
- 漂白剤(エンソ、サラシ等)は使用しないでください。
- 手洗後は陰干ししてください。
- ドライクリーニング、アイロンの使用は不可です。

サイズ: S(22.5~24.5cm) L(25.0~27.0cm)

### 品質表示

本体:アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタン MADE IN JAPAN  
中足パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) 日本製



お問合せ先 三進興産株式会社 <http://www.sorbo-japan.com/>

東京/〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー  
TEL03(5338)8590 FAX03(5338)8599

大阪/〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー23F  
TEL06(4707)2371 FAX06(4707)2399