



## 1020628 | P94

[www.3bs.jp](http://www.3bs.jp)

内診練習用モデルセット

※ご使用の際には必ず十分な量の潤滑剤を塗布してください。

# 内診練習用モデルセット

## イントロダクション

分娩の進行に応じた異なる子宮口開大度、頸管展退度、児頭の位置を再現した内診練習用のシミュレーターです。6つのモデルで構成されています。

## 製品内容

- ・内診練習用モデル 6個
- ・安全プレートとワッシャー付きネジ4個  
(別売りのP90P/P90B 分娩シミュレーターに取り付ける際に使用します)
- ・潤滑剤
- ・キャリングバッグ



## 機能

6個の内診練習用モデルはそれぞれ単独のシミュレーターとして使用することができます。また別売りのP90P/P90B 分娩シミュレーターに取り付けて使用することもできます。各モデルの外観は全く同じですが、それぞれ背面に番号がつけられ次の状態を再現しています。



## 内診練習用モデルセット

### P90P/P90B 分娩シミュレーターに内診練習用モデルを取り付ける方法

- ・分娩シミュレーターをテーブルなど平らな台の上に置きます。
- ・腹壁を取り外します。
- ・子宮口と外陰部（P90Pは膣部付き）を取り外します。
- ・骨盤骨のプラスチックねじを4か所外し、安全プレートを取り付けます。（図1、2）

#### P90Bのみの手順：

- ・腹壁末端の結合部（仙骨付近の白いプラスチックのピンに差し込む部分）を切断します。（図3） 内診練習用モデルを使用しない時は、切断した結合部を分娩シミュレーター仙骨部のピンに再度取り付けておくと、分娩練習の際に潤滑剤がピン周辺にたまるのを防ぐのに役立ちます。
- ・腹壁から外陰部を取り外します。
- ・腹壁を尾骨の部分のみ取り付けます。（図4）
- ・使用する内診練習用モデルを骨盤下部より差し込みます。（図5）
- ・内診練習用モデル下部の穴に仙骨部のプラスチックのピンを差し込みます。
- ・腹壁を完全に取り付けます。（図6）

#### ご使用に際して

内診に使う指およびモデルの膣部に付属の潤滑剤を塗布してからご使用ください。

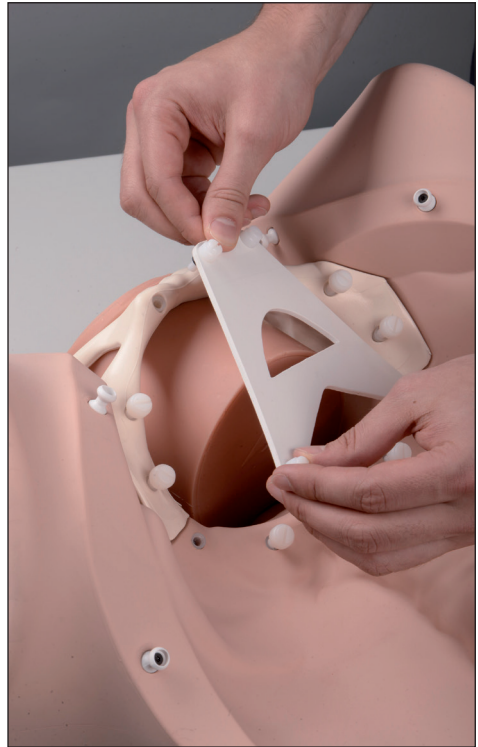


図1

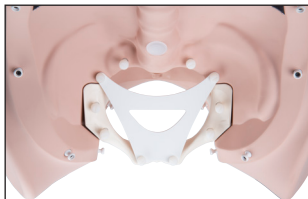


図2



図3

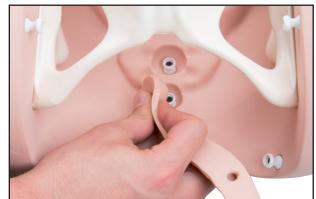


図4



図5



図6

# 内診練習用モデルセット

## お手入れ方法

シミュレーター表面の汚れは、水を含ませた布で拭き取るか流水で洗うことができます。保管前に全ての部品が完全に乾燥していることを確認して下さい。



## アドバイス

長期間使用しない場合は、上記のとおり汚れと潤滑剤をきれいに落とし、乾燥させた状態で保管してください。

## 技術データ

寸法：各モデル  
高さ13 cm×幅11.5 cm×奥行13 cm  
キャリングバッグ 高さ25 cm×幅60 cm×奥行23 cm  
総重量：約5.6 kg（バッグ含む） 約4.85 kg（バッグ含まず）

使用温度：-10～40℃  
保管温度：-20～60℃

## 交換部品

1020608 [XP90-015] 潤滑剤（250 ml×2）

分娩シミュレーター本体

1020332 [P90B] 分娩シミュレーター-Basic

1020333 [P90P] 分娩シミュレーター-Pro

**日本国内** 日本スリーピー・サイエンティフィック株式会社  
**問合せ先** 新潟県新潟市江南区曾野木2-5-18  
Tel: 0120-300-056 / 3bs.jp

---



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany  
Phone: +49 (0)40-73966-0 • Fax: +49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of  
product: 3B Scientific GmbH, Germany