

やわらか

足を守る 車いす用
フットレストカバー

べんけい
ガード

国立国際医療研究センター
臨床工学技士のニーズに基づき開発した成果

追求されたやさしさ

皮膚を傷つけないことを第一に考えて製作されました。
内側のスポンジや外袋の接着は、何度も試作を重ね工夫が施されています。
弱い皮膚でも優しく滑らかに感じられるフットレストカバーです。



やわらか 素材で
安心な介護へ

株式会社三洋

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町 1-13-14
TEL.03-3663-6188

医療者が患者を支えて車いすへ、または車いすから移乗した際、患者の下肢がフットレストに接触して外傷を生じた事例が18件報告されています。(集計期間：2014年1月1日～2018年12月31日)。この情報は、第54回報告書「分析テーマ」で取り上げた内容をもとに作成しました。



患者の下肢が車椅子のフットレストに接触して外傷を生じた事例が報告されています。皮膚が脆弱な患者の場合、皮膚損傷を生じる可能性が高まります。

公益財団法人 日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業 医療安全情報 NO.147 2019年2月 車椅子のフットレストによる外傷」より

肌に優しい 滑らかなつくり

フットレストに取り付ける最低限の造形で脆弱な皮膚も傷つけないための滑らかなつくりとスリムな造形を追求しました。内側のウレタンやPVCカバーは接着面の工夫により、どこをとっても柔らかく肌に優しいです。滑らかなつくりとソフトな素材で足の外傷を防ぎます。



弁慶の泣き所を守ります

フットレストが当たってしまうのは主に足のスネの部分です。あの弁慶でさえも弱点としたスネを守ることから名前が付けました。


固いフットレストから「弁慶の泣き所」であるスネなどをやわらかく守ります。



キャッチくん

新しい構造

外側に肌を傷つけるパーツを作らないための工夫として、このフットレストカバーには内部に固定するため突起がついています。

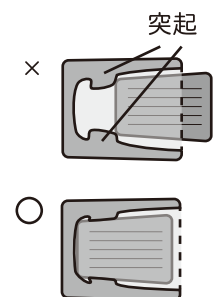

注意

- ・奥までしっかり入れない状態で使用しないでください。
- ・ストーブなどの火気に近づけないでください。高温の場所に放置しないでください。
- ・とがったものを近づけないでください。
- ・フットレストのサイズが小さいと抜ける場合がございます。
- ・廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。
- ・万が一水が内部に入った場合には自然乾燥してください。ドライヤー等の使用は避け下さい。

材質	PVC、ウレタン
本体サイズ (1個)	W160×D180×H45 mm
内容数	2個 (左右1セット)
梱包サイズ (1セット)	W175×D192×H95 mm
梱包重量 (1セット)	205g
ケース入り数	24セット
推奨ステップ対応サイズ	W140×D180×H20 mm