


[別売] 簡易ストーマ ST-2

術後、および一定時間経過後の模擬ストーマです。BDP-182 に装着することで、ストーマの説明、装具交換の練習等を行うことができます。

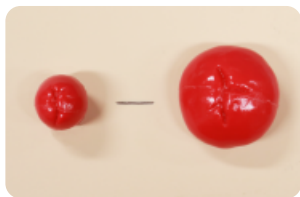

大小のストーマ 1 個ずつ

術後と一定期間経過後のサイズの違いの理解に役立ちます



ストーマ装具の交換

ヒト肌に近い感覚で、装具の固定が可能です

取扱上のご注意、保管について

- ◎創傷部には、裂けることを防止するための繊維が埋め込まれていますが、過度な力をかけると破れる可能性があります。
- ◎目的以外の使用、分解や改造などの行為は行わないでください。
- ◎油性のマジックやサインペンなどは色が沈着することがありますので、ご使用はお控えください。
- ◎ペンローズドレーンモデル（皮膚）をインナーウェアの上に載せたまま長期保管しないでください。樹脂のブリード跡が残ることがあります。
- ◎直射日光や高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがあります。
- ◎煮沸や高温のお湯（60℃以上）につけたり、火気を近づけたりしないで下さい。
- ◎表面が汚れた場合には、希釈したエタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。
- ※シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品は使わないでください。
- ◎製品に異常が発生した場合は、担当者までご連絡ください。

製造元

株式会社 **レジーナ**

本 社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2
TEL.048(836)2600(営) FAX.048(837)0099
工 場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中下村107-2
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591

(2021.7 版)

ドレーン部処置モデル BDP-182 取扱説明書

はじめに

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本商品は看護師、看護学生を対象としています。商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

■ 内容物



ドレーン部処置モデル（皮膚）
3枚

インナーウェア
3枚


取扱説明書（本紙）

Regina Fashion Supply Co.,Ltd.

■ご利用方法

(1) インナーウェアを、お手持ちのモデル人形（本製品は含まれていません）、または患者役のヒトに装着してください。

(2) ドレーン部処置モデル（皮膚）を、ビニールから剥がし、インナーウェアの上に載せてください。本製品の裏面には粘性があり、滑り落ちるのを防ぎます。

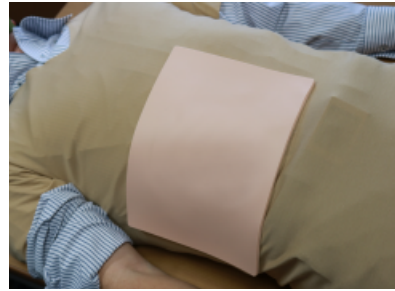

(3) ドレーン部処置モデルの中央にある創傷部に、ペンローズドレーン（別売り）を挿入してください。ペンローズドレーンは、ストロー等で代用できます。


(4) ペンローズドレーンにピンをセットし、Y字にカットしたガーゼを載せます。



(5) サージカルテープで、ガーゼを固定してください。ドレーン部処置モデルは、サージカルテープがしっかり付き、かつきれいに剥がすことが可能なので、ヒトに近い条件でトレーニングが可能です。



❗ 本製品で縫合は行わないでください。特に創傷部の皮膚厚が薄い部分で縫合のトレーニングを行うと、破れる危険があります。

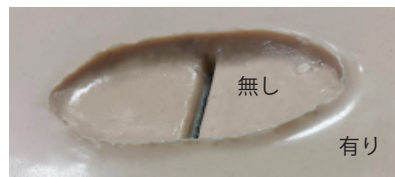


引き裂け防止構造

■ペンローズドレーンの固定以外にも…

本製品のドレーン部処置モデルは、人工皮膚バイオスキンで作られており、一般的なメイク用具であれば着色することが可能です。ユーザー様が、状態に合った赤みを創傷部に付けることができます。

着色後は、市販のクレンジング剤で綺麗に拭き取ってください。長期間放置すると、色が沈着することがあります。

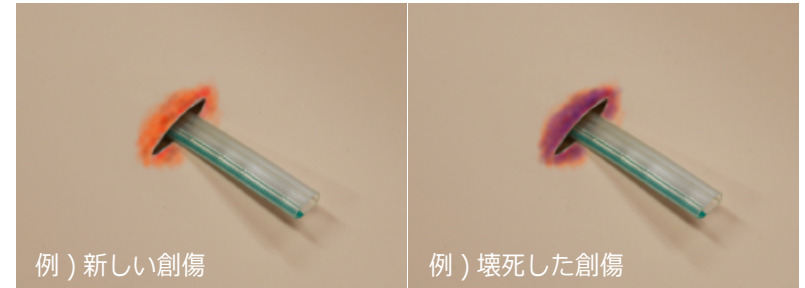

■裏面の粘性が落ちたら…

ドレーン部処置モデルは、滑り止め用に粘性をもたせています。そのため、長期間お使いいただくと、インナーウェアの生地等が付着いたします。

その際は、水で洗い流してください。水に濡れると一時的に粘性がなくなり、附着物を洗い流すことができます。乾燥後は粘着性が戻ります。



洗浄後は、十分に水分を拭き取り、乾燥させてから保管してください。

■インナーウェアは洗濯可能

ドレーン部処置モデルを載せるインナーウェアは、洗濯機で洗うことができます。

■載せたまま保管しないでください

ドレーン部処置モデルを載せたまま長期間放置すると、跡が残ることがありますのでご注意ください。

