

取扱上のご注意、保管について


- ◎創傷部には、裂けることを防止するための繊維が埋め込まれていますが、過度な力をかけると破れる可能性があります。
- ◎当製品はドレーン処置の練習用モデルです。縫合の練習をされると、皮膚が破れる原因になります。縫合される際は、別製品の縫合トレーニングプレート BS-SK、または BP シリーズをお求めください。
- ◎目的以外の使用、分解や改造などの行為は行わないでください。
- ◎油性のマジックやサインペンなどは色が沈着することがありますので、ご使用はお控えください。
- ◎直射日光や高温多湿な環境下での長期保管は変形、変色することがあります。
- ◎煮沸や高温のお湯（60℃以上）につけたり、火気を近づけたりしないで下さい。
- ◎表面が汚れた場合には、希釈したエタノールなどのアルコール類で拭きとって下さい。
- ※シンナー、クロロホルムなどの有機溶剤、酸性薬品、アルカリ薬品は使わないでください。
- ◎製品に異常が発生した場合は、担当者までご連絡ください。

ドレーン部処置モデル

BDP-120 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本商品は看護師、看護学生を対象としています。商品を末永く、安全にお使いいただけるよう、ご使用前には必ず本説明書をお読みください。

■内容物

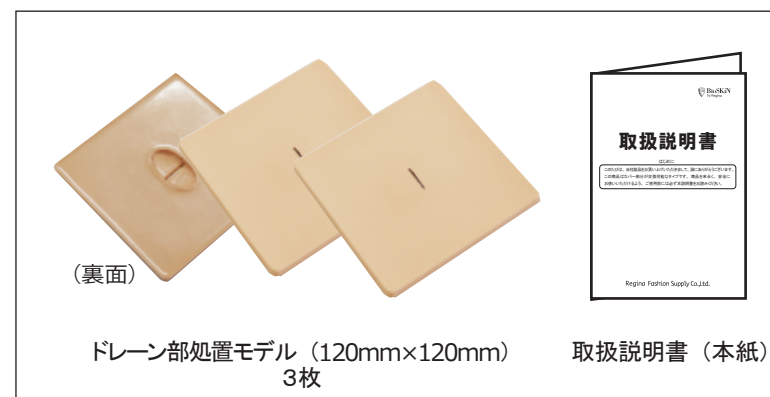

製造元

株式会社 **レジーナ**

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-2
TEL.048(836)2600(営) FAX.048(837)0099
工場 〒019-1402 秋田県仙北郡美郷町野中下村107-2
TEL.0187(84)1516(代) FAX.0187(84)0591

(2021.7 版)

Regina Fashion Supply Co.,Ltd.

■ご利用方法

BDP-120 の中央には創傷があり、周囲には引き裂け防止の繊維が入っています。ドレーンを挿入する際は、創傷部に通してください。それ以外の箇所に切り込みを入れ、ドレーンを挿入した場合、裂ける危険があります。

気管切開後のガーゼ交換



裏面には粘性があります。首に巻き付けることで、気管切開後のガーゼ交換の練習ができます。

輸液中の寝衣交換



バイオスキンはテープがしっかり付きます。BDP-120 を腕に巻き、針を刺した状態で寝衣交換の練習ができます。

■裏面の粘性が落ちたら…


ドレーン部処置モデルは、滑り止め用に粘性をもたせています。そのため、長期間お使いいただくと、インナーウェアの生地等が付着いたします。

その際は、水で洗い流してください。水に濡れると一時的に粘性がなくなり、付着物を洗い流すことができます。乾燥後は粘着性が戻ります。

洗浄後は、十分に水分を拭き取り、乾燥させてから保管してください。



本製品で縫合は行わないでください。特に創傷部の皮膚厚が薄い部分で縫合のトレーニングを行うと、破れる危険があります。

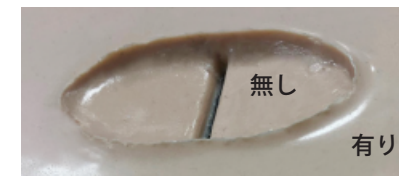

引き裂け防止構造