

# フェイスガード

## 取扱説明書


### 1. 安全上の注意

- 1) 本品は、粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかることを防ぐことを目的としており、ウイルスや細菌類の感染症を完全に防ぐものではありません。また、使用者の眼や顔面の損傷を防ぐものではありませんので、注意してご使用ください。
- 2) フェイスガードのシールド部分は薄いため、皮膚を傷つけることがありますので、注意してご使用ください。
- 3) シールドに汚れがついた場合、視界を遮る等、思わぬ事故の原因となりますので、交換やお手入れを実施してください。
- 4) シールドに傷、割れ、欠けが発生した場合、新しいものに交換してください。目に入ると危険です。
- 5) 分解・改造はしないでください。交換の際には純正品をご使用ください。

### 2. お手入れ方法

- 1) 本体に汚れがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と中性洗剤をしみこませ、やさしく拭き取ってください。
- 3) アルコールを使用する場合、一般的な消毒用エタノールを柔らかい生地にしみこませ、やさしく拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。
- 4) 変色の恐れがありますので次亜塩素酸水は使用しないでください。

### 3. 組立・交換方法

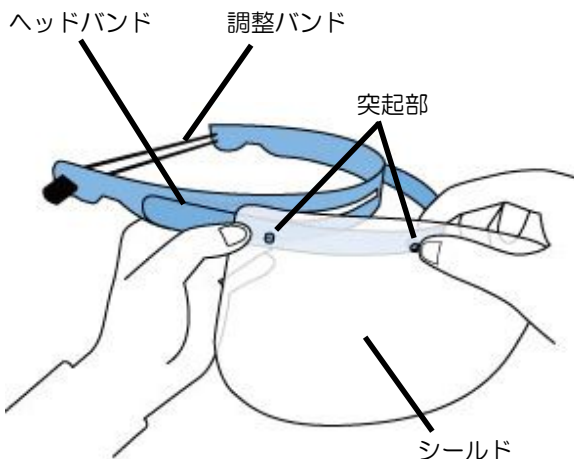

#### <組立方法>


- 高級高透明タイプ、高耐久タイプの場合には『剥離シール①』が貼ってある保護フィルムを剥がしてください。  
ノーマルタイプの場合にはどちらか一方の保護フィルムを剥がしてください。
- 剥がした側が顔面側になるようにヘッドバンドの突起部にシールドの穴部を嵌めこみます。(計4ヶ所)  
※ヘッドバンドの調整バンドを最大まで伸ばしておく、穴部へ嵌めこみやすくなります。
- 高級高透明タイプ、高耐久タイプの場合には『剥離シール②』が貼ってある保護フィルムを、ノーマルタイプの場合には表側の保護フィルムを剥がしてご使用ください。

#### <交換方法>

- ヘッドバンドからシールドを取り外します。
- 新しいシールドを上記組み立て方法の手順で取り付けてください。

#### <装着例>

頭の大きさに合わせて調整バンドの長さ調整を行ってください。

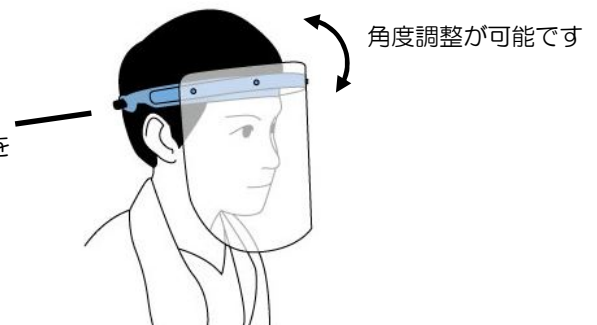

### 4. 廃棄上の注意

廃棄の際には「各自治体の取り決め」に従い処理してください。

材質 ヘッドバンド : PP (ポリプロピレン)  
調整バンド : PP (ポリプロピレン) / ナイロン  
シールド : PET (ポリエチレンテレフタレート)

### 5. アフターサービスと連絡先

製品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

販売元 : 株式会社ニデック  
問い合わせ : コート営業部、ニデックのパネル屋さん  
〒443-0104 愛知県蒲郡市浜形原町大沢 27 番地 4  
電話 (0533) 58-3451  
FAX (0533) 58-3452