

高透明エアロゾルボックス

取扱説明書

1. 安全上及び使用上の注意

- 1) 本品は、医療行為の際、医療従事者へ飛沫等が飛散することを防止する目的の商品であり、感染症を完全に防ぐものではありませんので、注意してご使用ください。
- 2) 各パネルの角部は鋭利になっているため、皮膚を傷つけることがありますので、注意してご使用ください。
また、組み立ての際は手袋を使用してください。
- 3) 各パネルに汚れがついた場合、視界を遮る等、思わぬ事故の原因となりますので、交換やお手入れを実施してください。
- 4) 各パネルに傷、割れ、欠けが発生した場合、新しいものに交換してください。
- 5) 分解・改造はしないでください。交換の際には純正品をご使用ください。
- 6) お手入れは『2. お手入れ方法』に示す方法で実施してください。それ以外の方法で実施されますと、思わぬ破損の原因となります。
- 7) 主な素材となっているアクリル板は、落下等の強い衝撃に弱い素材ですので、取り扱いには十分に注意してください。
- 8) 取り付けネジを強く締めすぎると素材に割れが発生する場合がありますので、ご注意ください。

2. お手入れ方法

- 1) 本体に汚れがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。
- 2) 全面モデルの全ての板と、覗面モデルの覗面板については、表 1 の清掃薬品の使用が可能です。
表 1 の薬品を柔らかい布にしみこませ、やさしく拭き取ってください。それ以外の薬品は使用しないでください。
いずれの薬品を使用する場合も、薬品を長時間付着させないようにご注意ください。
- 3) 覗面モデルの覗面板以外に薬品を使用すると白濁や、薄いキズが発生することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 4) 透明フィルムを破るときにはカッターやハサミを使用してください。
使用後は新しいものに取り換えてください。

表 1. 使用可能な清掃薬品について

分類	一般名	濃度
塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	0.10%
酸化剤	過酸化水素水	0.50%
アルデヒド系	グルタラル	3.50%
第四級アンモニウム塩	塩化ベンザルコニウム	0.20%
両性界面活性剤	アルキルポリアミノエチルグリシン	0.50%
アルコール系	消毒用エタノール	原液

3. 組立方法

3-1. 各部の名称及び付属品一覧

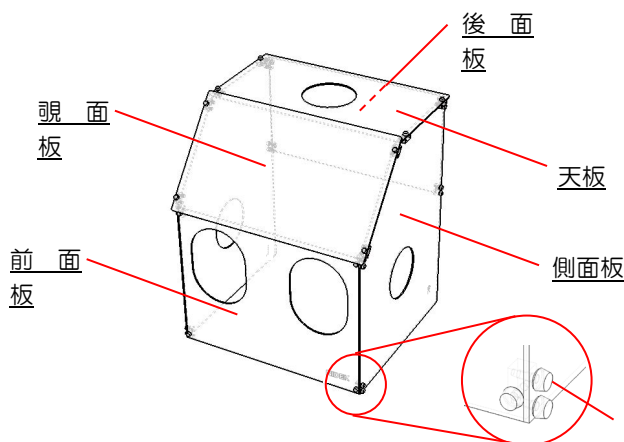


表 2. 付属品一覧

品名	数量	単位
ナイロン化粧ネジ (16 個+予備 10 個)	26	個
後面用ビニールシート	1	枚
サニメント手袋	2	枚
取扱説明書	1	枚
側面・天板用透明フィルム (150mm×150mm)	9	枚
前面用透明フィルム (150mm×220mm)	6	枚

- ・付属品の透明フィルム及び後面用ビニールシート(蛇腹の透明フィルム)は必要に応じて該当の板に貼り付けてご使用ください。


3-2. 組み立て方法

※怪我をする恐れがありますので、組み立てる際には手袋を使用してください。

組立参考動画 QR コード (URL:<https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-Fse-uPLtC4>)




① 側面板に前面板を取り付けます。

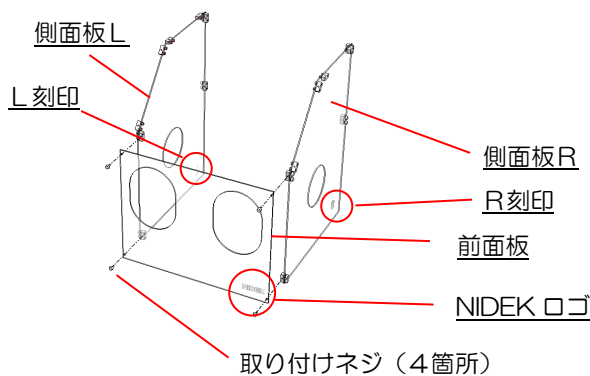


※NIDEK ロゴが右下になるように組付けてください。
※側面板には左右(L R)がありますのでご注意ください。

② 側面板に後面板を取り付けます。

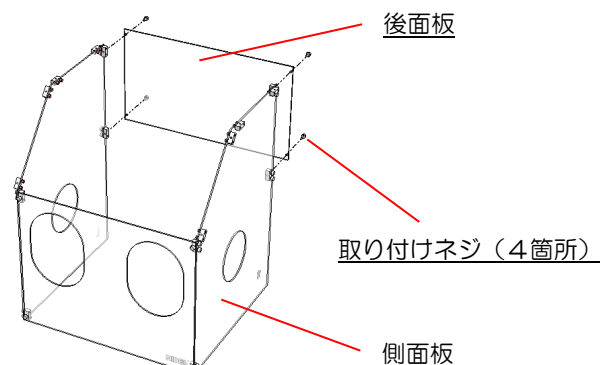


③ 側面板に天板を取り付けます。

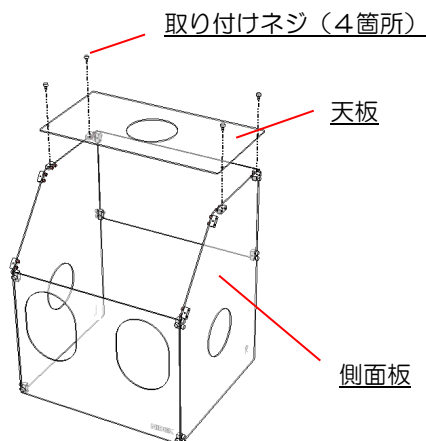


④ 側面板に覗面板を取り付けて完成です。

※必要に応じて後面用ビニールシートを後面パネルに貼り付けてご使用ください

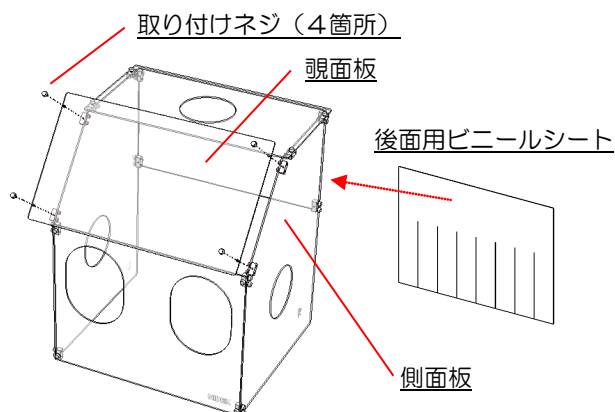

4. 使用方法

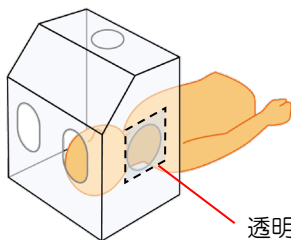

- 左図を参考に、頭部にかぶせてご使用ください
- 穴部の隙間を塞ぎたい場合は付属の透明フィルムをご使用ください。
透明フィルムはハサミ・カッターで破くことができます。

5. 廃棄上の注意

廃棄の際には「各自治体の取り決め」に従い処理してください。

材質	各パネル	: PMMA (アクリル)
	取り付けネジ	: PA (ナイロン) / ステンレス
	樹脂ジョイント	: PMMA (アクリル)
	樹脂ジョイント固定ネジ	: ステンレス
	透明フィルム	: PU (ポリウレタン)

6. アフターサービスと連絡先

製品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

販売元 : 株式会社ニデック
問い合わせ : コート営業部
〒443-0104 愛知県蒲郡市浜形原町大沢 27 番地 4
電話 (0533) 58-3451
FAX (0533) 58-3452