


装着・使用方法

コンビーン オプティマの場合



陰茎の先端と排出口の間に少し隙間を残した状態でコンドーム型収尿器をかぶせます。

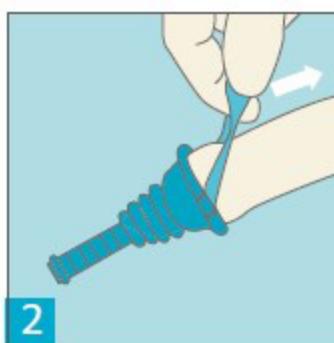


先端を押さえながらループを引っ張り、陰茎の上にコンドーム型収尿器を広げます。



しっかりとフィットさせるために、陰茎にかぶせられたコンドーム型収尿器を上からやさしく握ります。




注入口が内側に向くようにバッグを内側右大腿部に置きます。脚の周りに巻き、固定します。
※コンビーン アクティブ レッグバッグと接続する場合

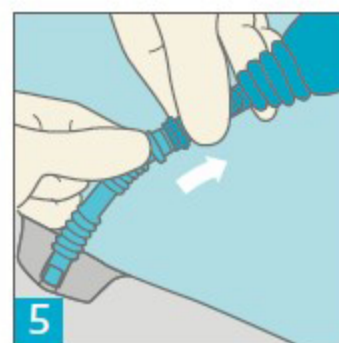


注入口のコネクターをコンドーム型収尿器の排出口に押し込むことで、コンドーム型収尿器につなぎます。接続方法についてはP.76をご覧ください。


コンビーン セキュアー ワンピースタイプの場合

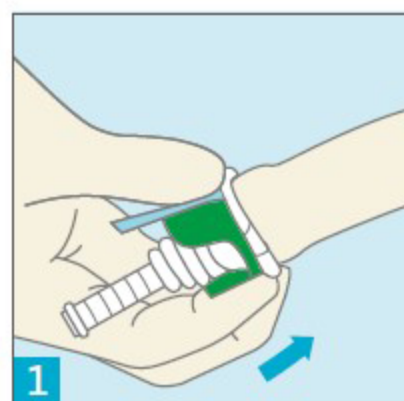


収尿器をペニスの先にかぶせ、片方の手でアプリーケーター(装着補助具)を支えるように持ちます。尿道口をふさがないように注意しましょう。

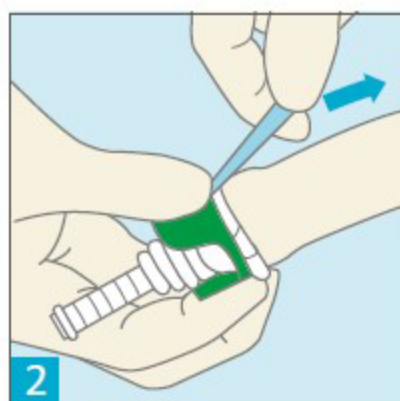

アプリーケーターを押さえたまま、フラップをゆっくりとペニスの根元の方へ引き、収尿器を装着します。

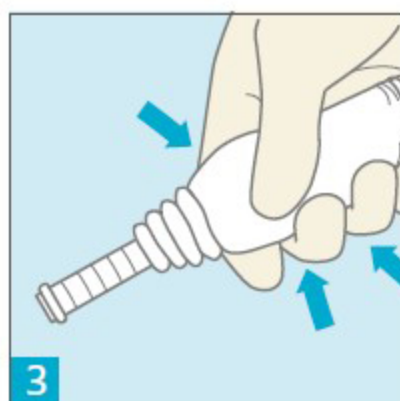


収尿器が装着できたらアプリーケーターをはずし、粘着剤の付いている部分を押し付けて密着させます。手で全体的に密着させることで、漏れを防止します。

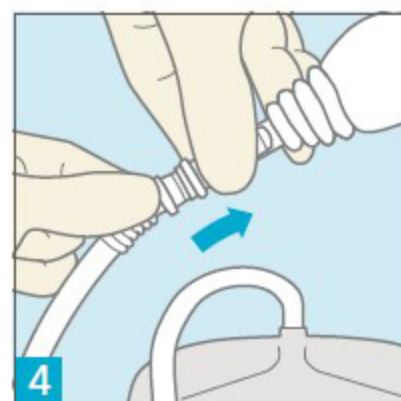


収尿器の先端部分を、コンビーンレッグバッグなどの外部蓄尿袋(別売り)のチューブ先端につけたコネクターと接続します。漏れないようにしっかりと接続します。接続方法についてはP.76をご覧ください。


コンビーン セキュアー ツーピースタイプの場合

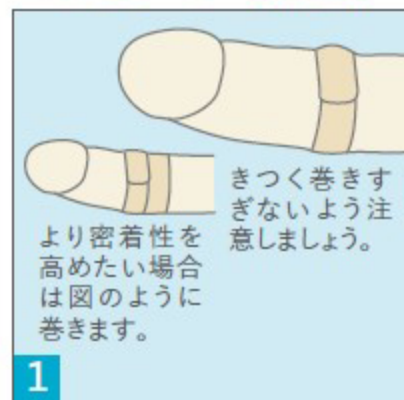


皮膚保護剤テープの剥離紙を剥がし、ペニスの根元から2cm程度のところにまきます。

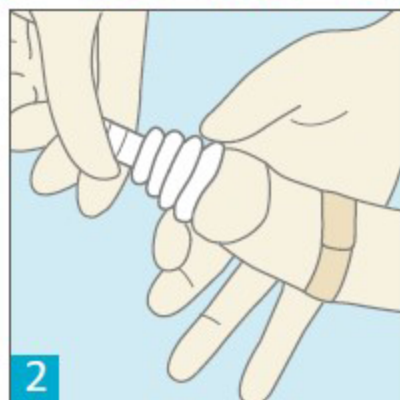

収尿器をペニスの先端にかぶせます。片方の手で収尿器の先端をしっかりつまみ、もう片方の手で収尿器を伸ばします。

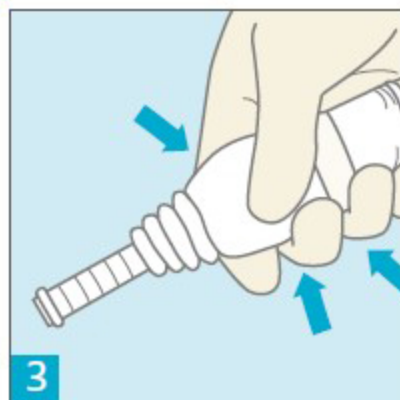

収尿器が均一になるようペニスに沿って伸ばしながら装着します。装着後は皮膚保護剤の付いている部分を優しく押さえて、よく密着させます。

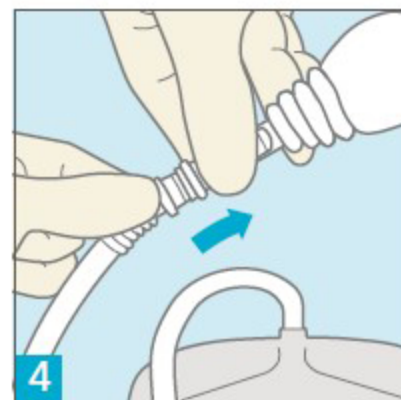

収尿器の先端部分を、コンビーンレッグバッグなどの外部蓄尿袋(別売り)のチューブ先端につけたコネクターと接続します。漏れないようにしっかりと接続します。接続方法についてはP.76をご覧ください。