


日本製

超軽量 26g

HM フェイス シールド

HM FACE SHIELD

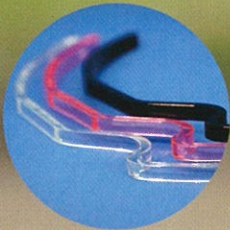

カラー ● Clear ● Clear Pink ● Black

見た目はシンプル！だけど
ズレずにしっかりガード！

フリーサイズ対応
メガネの上からもOK

シールドの交換も
簡単！ラクチン！

組み立て方法

シールドサイズ:W330×H190mm



シールド:PET



フレーム:ポリカーボネート

PAT.P

1 シールドにある穴の内側(①と①')から順番に外側へ向かってフレームを差し込んでください。


2 左右の穴に差し込みましたら、シールドがフレームにぴったり合うように矢印の方に調整してください。



※②と②'の穴をフレームに通すとシールドの端は外側へ



②と②'の穴を飛ばして③や③'の穴を通していただくと、シールドの端は内側になります。お好みに応じて使い分けてください。

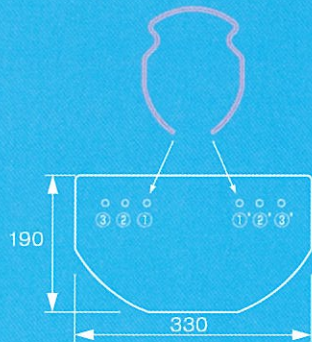

ご注文・その他 詳しくはこちらまで

使用上の注意

- ・用途以外には使用しないでください。
- ・本製品は飛沫を防止する目的のものでウイルスを完全に防ぐものではありません。
- ・シートの端で手指を傷つける可能性がありますので注意してご使用ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・火気のそばでの使用はおやめください。

販売元:ミノル化学工業株式会社

〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺1丁目5-22

TEL 06-6728-3222

製造元・株式会社花谷紙工 〒577-0826 大阪府東大阪市大連北4丁目2-27

商品説明及び組立動画が
▼ご覧頂けます▼



HMフェイスシールド

日本製

こんな場面で安心してご使用いただけます！

超軽量 26g

☆HMフェイスシールドの8大特長

1. 長時間の使用もらくらく 超軽量設計



HMフェイスシールドは26gなので、長時間つけても疲れにくく耳や頭も痛くなりません。


3. ヘアスタイルや眼鏡を気にせず 簡単着脱



シールドと顔の間に十分隙間があるので、くもりやすく前髪もくずれません。また眼鏡の上からでも装着できます。お化粧も気にせずOK!!

※大きい目のフレームの場合は②、②'の穴を飛ばしてお使いください。(別紙 組立方法参照)

5. くもらずクリアな視界

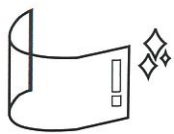

シールドはPET樹脂なのでアルコール消毒または、中性洗剤で洗えば清潔に繰り返し使えます!

※携帯電話などの顔認証もOKです。

7. 顔全体が保護でき安心



目の保護はもちろん、咳やくしゃみなどの飛沫、粉塵などを押さえます。また、逆さまにつければマウスシールドにも!

※フレームをマスクのゴムに掛ければさらに安定します。



2. 笑顔で感染対策できます!




ヨガやダンスはもちろん、講演や会社・飲食業などあらゆるシーンでお使いいただけます。

※あらゆる店舗、受付、学校、塾、レッスン、演奏会、介護現場など



4. シンプルだけどずれにくい

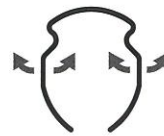

フレームは強度に優れたポリカーボネート樹脂製でサイズ調整が可能です。子ども・女性から男性まで幅広い方に快適に使っていただけます。

※フレームの中央は絶対に曲げないでください破損の原因になります。

6. 頭に掛ければ水分補給や食事もできます。



フレームにはバネ特性があるので、頭に掛けてもずれにくくなっております。



8. クリア色で細い一直線のシンプル形状なので目立つことなく、お洒落に感染対策できます。

フレームをデコレーションしたり、シールドにお好みのステッカーを貼れば人とも区別できてオリジナルなフェイスシールドが楽しめます。