

GRACE CORE

2020/10 Debut

あなただけの椅子づくり


更なる快適な空間実現する新バックサポートシステム

通気性抜群のオリジナルシートがもたらす爽快感

思わず出歩きたくなる高級感漂うスタイル

「自分の意思で移動したい」

そんな想いに寄り添いたい

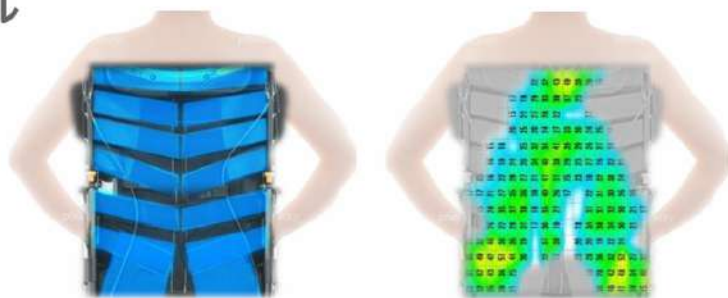

【標準タイプ】
グレイスコア

【多機能タイプ】
グレイスコア-マルチ

【モジュールタイプ】
グレイスコア-アジャスト



GRC-11B (自走式)
GRC-21B (介助式)

GRC-31B (自走式)
GRC-41B (介助式)

NEW 2021/11 Debut

GRC-51B (自走式)
GRC-61B (介助式)

シートカラーバリエーション



M12 ネビター



M13 ブラック




M14 ワインレッド*


*2022年1月より

1 長時間のご利用も快適なバックサポートシステム！

◆標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート！

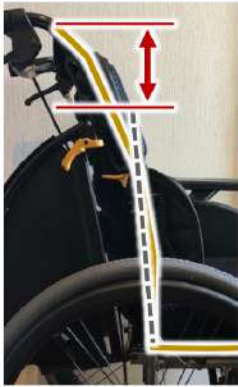

従来の車椅子のバックサポート高さ40cmと比べ16cmも高いバックサポートと、より広い面で背中全体をしっかりと支える背もたれ形状が、長時間のご利用も快適に過ごしやすい新バックサポート。背中をしっかりと支えることで、臀部の圧の軽減につながります。

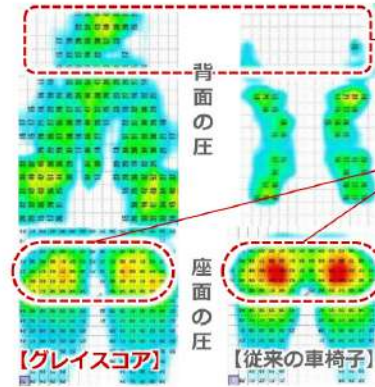


より高い位置・より広い面で支えることで臀部の圧を軽減。

◆高いバックサポートでも操作性抜群の三角パット入り背カバーシート！



肩関節が動かしやすいように、脊柱の高い位置まで支えるので、バックサポートが高くても操作性は抜群です。

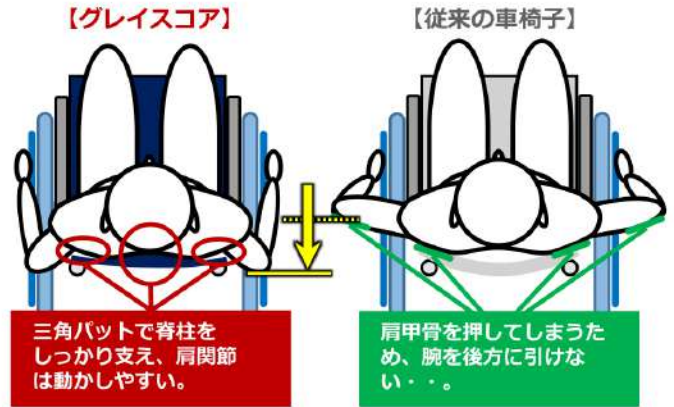

グレイスコアの背もたれの秘密をこちらの動画で詳しく解説！
ここまで変わる！？背もたれの秘密！



グレイスコアの背張り調整の秘密をこちらの動画で詳しく解説！
ここまで変わる！？背張り調整の秘密！

2 その場でシート奥行を簡単調整！



座シートの奥行を38cmと34cmに工具レスで簡単に設定可能。小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。

3 フットサポート直下構造！



フットサポートを手前に引いた設計なので、車椅子なのに椅子のように足を引いて座りやすい車椅子です。



グレイスコアの座シートの秘密をこちらの動画で詳しく解説！
ここまで変わる！？座シートの秘密！



グレイスコアのフットサポートの秘密をこちらの動画で詳しく解説！
ここまで変わる！？フットサポートの秘密！

4 空気不要のハイブリッドタイヤ！

収縮しづらい高密度の発泡ウレタンチューブ



チューブの代わりにクッション性に優れた発泡ウレタンチューブ入りのハイブリッドタイヤを標準装備。空気管理不要なので軽い力で操作でき、ブレーキの効きも維持できるので安全に使用できます。

5 快適なイージードライクッション！



オリジナルメッシュシート



スポンジ素材のクッション



イージードライクッション 重量：0.5kg

シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用。通気性抜群でムレにくい快適なシートです。



グレイスコアのきめ細かな標準装備をごちらの動画で詳しく解説！

ここまで変わった！車椅子の標準装備！

6 グレイスコアのオプション

杖入れ (大)
TAISコード
00066-000344



後方ガードル架セット
TAISコード
00066-000209



折りたたみ式酸素ボンベ架
TAISコード
00066-000354



*酸素ボンベ架取付け時は後方に荷重がかかります。転倒防止の併用をおすすめします。
*NEXT用ボンベ架も取付け可能。

転倒防止キャスト付
TAISコード
00066-000356



ブレーキ延長棒
TAISコード
00066-000298



*延長棒5cmと10cmが取付け可能です。

スポークカバー
(22"クリアのみ)
TAISコード
00066-000342



*GRC-11B/31Bにのみ取付け可能です。

ドラロック (フットブレーキ) * 介助式のみ取付け可能

GRC-21BD

TAISコード：00066-000403

GRC-41BD


TAISコード：00066-000404



ドラロック取付け時、以下のオプションが取付けできません。ご注意ください。

- ・杖入れ
- ・後方ガードル架セット
- ・折りたたみ式酸素ボンベ架
- ・転倒防止キャスト付

グレイスコアシリーズの使いわけマップ

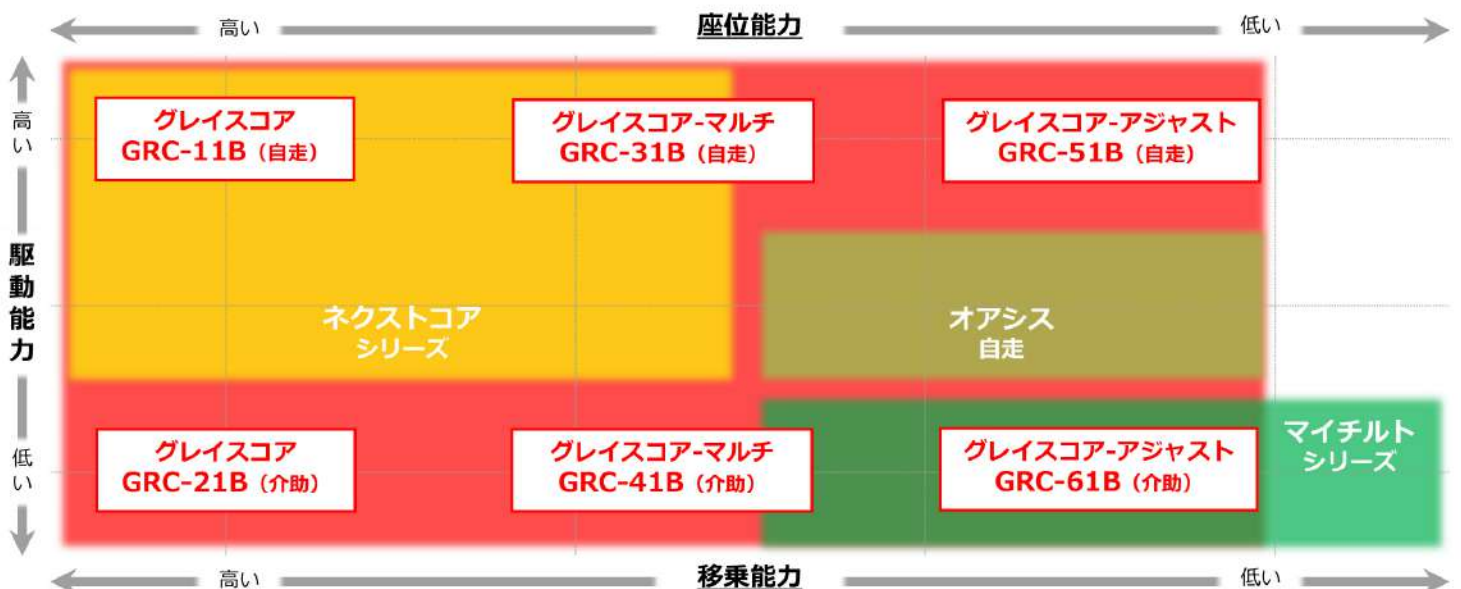

グレイスコア

GRACE CORE



GRC-11B
(自走式)

TAISコード：00066-000399



GRC-21B
(介助式)

TAISコード：00066-000400

シートカラーバリエーション



M12 ネイビー



M13 ブラック



M14 ワインレッド*

*2022年1月より

グレイスコア マルチ

GRACE CORE MULTI



GRC-31B
(自走式)

TAISコード：00066-000401



GRC-41B
(介助式)

TAISコード：00066-000402

シートカラーバリエーション



M12 ネイビー



M13 ブラック



M14 ワインレッド*

*2022年1月より

肘掛けはね上げ

肘掛けを後方にはね上げることで、横方向への車椅子からの乗り移りがしやすくなります。



足台スイングアウト

フットサポートを開閉・着脱することで、足元のスペースを広く取り、車椅子からの乗り移りを安全に行いやすくなります。



サイズ表 (mm)

機種名	キャスタ × 大車輪	前座高	後座高	シート幅	※1 シート奥行	アーム サポート 高	バック サポート 高	フット長	全長	全高	※2 全幅	折畳み 幅	重量
GRC-11B	5×22 [ｲﾝﾁ]	430	415	400/420	380(340)	250	560	290~350	950	930	565	320	13.8 [kg]
GRC-21B	5×16 [ｲﾝﾁ]	430	415	400/420	380(340)	250	560	290~350	950	930	560	310	12.4 [kg]
GRC-31B	5×22 [ｲﾝﾁ]	430	415	400/420	380(340)	250	560	290~350	950	930	565	320	15.5 [kg]
GRC-41B	5×16 [ｲﾝﾁ]	430	415	400/420	380(340)	250	560	290~350	950	930	560	310	14.1 [kg]

※1 シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)

※2 座幅400mm時の寸法になります。

グレイスコア アジャスト

GRACE CORE ADJUST

2021/11 Debut



GRC-51B
(自走式)



GRC-61B
(介助式)

シートカラーバリエーション



M12 ネイビー



M13 ブラック



M14 ワインレッド

*2022年1月より

グレイスコア-アジャストの3つの新機能

座面の高さ調整

座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用の際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。

*前座高45cmはメーカーオプションになります。



肘掛け高さ調整

肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。



2 way (ツーウェイ) アームサポート

自走式は肘パット前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさと漕ぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パット後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パットです。



サイズ表 (mm)

機種名	チャスタ × 大車輪	※1 前座高	※1 後座高	シート幅	※3 シート奥行	アーム サポート 高	バック サポート 高	フット長	全長	全高	※4 全幅	折畳み 幅	重量
GRC-51B	5×22 [インチ]	※2(450) 430 410	※2(435) 415 395	400/420	380(340)	250~310 (4段階)	560	290~350 (4段階)	950	930	565	320	17.1 [kg]
GRC-61B	5×16 [インチ]	※2(450) 430 410	※2(435) 415 395	400/420	380(340)	250~310 (4段階)	560	290~350 (4段階)	950	930	560	310	15.8 [kg]

※1 出荷時は前座高430mm・後座高415mmの設定になります。

※2 ()の前座高・後座高の設定はメーカーオプションになります。

※3 シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)

※4 座幅400mm時の寸法になります。

GRACE CORE

Video Collection



New !

グレイスコア-アジャストの特徴



グレイスコアの機能シリーズ



グレイスコアの使い方シリーズ

グレイスコア製作及び動画 監修

北出 貴則

医療法人誠佑記念病院リハビリテーション室室長

姿勢・活動ケア研究会代表

POTTプロジェクト 理事・全体アドバイザー

理学療法士・福祉用具プランナー

バンクトエングストローム氏認定コンセプトマスター

お問い合わせ先



株式会社 **松永製作所**

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484

TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270

URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>