

便座に
通すだけ、
快適採便!

べんとりくん™



うんちくん®

ハンモックタイプの採便シート



ハンモック
タイプのため、
セットが簡単です。

ほぐれ性と耐水性を
兼ね備えているため、
採便後全て流せます。

空中トラップするため、
血尿や便器洗浄剤の
影響を受けにくい
設計です。


排便部中央が
くぼんでいるため、
水様便でも
採便が可能です。

和式便器にも
使用することが
できます。


空中トラップするため、
トイレットペーパーを
敷く必要は
ありません。

「べんとりくん™」の使用方法



1
採便シートを袋から取り出します。袋はゴミ箱へ捨ててください。

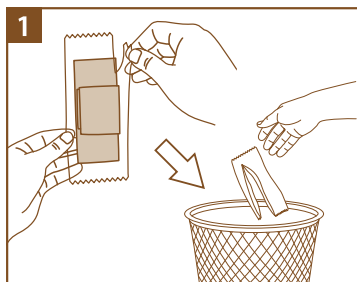


2
採便シートを広げます。排便部中央のノリ付けは、はがさないでください。

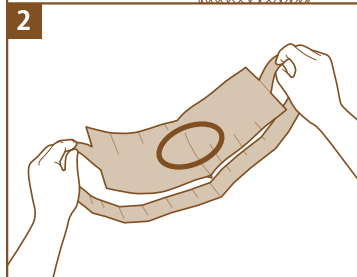


3
便座を持ち上げ、排便部が上になるように通します。

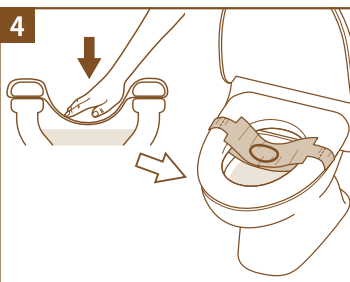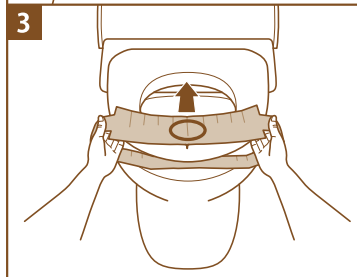

4
便座の奥にセットし、排便部の○印と帯部が触れるまで押してくぼみを作ります。

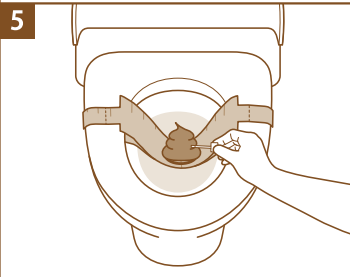

5
便座にすわり排便し、採便します。

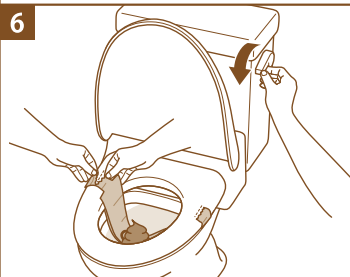

6
採便後、キリトリ線部分を切り便器内に落とし、水を流します。



ENGLISH



使用方法のアニメーションが見られます
You can watch the animation of usage.

日本語



使用上の注意

- ◆自動洗浄トイレは電源を切ってから使用してください。
- ◆採便シートはできるだけ水や尿でぬらさないでください。
- ◆女性の方はできるだけ排尿後に採便シートをセットしてください。
- ◆おしり洗浄は採便後採便シートを便器内に落とした後に使用してください。
- ◆和式便器には採便シートを広げ敷いて使用してください。
- ◆詰まるおそれがありますので多量のトイレトーパーと同時に流さないでください。少しおいてから水を流すと流れやすくなります。

■ 品名・包装単位・貯法・製品コード

品名	包装単位	貯法	製品コード
べんとりくん™	600枚 X 1	室温保存	E-PB10

