

新商品

フルリクライニング車椅子 RJ-370

本体価格

優れた座位保持効果により
体の負担を軽減します。
リクライニング時には背、腰、足が
連動することで圧迫をさらに軽減できます。
カラータイプは3種類です。
インテリアに合わせてお選びいただけます。

「やさしさ」
かなえる
新発想

介護保険
福祉用具
貸与
適応商品

made
in
JAPAN



RJ-370B




RJ-370P



RJ-370G


POINT 優れた座位保持効果と体圧分散の3つのポイント

バックサポートとシートの連動

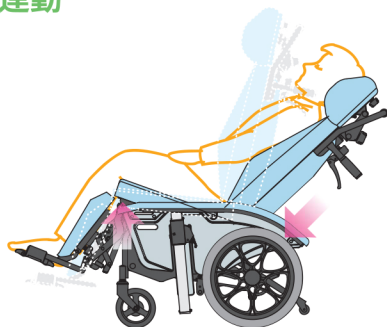

バックサポートとシートが連動し、ひざを持ち上げます。この動きが体圧を効果的に分散し、前へのずれと臀部への体圧集中を軽減します。

バックサポートとレッグサポートのスライド伸縮機能

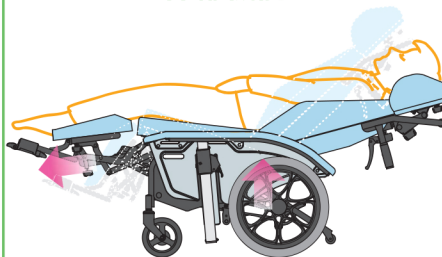

リクライニングに合わせてバックサポートがスライドし、レッグサポートが伸びることで背中と足のずれと圧迫感を軽減します。

ゲルクッションの採用



ゲルクッションを採用し、臀部を支える座面の体圧分散効果を高めています。

フルクライニング車椅子 RJ-370



(リクライニング状態)

仕様

全長	1,130~1,690mm
全幅	615mm
全高	705~1,235mm
座面幅(シート幅)	410mm
座面高(背上げ時)	前部530mm・後部480mm
座面奥行き	425mm
重量	40kg
耐荷重	100kg

- キャスター径/前輪6インチ・後輪16インチ
- 主要素材/スチール、ゲルクッション
- ※肘かけの高さは、最低位485・584・613・642・671・700・最高位729mmの7段階に調節できます。

カラーバリエーション

お求めの際にはカラーをご指定ください。

●RJ-370B

カラー/ブルー
素材/レザー
<JANコード>4543085030433
<TAISコード>00084-000134

●RJ-370P

カラー/パープル
素材/レザー
<JANコード>4543085030440
<TAISコード>00084-000134

●RJ-370G

カラー/グリーン
素材/レザー
<JANコード>4543085030457
<TAISコード>00084-000134

機能紹介



レッグサポート

背受けのリクライニングと連動し、体圧分散に最適なタイミングでレッグサポートが上下します。また、リクライニングに合わせてレッグサポートが伸縮もします。単独で4段階の位置調整もできます。



ヘッドサポート

上部のつまみで左右の調整、下部のつまみで前後の調整ができます。バックサポート側のつまみで、ヘッドサポートの高さ調整ができます。



切替レバー

ワンタッチで単独と連動エレベーターの切り替えができます。



シート

シートスプリングとゲルクッションで乗り心地を良くしています。



アームサポート

7段階の高さ調整ができます。



フットサポート

簡単に跳ね上げや折りたたみができます。レッグサポートを収納できますから乗り降りに便利です。

オプション



ガートル架

<JANコード>4543085030464
<TAISコード>00084-000135




ボンベ架


<JANコード>4543085030471
<TAISコード>00084-000136
※直径103mm、500ℓの酸素ボンベに対応。

オプションは本体と同時に購入の場合非課税となります。


起立時

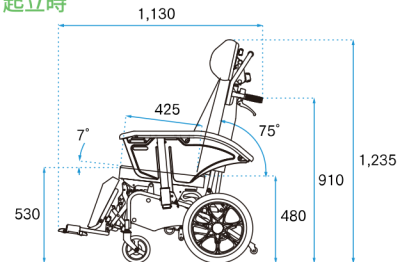

最大座角時

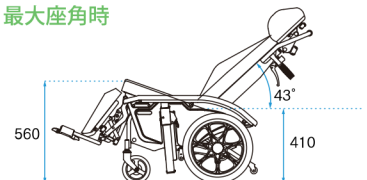

フルフラット時

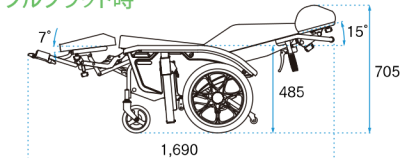

本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089(964)7770 FAX089(964)1522
札幌営業所 / TEL011(788)5334 FAX011(788)5341
仙台営業所 / TEL022(781)6715 FAX022(781)6796
北関東営業所 / TEL027(212)2066 FAX027(212)2067
東京営業所 / TEL03(5939)8611 FAX03(5939)8612
名古屋営業所 / TEL0568(42)6015 FAX0568(71)9656
大阪営業所 / TEL06(4860)6601 FAX06(4860)6602
福岡営業所 / TEL0942(45)3808 FAX0942(45)3809

ホームページもご覧ください!
動画配信中



メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱いは

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。
(2021年3月)