

新商品

乗せかえ装置付ストレッチャー

HS-260

本体価格(税抜)

2019年9月発売



人材
確保等
支援
助成金


made
in
JAPAN




移乗が簡単
腰痛予防に最適

いaura独自の繰り出しベルト ご利用者を持ち上げず、寝たままの状態ですぐ乗せかえができます。


ご利用者がストレッチャーに背中を向けるように寝返りさせます。

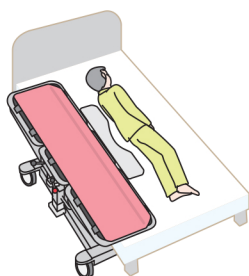


ハンドルを回して繰り出しベルトを送り出し、身体の下に敷き込みます。

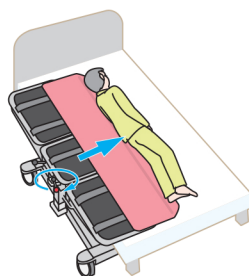


身体を仰向けにし、繰り出しベルトの上に乗せます。

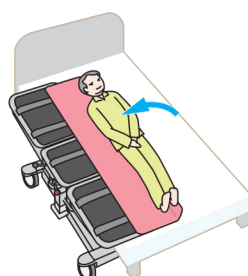

身体を支えながら、繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで、ハンドルを回して巻き取ります。

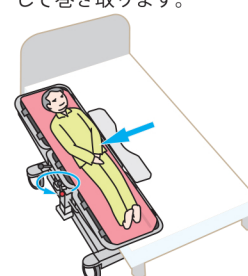

■機能紹介

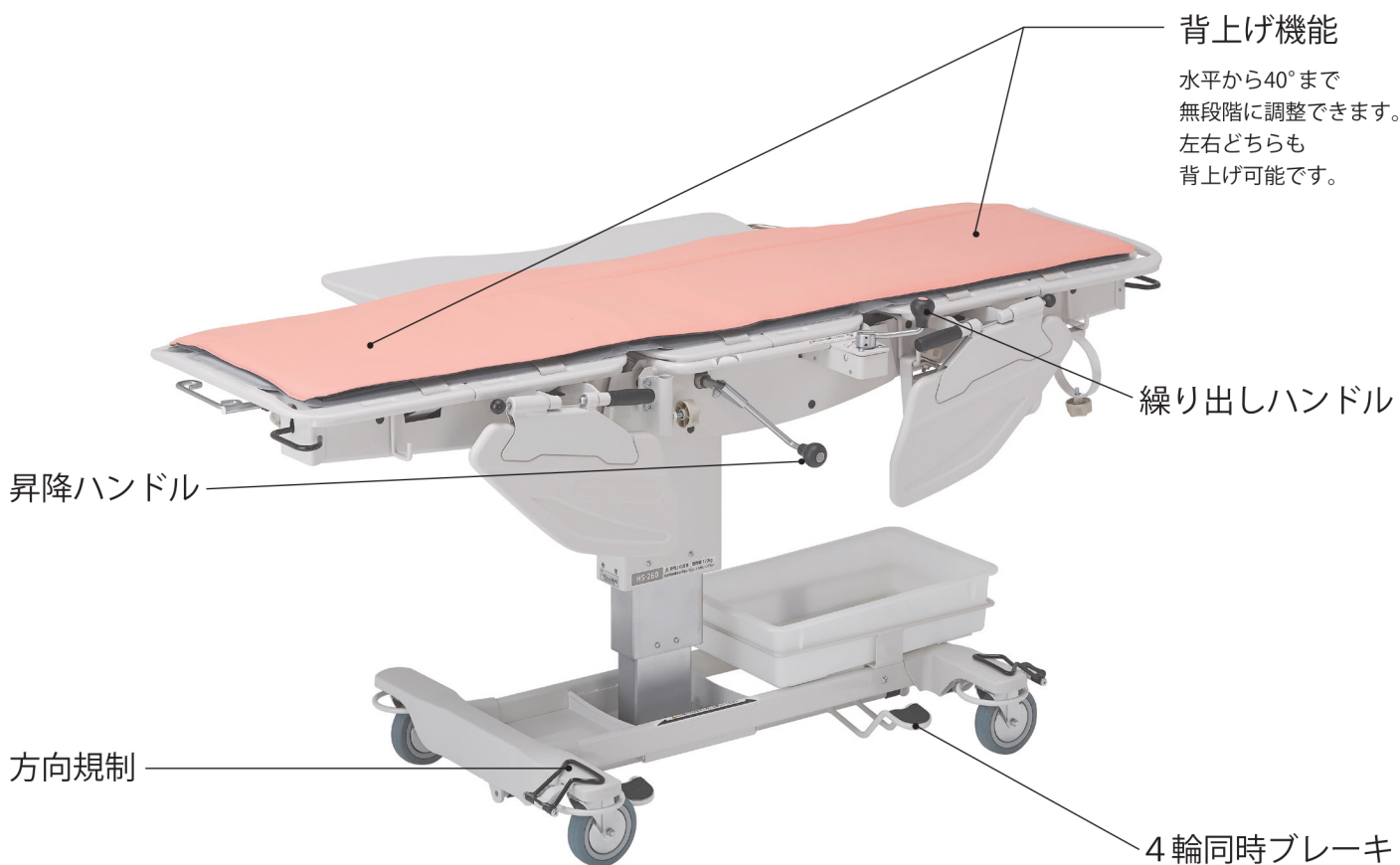

背上げ機能
水平から40°まで
無段階に調整できます。
左右どちらも
背上げ可能です。

繰り出しハンドル



昇降ハンドル

方向規制

4輪同時ブレーキ

■仕様

- 全長 1,850mm
- 全幅 725mm
- 座面高(ボトム下面) 515 ~ 845mm
- フレーム高 165mm
- 本体重量 80 kg
- 耐荷重 120 kg
- 背受け角度 0 ~ 40°
- キャスター径 125mm
- 主要材質 スチール・塩化ビニル

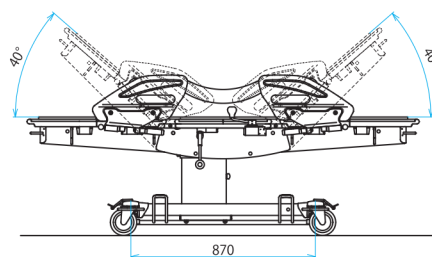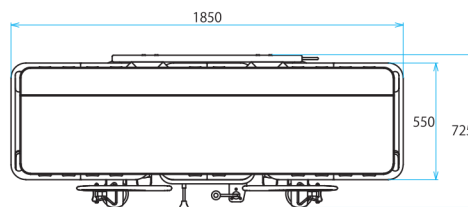


■オプション

- ガートル架(高さ調節)
- ボンベ受け
- カゴ
- マクラ



本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522
東京支店 / TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612
札幌営業所 / TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341
仙台営業所 / TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796
北関東営業所 / TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067
名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656
大阪営業所 / TEL06 (4860) 6601 FAX06 (4860) 6602
福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

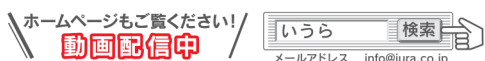

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(※詳細は各営業所にお問合せください。)
(2019年9月)