


**⚠ 注意** 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。



- ・本製品組立の際は、本体の組立方向（上下）を間違えないでください。
  - ・本製品組立の際は、バンドを完全にはめ込んで固定してください。バンドのはめ込みが不完全な場合、ガタつき及び分解するおそれがあります。
  - ・本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。
  - ・本製品にぶらさがったり寄りかかったりしないでください。
  - ・本製品に **3kgf** 以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
  - ・本製品に物をぶらさげたりしないでください。
  - ・体を預ける動作及び立ち上がった場合は、必ずニギリバーのパイプ部分をにぎって下さい。
  - ・取付後、むやみに分解しないでください。
- ※最終ご使用者へ必ずお渡しください。


## 分解の方法

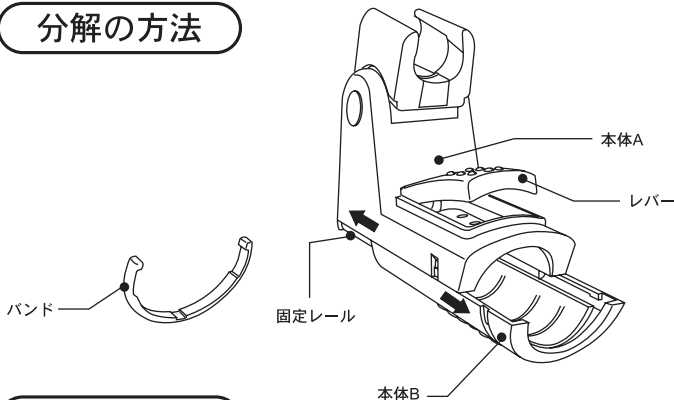

## 説明

- ① 組まれた状態の本体A・Bとバンドが各1個入っているか確認して下さい。本体A・Bにある固定レールをスライドさせ外します。

## 組立方法

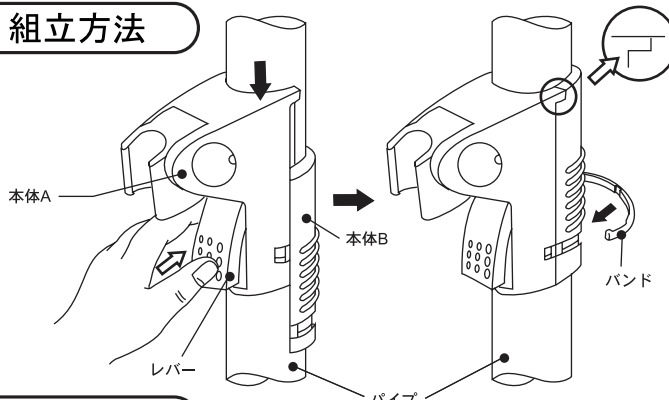


## 説明

- ② パイプを本体A・Bで挟み込み、レバーを押しながら本体Aを下へスライドさせてください。
- ③ 本体Aを本体Bの○で囲んだ部分が隙間無く当たりきるまでしっかりと押し込みバンドが沈み込む様しっかりと締めてください。

## 完成図

**⚠** 水圧等で抜けない様にシャワーヘッドは奥までしっかり差し込んでご使用下さい。

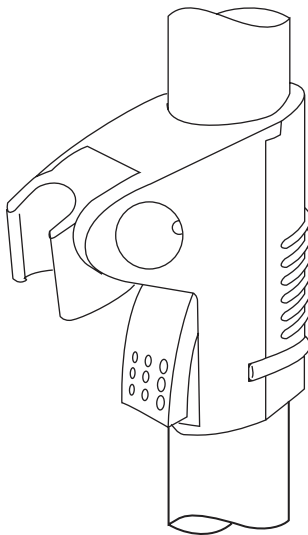


1. 上下調整  
レバーを握って上下して下さい。
2. 角度調整  
シャワーヘッドを持ってハンガーの角度を調整して下さい。

## ご使用方法

- ④ 組み立て完成。レバーを押すと解除となり、上下に可動することが出来ます。  
※凹凸パイプに使用する場合の注意  
・本体を左右に回転させてご使用になりますと上下の移動がしづらくなります。本体を元の位置に戻してから上下移動してください。  
※ご使用上の注意  
・レバーを押さない状態で無理に上下移動及び回転させますと、破損の原因となります。

## 交換方法

- ・○で囲んだ部分の凹みにマイナスドライバー等で引っ掛け外してください。
- ※外す際のご注意  
本体を傷つけ無い様注意して行って下さい。

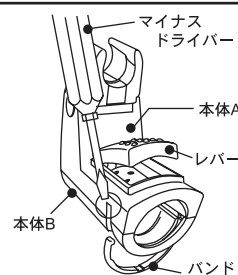

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

## お手入れ方法

- ・通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等で速やかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
- ・可動部に洗剤が付着すると保持力が低下しますのでご注意下さい。
- ・クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。  
本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- ・酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。  
本製品に、変色・割れ・光沢消失を起こす恐れがあります。
- ・掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。
- ・入浴剤をご使用の場合は、入浴後必ず入浴剤を洗い流し柔らかい布等で拭き取ってください。